



# Easy 160i

**Flexibilität ohne Grenzen**

**SOPUR**

# **Easy 160i**

## **Ein wahres Multitalent!**



## ■ Technische Informationen Easy 160i

- **Sitzbreite** von 38 – 54 cm
- **Sitztiefe** von 36 – 54 cm
- **Sitziefenwachstum**
  - von 36 – 44 cm
  - von 42 – 48 cm
  - von 48 – 54 cm
- **Rückenhöhe** von 30 – 50 cm stufenlos
- **Rahmen mit abnehmbarer Fussraste**
- **Fussraste nach innen und aussen schwenkbar**
- **Rückenwinkeleinstellung – 5° bis + 15° in 5° Schritten**
- **Rücken winkelverstellbar – 3° bis 27° (Gasdruckfeder)**
- **Zuladung bis 140 kg**

## ▪ Easy 160i – Sitztiefenwachstum


- Das Sitztiefenwachstum wird über ein Klett an der Sitzbespannung eingestellt
- ST 36 – 44 cm = 8 cm Wachstum
- ST 42 – 48 cm = 6 cm Wachstum
- ST 48 – 54 cm = 6 cm Wachstum



Sitztiefe

## ■ Rahmenhöhen


- Vom Boden bis zum oberen Rahmenrohr gemessen
- Vordere Rahmenhöhe von 37 cm bis 52 cm
- Hintere Rahmenhöhe von 35 cm bis 50 cm

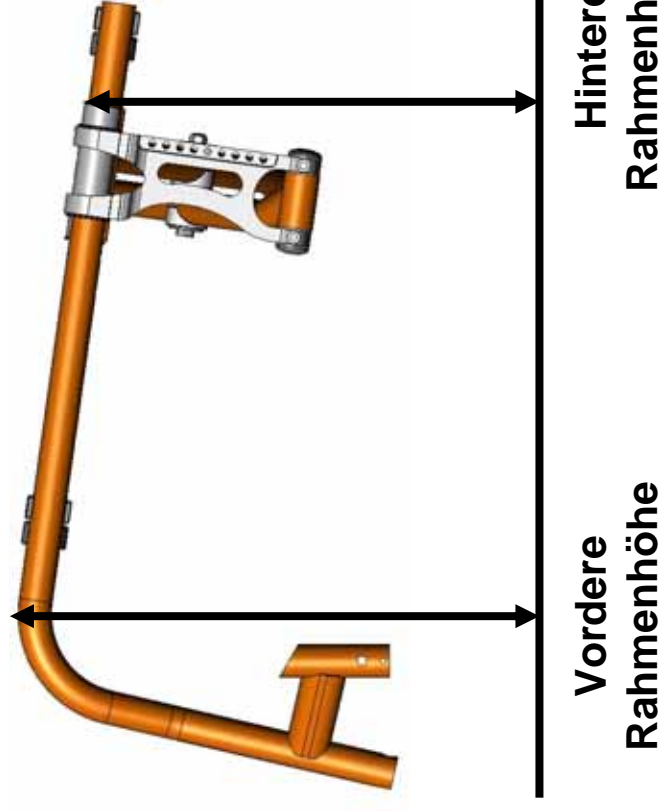

## ■ Vordere Sitzhöhen

Einstellung über die Lochplatte vorne:

- Über 2 Schrauben auf der Innenseite erfolgt die Verstellung
- Über eine Skala kann man die Höhen, rechts und links kontrollieren
- Im Bestellblatt kann die gewünschten vorderen Sitzhöhen angegeben werden

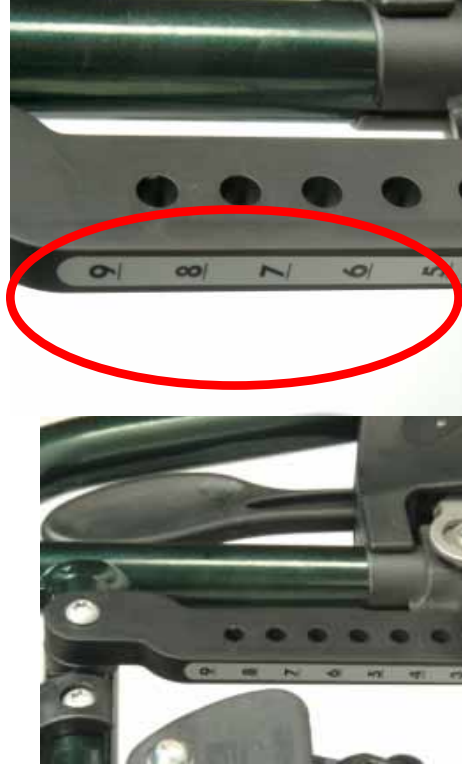


Skala



## ■ **Hintere Sitzhöhe**

**Einstellung über die Lochplatte hinten:**

- Über 2 Schrauben auf der Innenseite erfolgt die Verstellung
- Über eine Skala kann man die Höhen rechts und links kontrollieren
- Im Bestellblatt können die gewünschten hinteren Sitzhöhen angegeben werden
- Sitzhöhe 40cm mit 6“ Lenkrad und 24“ Antriebsrad möglich!

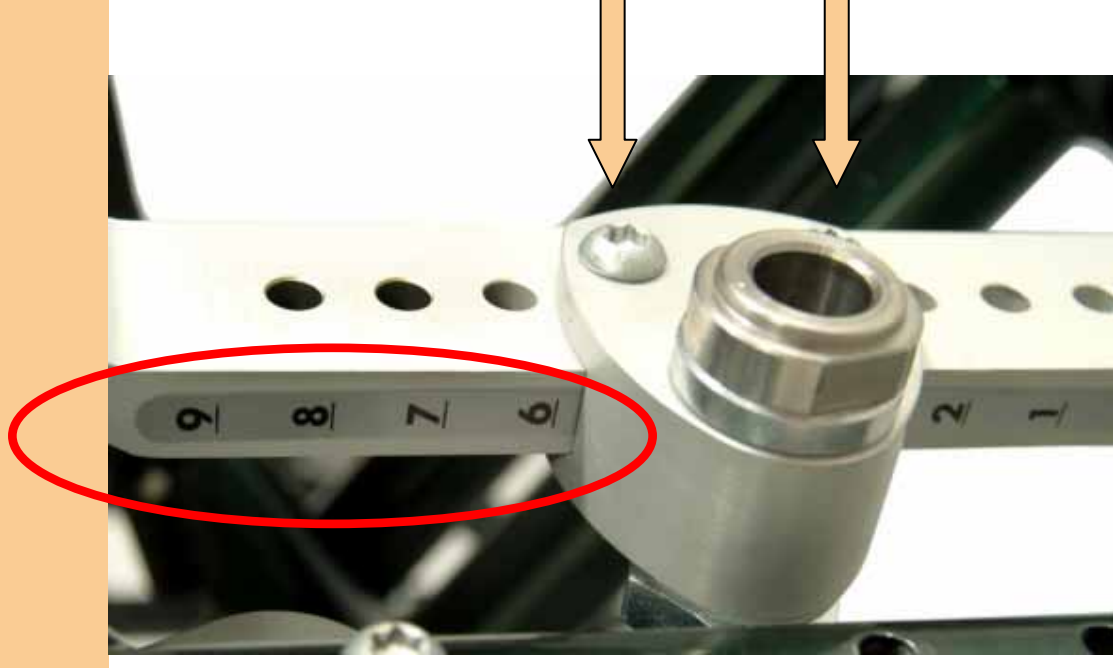

- **Lenkradverstellung  
(Vorlauf – Nachlauf)**
- **90° Einstellung garantiert korrekte  
Fahreigenschaften des Rollstuhles**
- **Nach Verstellung der Sitzhöhen  
muss der Adapter wieder in die  
90 ° Stellung gebracht werden**
- **Die Verstellung wird über Exzenter-  
Muttern vorgenommen**

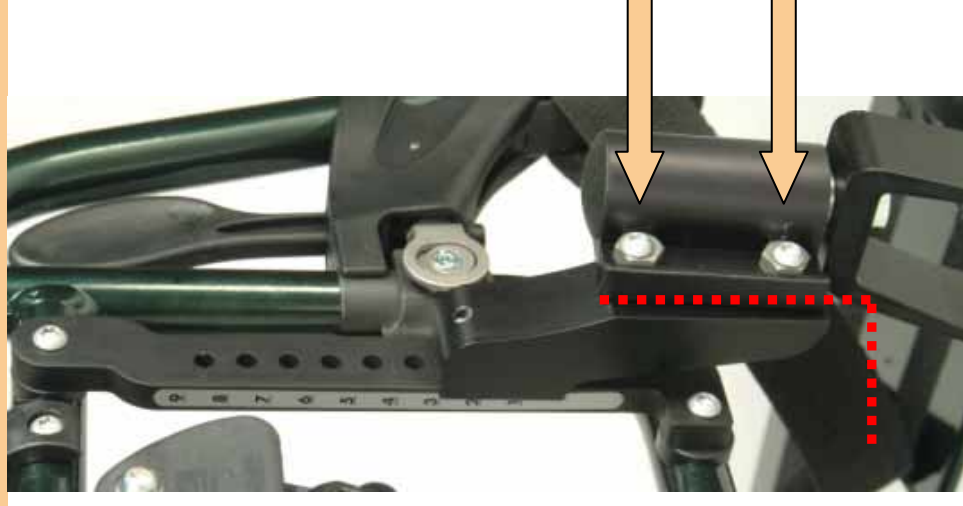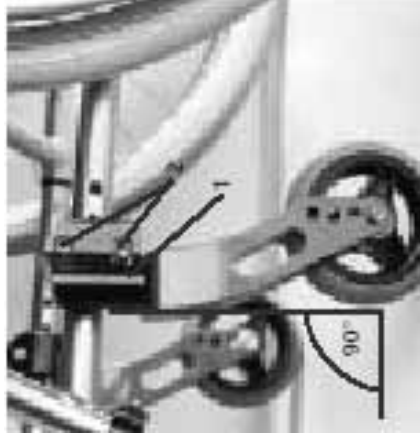



## ■ Rückenwinkeleinstellung

- Rückenwinkeleinstellung von – 5° bis +15° in 5° Schritten
- Benutzer kann im Stuhl sitzen bleiben
- Skalierung zur leichten und schnellen Verstellung
- Rückenwinkeleinstellung im Grundpreis



## ■ Rückenwinkelverstellung

- Flexible Rückenwinkelverstellung von  
– 3° bis + 27° (stufenlos)
- Die Verstellung funktioniert über  
Gasdruckfedern (wie z.B. beim Easy 300)

## ■ Rückenhöhen

- 2 Rückenhöhen
  - 30 – 40 cm (stufenlos)
  - 40 – 50 cm (stufenlos)
- Skalierung zur leichten und schnellen Verstellung



- **Rahmen mit abnehmbarer und abschwenkbarer Fussraste**




**Nach innen geschwenkt**




**Nach aussen geschwenkt**

## ■ **Fussrastenhalter**

- **Neues Design**
- **Bessere Funktionalität, nach innen und aussen schwenkbar**
- **Grössere Stabilität, spielfreie und einstellbare Verriegelung**

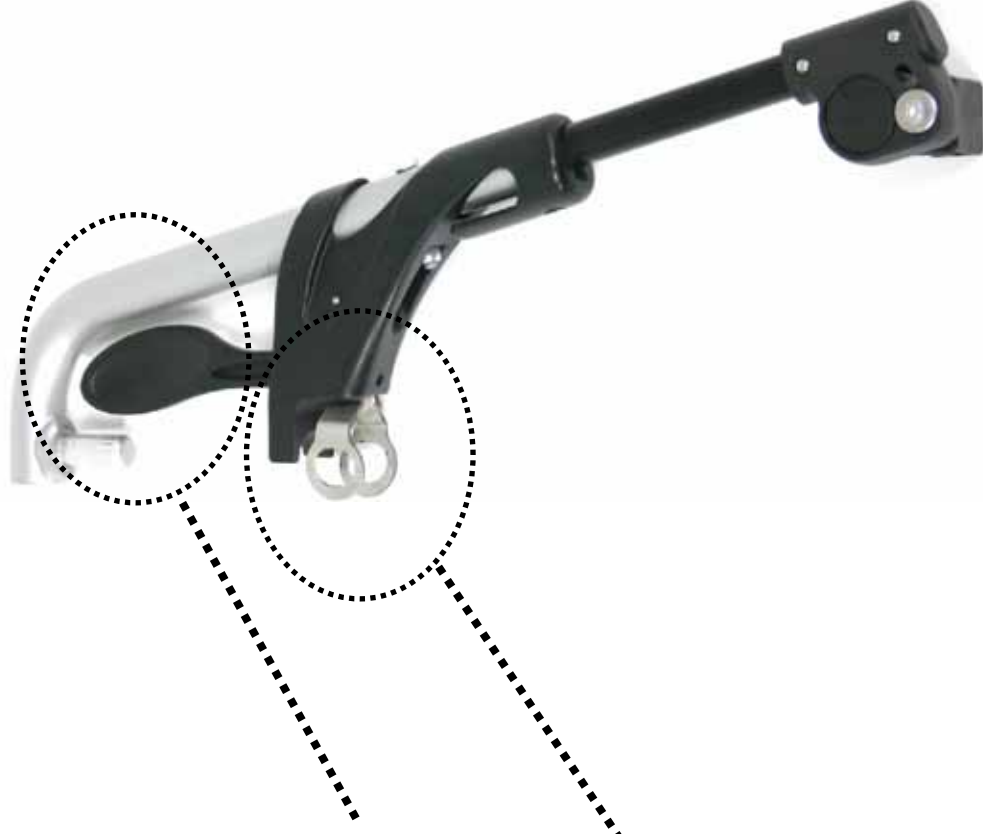

## ■ Fussrasten Varianten

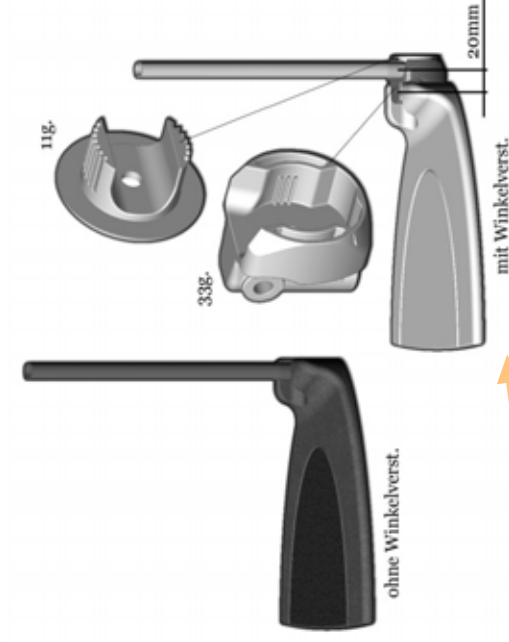


- Fussraste geteilt Kunststoff  
(mit Winkeleinstellung +/- 15°)  
im Grundpreis


# SOPUR

## ■ Fussrasten Varianten

- Fussraste geteilt und durchgehend  
Alu in Rollstuhlfarbe
- Mit Winkeleinstellung +/- 15°
- Mit Tiefeneinstellung +/- 1cm

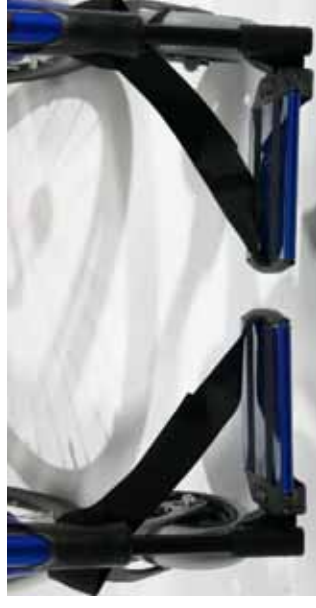

- **Fussraste ALU mit Winkeleinstellung und Tiefeneinstellung**

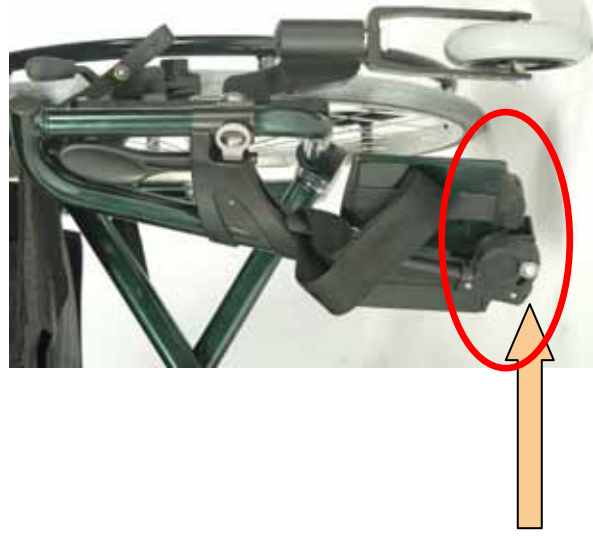

**Winkeleinstellung +/- 15°**



**Tiefeneinstellung +/- 1cm**



## ■ Seitenteile ALU mit Kälteschutz

### Seitenteile ALU

- In Rollstuhlfarbe mit und ohne Kleiderschutz
- Ohne Armauflage
- Mit Armauflage höheneinstellbar



**Seitenteile Alu mit  
Armpolster**

## ■ Desk-Seitenteile

- Neues Design
- In 5 Varianten erhältlich
- Geringes Gewicht
- 3 Punkte Fixierung
- Kälteschutz
- Einfache Höhenverstellung
- Desk Seitenteil mit Armauflage höhenverstellbar im Grundpreis



## ■ Desk-Seitenteile



Ohne Polster



Polster kurz fest



Polster kurz höhenverstellbar



Polster lang höhenverstellbar

# SOPUR

## ■ Desk-Seitenteile

- Armlagerungsschale  
(nur in Verbindung mit Desk-Seitenteilen höhenverstellbar)



## ■ **Verschiedene REHAB Optionen**

- **Fussraste hochschwenkbar**
- **Fussraste hochschwenkbar mit Längenausgleich**
- **Trommelbremsen**
- **Kopfstütze**
- **Stabilisierungsstange**
- **Armlagerungsschale**
- **Einhandantrieb**

## ■ Zusatzantriebe

- **Power 105 Assist**
  - **Spezielle Lochplatte nötig**
  - **Zuladung 120kg (inkl. Antrieb und Batterien)**
  - **SB 38 – 50 cm**
- **F16**
  - **Befestigung wie bei Easy Familie**
  - **Zuladung 120 kg (inkl. Antrieb und Batterien)**
  - **Nur mit 7“ Luftbereifung**
  - **SB 38 – 46 cm**
- **Treppensteiger tauglich (wie Easy Familie)**

- **Bremsen**

- **Standard Bremse**



- **Kniehebelbremse**



## ■ Bremsen

- Bremse mit Rücklauf Sperre
- Einhandbremse
- Trommelbremse



Bremse mit Rückroll Sperre



## ▪ Rückenbespannung

- Anpassbare Rückenbespannung  
im Grundpreis inbegriffen



- **Schiebegriffe**


- **Standard**



- **Höhenverstellbar**



- **Kopfstützen**
- **Kopfstütze mit Stabilisierungsstange abschwenkbar**

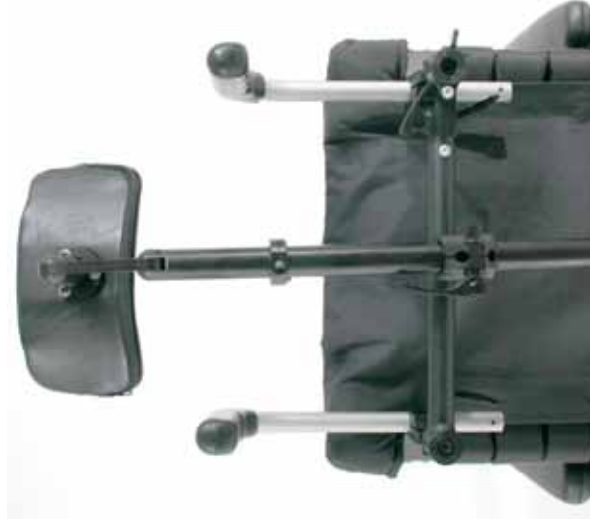

- **Ausstattung Standardausführung**
  - **Fussraste winkelverstellbar**
  - **Rückenwinkeleinstellung  $-5^{\circ}$  bis  $+15^{\circ}$  (in  $5^{\circ}$  Schritten)**
  - **Anpassrücken mit Velcro**
  - **Desk Seitenteil abnehmbar, Armauflage höhenverstellbar**
  - **Sitztiefenverstellung über die Bespannung**
  - **Ankippbügel**

## Warum Easy 160i !

### Vorteile für den Benutzer

- Easy 160i passt sich immer wieder neu den wechselnden Bedürfnissen seiner Benutzer an
- Hohe Flexibilität durch vielfältige Einstellmöglichkeiten
- 7 Rahmenfarben möglich
- Langlebiger, robuster Leichtgewichtsrahmen mit exzellenten Fahreigenschaften
- Geringes Gewicht und attraktives Design

## Key Positioning Statements – It’s Unique!

### Der optimale Stuhl für Therapeuten

- **Zahlreiche Einstellmöglichkeiten und eine durchdachte Ausstattung garantieren ein Höchstmass an Flexibilität.**
- **Sichere und schnelle Anpassung mit nur zwei Werkzeugen. Einfache und schnelle Anpassung dank selbsterklärender Skalierung. Sitzhöhereinstellung bis 37cm!**
- **Optimaler Sitzkomfort durch stufenlos verstellbare Sitztiefen und Rückenhöhen. Rückenwinkeleinstellung im Grundpreis.**
- **Viele verschiedene Einstellmöglichkeiten und Optionen sind speziell auf die Aufgaben und Anforderungen der täglichen Arbeit der Therapeuten entwickelt.**

## Key Positioning Statements – It's Unique!

### Vorteile für den Händler

- Effektiver und wirtschaftlicher Einsatz von Standard bis Reha
- Langlebiger, robuster Leichtgewichtsrahmen mit exzellenten Fahreigenschaften
- Hohe Flexibilität durch vielfältige Einstellmöglichkeiten
- Sitzbreite 38-54cm / Sitztiefe 36-54cm / Zuladung bis 140kg
- Gleichteile Sopur
- Hochwertige Grundausstattung vereinfacht die Antragsstellung an den Kostenträger