

Ersatzteilkatalog Schweiz

BasiX/BasiX², RubiX/RubiX²

Inhaltsverzeichnis

BasiX/BasiX ² , RubiX/RubiX ²	6
<u>Antriebsrad</u>	<u>7</u>
BasiX - Achsadapterplatte	8
BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Antriebsrad 22-24 Zoll	9
BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Speichenschutz	11
BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Achsadapterplatte	12
RubiX / RubiX 2 - Einhandantrieb	13
<u>Bremse</u>	<u>14</u>
BasiX - Trommelbremse	15
BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Betätigung für Trommelbremse	16
BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Kniehebelbremse für 12 Zoll-Rad	17
BasiX / RubiX - Kniehebelbremse	18
BasiX 2 / RubiX 2 - Kniehebelbremse	19
BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Trommelbremse	20
RubiX / RubiX 2 - Einhandbremse	21
<u>Comfort - Bauteile</u>	<u>22</u>
RubiX / RubiX 2 - Comfort Form-Sitzpolster	23
RubiX / RubiX 2 - Comfort Pelotten	24
RubiX / RubiX 2 - Comfort Rückenschale	25
<u>Fußraste</u>	<u>27</u>
BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Fußraste, hochschwenkbar (ELR)	28
BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Fußraste, Kunststoff	30
BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Stumpfauflage	32
BasiX / RubiX - Fußraste, hochschwenkbar (ELR)	33

Inhaltsverzeichnis

BasiX / RubiX - Fußrastenhalter	34
BasiX 2 / RubiX 2 - Fußrastenhalter	36
BasiX 2 /RubiX 2 - Fußraste mit Fußbrett kpl., hochschwenkbar (ELR)	37
RubiX XL / RubiX 2 XL - Fußbrett durchgehend, winkeleinstellbar, Metall	39
Lenkrad	40
BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Lenkrad	41
BasiX / RubiX - Lenkradgabel	42
BasiX / RubiX Lenkrad Hemiplegie Kit	43
BasiX 2 / RubiX 2 - Lenkrad Hemiplegie Kit	44
BasiX 2 / RubiX 2 - Lenkradgabel	45
Rahmen	46
BasiX - Seitenrahmen-Anbauteile	47
BasiX 2 / RubiX 2 - Seitenrahmen-Anbauteile	48
BasiX 2, RubiX / RubiX 2- Rahmen	50
RubiX - Seitenrahmen-Anbauteile	51
Rücken	52
BasiX - Rückenrohr, 1/2 faltbar	53
BasiX - Rückenrohr, Standard, höhenverstellbar	54
BasiX - Rückenrohr, winkelverstellbar mit Gasdruckfeder	55
BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Kopfstütze	56
BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenbespannung (7 Rückengurte)	58
BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenbespannung, anpassbar (4 Rückengurte)	60
BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenbespannung, Standard (3 Rückengurte)	62

Inhaltsverzeichnis

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Stabilisierungsstange für Recliner	64
BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Stabilisierungsstange, faltbar	65
BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX2 - Stabilisierungsstange	67
BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenrohr, 1/2 faltbar	68
BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenrohr, Standard	69
BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenrohr, Standard, höhenverstellbar	70
BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenrohr, winkel- und höhenverstellbar	71
BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenrohr, winkelverstellbar mit Gasdruckfeder	72
RubiX / RubiX 2 - Anatomischer Rücken, Halterung	73
RubiX / RubiX 2 - Anatomischer Rücken, Standard	74
Seitenteil	75
BasiX / BasiX 2 - Seitenteil mit Armauflage, Standard	76
BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Seitenteil mit Armauflage, höhenverstellbar	78
BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Seitenteil, Armauflage verstellbar, Zentralstütze	79
RubiX / RubiX 2 - Armauflage, HP-Version	80
RubiX / RubiX 2 - Seitenteil, Armauflage verstellbar, Standard	81
Sitz / Kreuzstrebe	82
BasiX - 3-Arm-Kreuzstrebe mit Sitzbespannung	83
BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Sitzbespannung und -kissen	84
BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Sitzbespannung, dick gepolstert	86
BasiX 2, RubiX/RubiX 2 - 3-Arm-Kreuzstrebe mit Sitzbespannung	87
RubiX / RubiX 2 - 4-Arm-Kreuzstrebe (XL) mit Sitzbespannung	88
RubiX / RubiX 2 - Anatomischer Sitz	89
Zubehör	90

Inhaltsverzeichnis

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Haltegurt	91
BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Sicherheitsrad und Werkzeugsatz	92
BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Stockhalter	93
BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Therapietisch, abschwenkbar	94
BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Therapietisch, aufschiebbar	95
BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - 3 Zoll-Transitrolle	96
BasiX 3 Zoll-Transitrolle	97
Gipsbeinstütze	98
RubiX / RubiX 2 - Halterung für F16 Antrieb	99
RubiX / RubiX 2 - Halterung für P105 Antrieb	100

BasiX/BasiX², RubiX/RubiX²

Bezeichnung

Antriebsrad

Bremse

Comfort - Bauteile

Fußraste

Lenkrad

Rahmen

Rücken

Seitenteil

Sitz / Kreuzstrebe

Zubehör

Antriebsrad

Bezeichnung

BasiX - Achsadapterplatte


BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Antriebsrad 22-24 Zoll

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Speichenschutz

BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Achsadapterplatte


RubiX / RubiX 2 - Einhandantrieb

BasiX - Achsadapterplatte

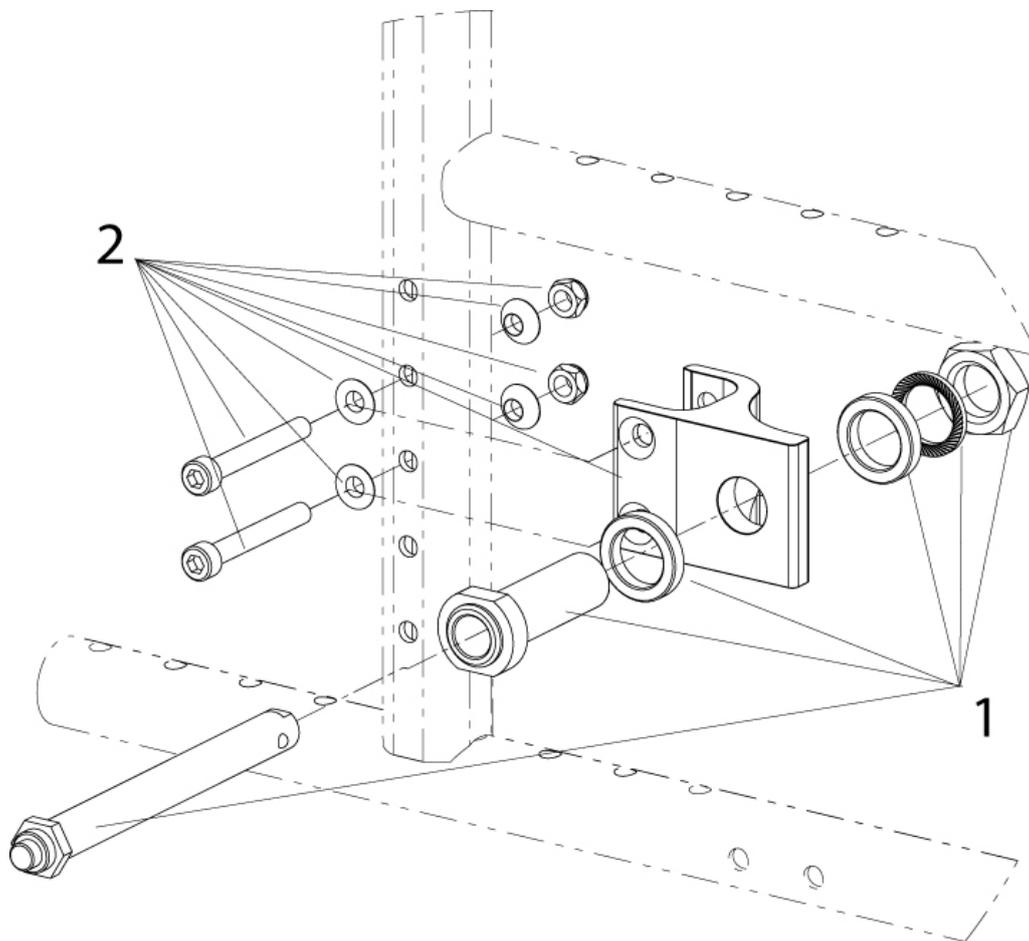

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	064987	Transportsicherung für Taxen	Paar (nur in NL erhältlich)
	064915-000	Achsaufnahme mit Achsadapter (Trommelbremse)	Paar
1	064535	Steckachse mit Achsadapter, kpl.	
5	064902-ET	Achsaufnahme mit Achsadapter (Standardrad) kpl.	

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Antriebsrad 22-24 Zoll

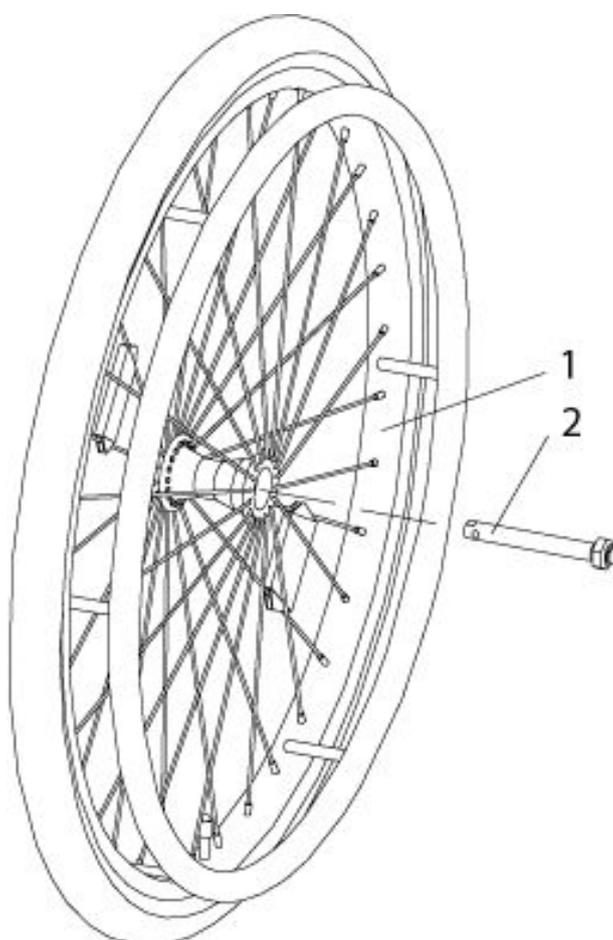


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	000857224.01	Bereifung 24 Zoll x 1 Zoll Right Run kpl. (Reifen, Schlauch, Felgenband)	
	000220294	Steckachse für Trommelbremse	
	000859104	Handluftpumpe mit Halter	
	064500-304	Komplett - Trommelbremse - Antriebsrad 24 Zoll mit Greifring und pannensicherer Bereifung	1 St./Pkg.
	757851150	Komplett-Trommelbrems-Antriebsrad 22 Zoll, mit Steckachse, Greifring und pannensicherer Bereifung	
	000854530	Greifreifenüberzug 22 Zoll, schwarz	
	000854532	Greifreifenüberzug 24 Zoll, schwarz	
	000283113	Luftschlauch 24 x 1 Zoll	
	000283014.01	Reifen 24x1 Zoll, Right Run	
	000283017	Reifen 24 Zoll x 1 Zoll, Soft, pannensicher, schwarz	
	000283028	Reifen 22 Zoll x 1 3/8 Zoll, pannensicher	

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Antriebsrad 22-24 Zoll


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	000283015.01	Bereifung 24 Zoll x 1 3/8 Zoll, pannensicher	
1	064500-301	Komplett - Antriebsrad 24 Zoll, Greifring und Luft-Bereifung	
1	064500-302	Komplett - Antriebsrad 22 Zoll, Greifring und pannensicherer Bereifung	1 St./Pkg.
1	064500-300	Komplett - Antriebsrad 24 x 1 Zoll, Greifring und pannensicherer Bereifung	1 St./Pkg.
2	064535	Steckachse mit Achsadapter, kpl.	

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Speichenschutz

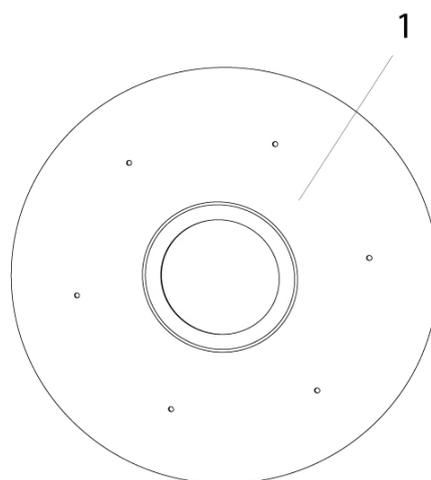


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	000118004-ET	Schnapper für Speichenschutz	25 St./Pkg.
1	062553-033	Speichenschutz 24 Zoll kpl., Transparent	inkl. Schnapper
1	062551-033	Speichenschutz 22 Zoll kpl. Transparent	inkl. Schnapper

BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Achsadapterplatte

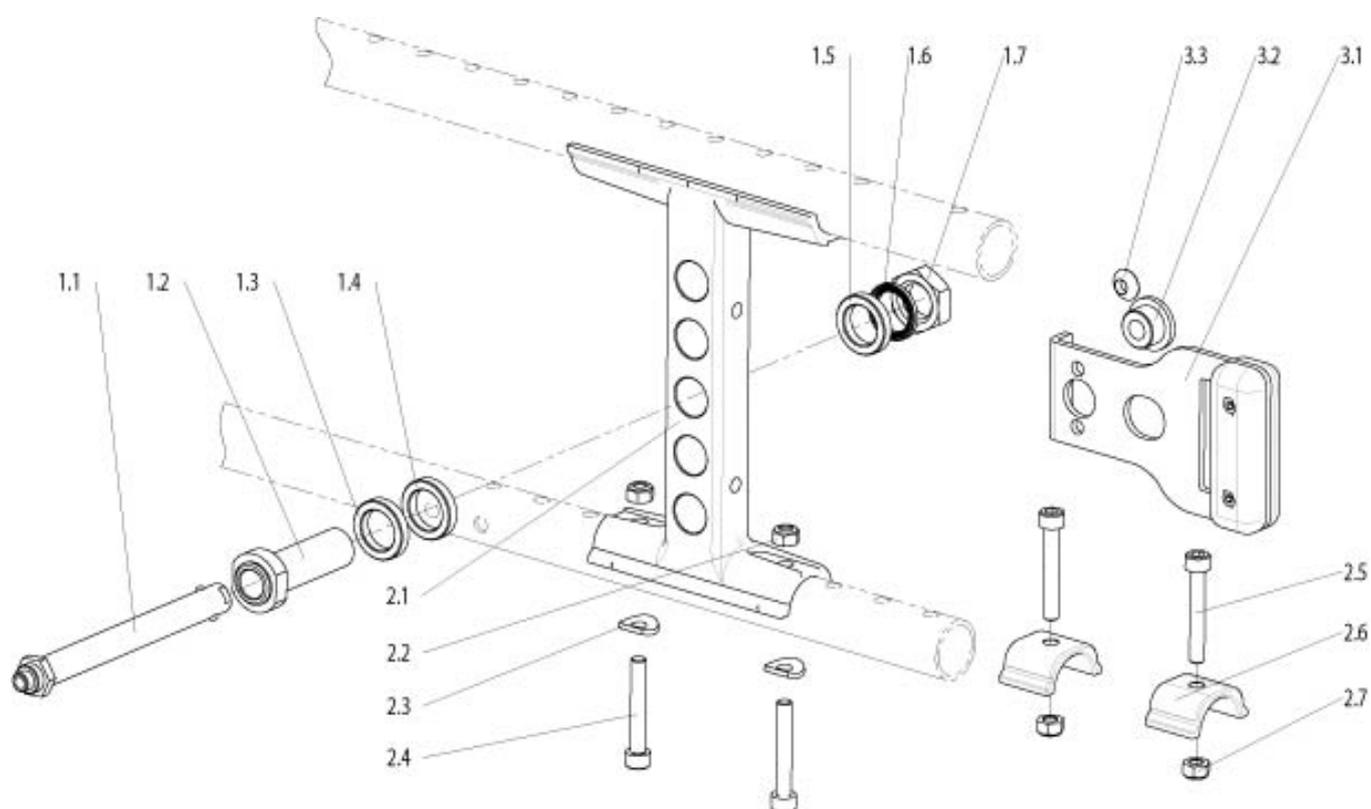

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1.1-1.7	064535	Steckachse mit Achsadapter, kpl.	
2.1-2.7	064115	Achsplatte	Paar
3.1-3.3	064987	Transportsicherung für Taxen	Paar (nur in NL erhältlich)

RubiX / RubiX 2 - Einhandantrieb

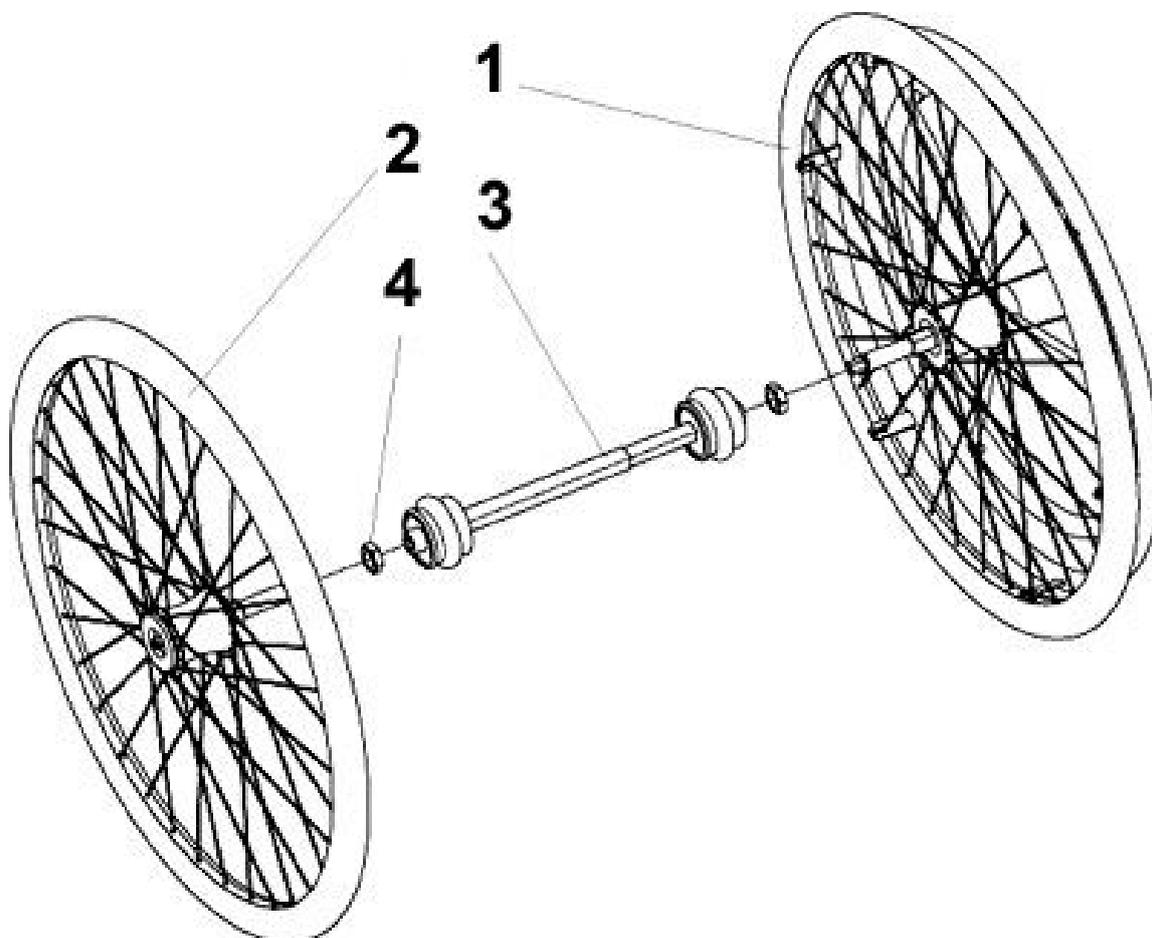

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1 - 4	757951180	Einhandantrieb kpl. für SB 360 - 380 mm	
1 - 4	757951190	Einhandantrieb kpl. für SB 410 - 430 mm	
1-2	000951135	Antriebsräder 24 Zoll, für Einhandantrieb mit Steckachse, Greifring	beide Seiten
1-4	757951200	Einhandantrieb kpl. für SB 460 - 510 mm	
3	000851128	Welle für Einhandantrieb, SB 460 - 510 mm	
3	000851126	Welle für Einhandantrieb, SB 380 mm	
3	000851127	Welle für Einhandantrieb, SB 410 - 430 mm	
4	000220256-ET	Mutter M16 x 1	10 St./Pkg.

Bremse

Bezeichnung

BasiX - Trommelbremse

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Betätigung für Trommelbremse

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Kniehebelbremse für 12 Zoll-Rad


BasiX / RubiX - Kniehebelbremse

BasiX 2 / RubiX 2 - Kniehebelbremse

BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Trommelbremse


RubiX / RubiX 2 - Einhandbremse

BasiX - Trommelbremse

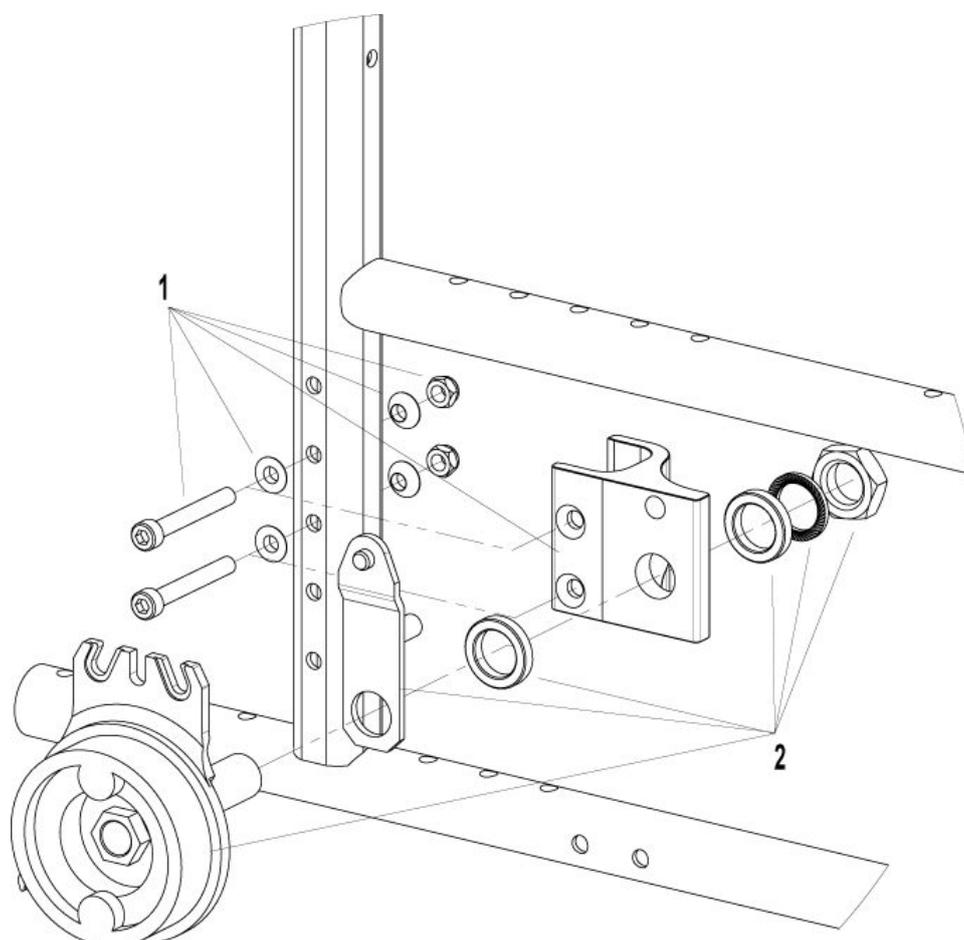


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	000220294	Steckachse für Trommelbremse	
1	064915-000	Achsaufnahme mit Achsadapter (Trommelbremse)	Paar
1 - 2	064534-ET	Radadapter für Trommelbremse (ohne Rad)	Paar

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Betätigung für Trommelbremse

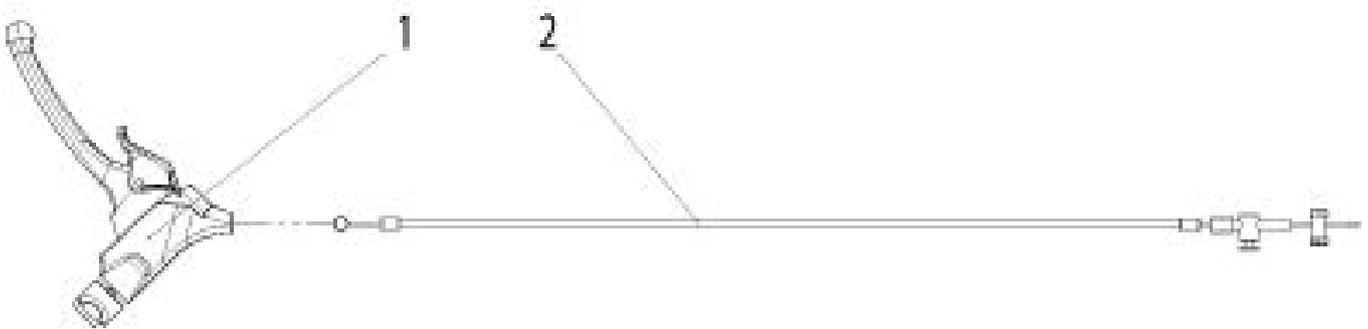


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	064620-004	Auslösehebel für Trommelbremse	1 St./Pkg
2	064620-003	Kabeleinheit für Trommelbremse	

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Kniehebelbremse für 12 Zoll-Rad

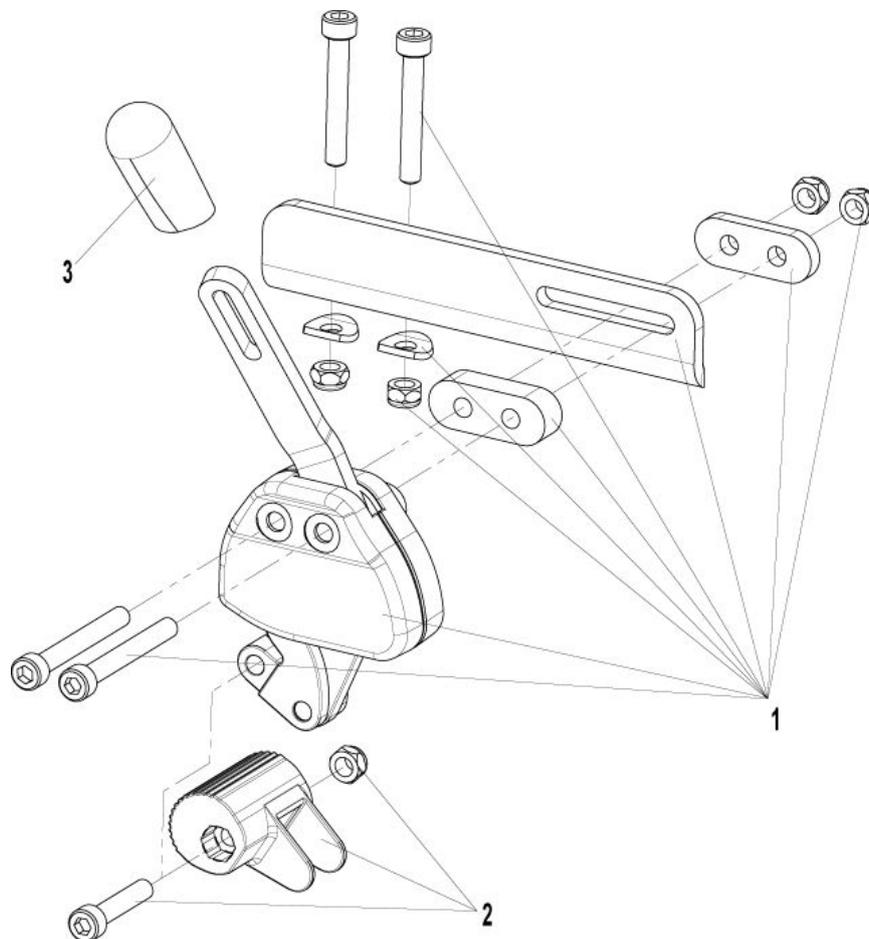


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	000861253	Bremshebelverlängerung, Kunststoff, abklappbar	2 St./Pkg.
2	000861252	Bremsbolzen für Kniehebelbremse kpl.	
3	000861156-ET	Bremshebelabdeckkappe	5 St./Pkg.

BasiX / RubiX - Kniehebelbremse

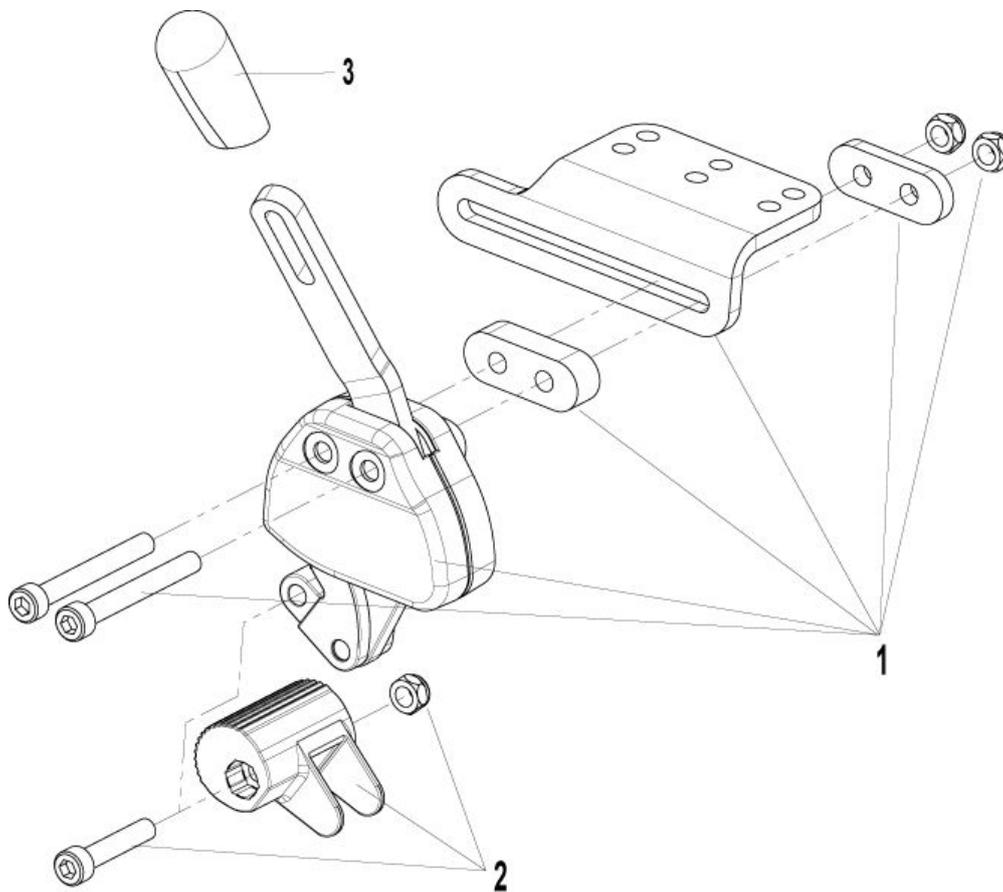


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	064601-101	Kniehebelbremse kpl.	links
	064601-100	Kniehebelbremse kpl.	Paar
	000861253	Bremshebelverlängerung, Kunststoff, abklappbar	2 St./Pkg.
1 - 3	064601-102	Kniehebelbremse kpl.	rechts
2	000861252	Bremsbolzen für Kniehebelbremse kpl.	
3	000861156-ET	Bremshebelabdeckkappe	5 St./Pkg.

BasiX 2 / RubiX 2 - Kniehebelbremse

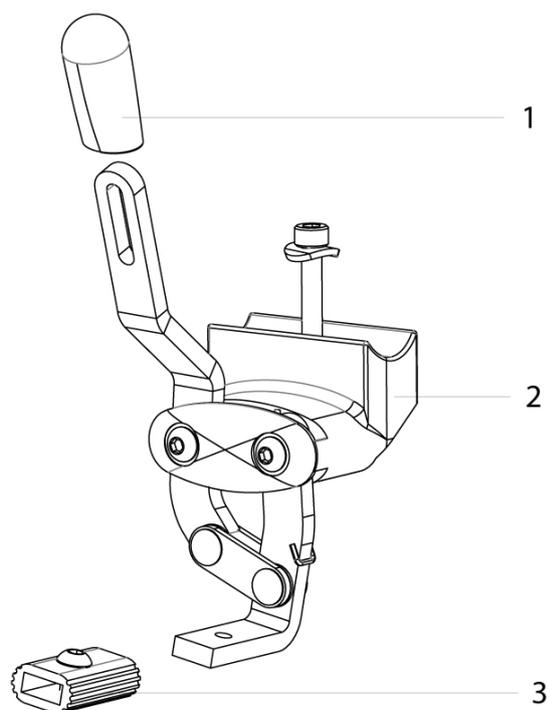


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	067920-001	Kniehebelbremse kpl.	links
	000861253	Bremshebelverlängerung, Kunststoff, abklappbar	2 St./Pkg.
	067920-002	Kniehebelbremse kpl.	rechts
1	000861156-ET	Bremshebelabdeckkappe	5 St./Pkg.
1 - 3	067920-000	Kniehebelbremse BasiX 2 / RubiX 2, UniX 2, PariX 2 kpl.	Paar
3	067923	Bremsschuh für Kniehebelbremse kpl.	10 St./Pkg.

BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Trommelbremse

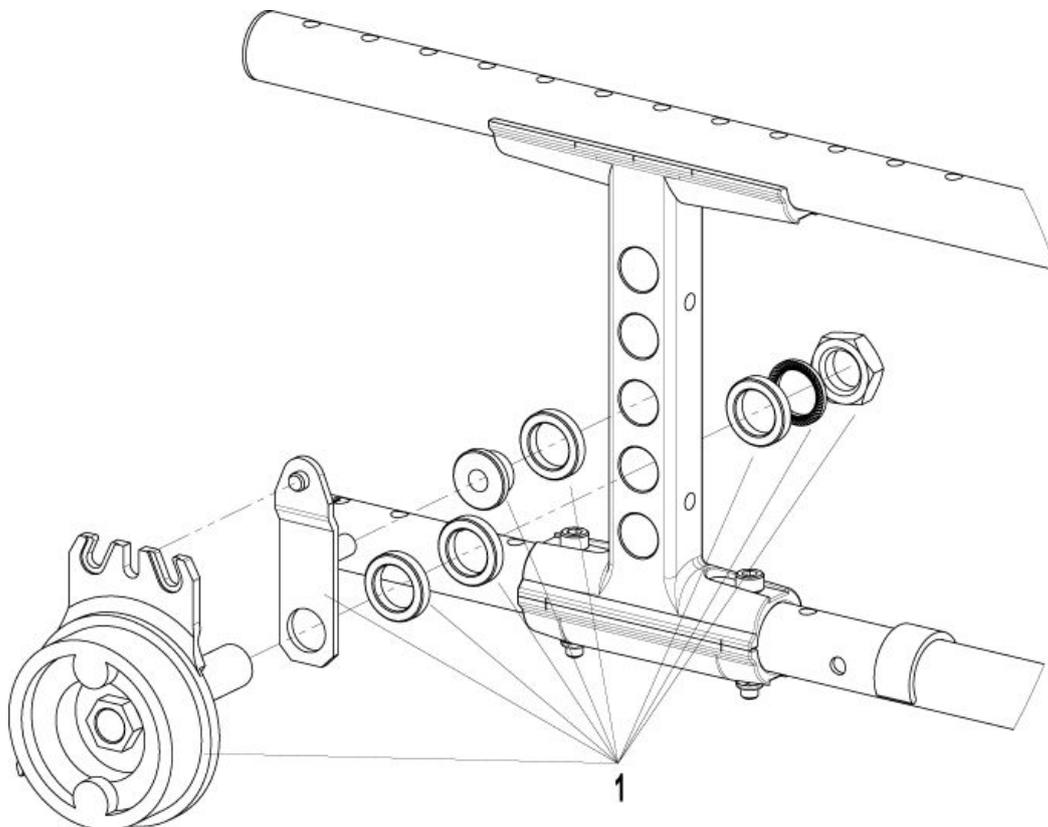

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	000220294	Steckachse für Trommelbremse	
1	064933	Radadapter für Trommelbremse (ohne Rad)	Paar (ohne # C2.6107-ET, diese muß zusätzlich bestellt werden, auch bei Umrüstung von STD auf Trommelbremse)
2	C2.6107-ET	Anschlagbuchse	10 St./Pkg.

RubiX / RubiX 2 - Einhandbremse

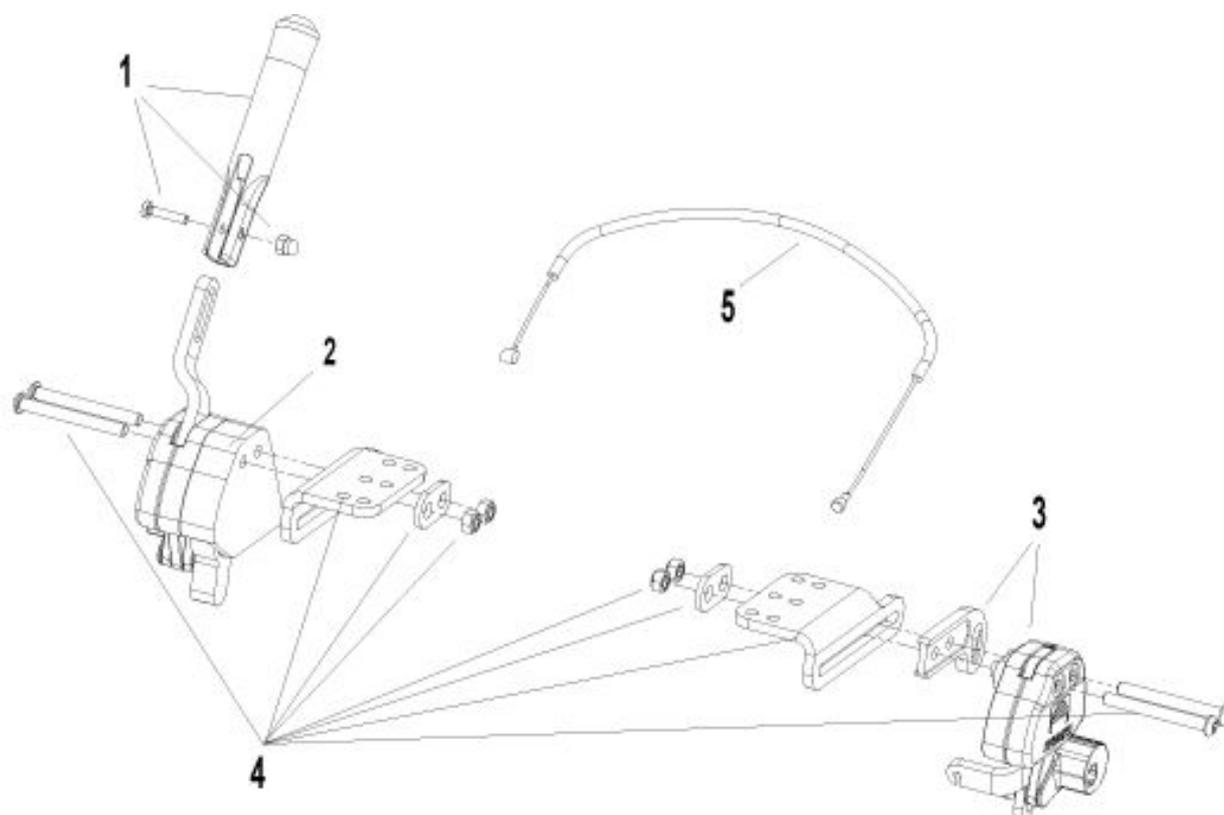

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	064980	Einhandbremse mit Betätigung kpl. SB: 380 mm	links
	064981	Einhandbremse mit Betätigung kpl. SB: 410 - 600 mm	links
	054618-002	Bedienteil für Einhandbremse kpl.	links
	054618-004	Einhandbremse Mitläuferseite	rechts
1 - 2	054618-001	Bedienteil für Einhandbremse kpl.	rechts
1 - 5	064982	Einhandbremse mit Betätigung kpl. SB: 380 mm	rechts
1 - 5	064983	Einhandbremse mit Betätigung kpl. SB: 410 - 600 mm	rechts
3	054618-003	Einhandbremse Mitläuferseite	links
4	064986	Befestigung für Einhandbremse kpl.	Paar
5	000862223.03	Kabelzug für Einhandbremse lang, kpl. SB: 410 - 600 mm	
5	000862223.02	Kabelzug für Einhandbremse mittel, kpl. SB: 380 mm	

Comfort - Bauteile


Bezeichnung

RubiX / RubiX 2 - Comfort Form-Sitzpolster

RubiX / RubiX 2 - Comfort Pelotten


RubiX / RubiX 2 - Comfort Rückenschale

RubiX / RubiX 2 - Comfort Form-Sitzpolster

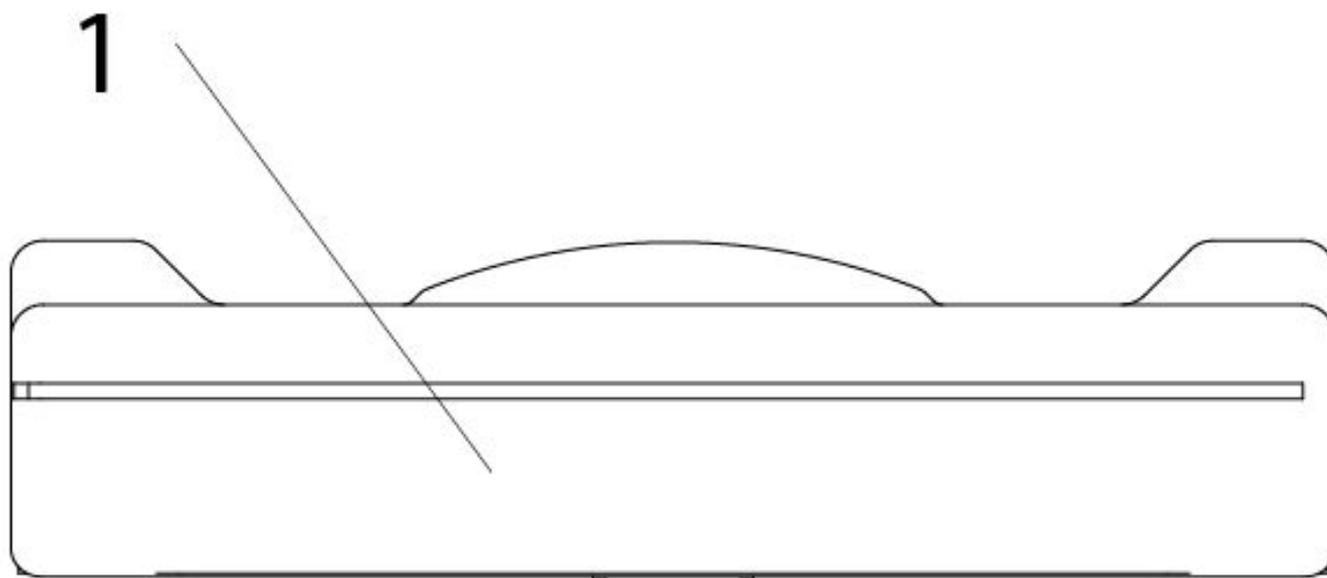


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	C2.8072	Comfort - Form-Sitzkissen SB: 510 x 460 mm kpl.	für ST: 410 - 460 mm
1	C2.8071	Komfort Sitzkissen SB 460 x 460 mm	für ST: 410 - 460 mm
1	C2.8070	Komfort Sitzkissen SB 410 x 460 mm	für ST: 410 - 460 mm

RubiX / RubiX 2 - Comfort Pelotten

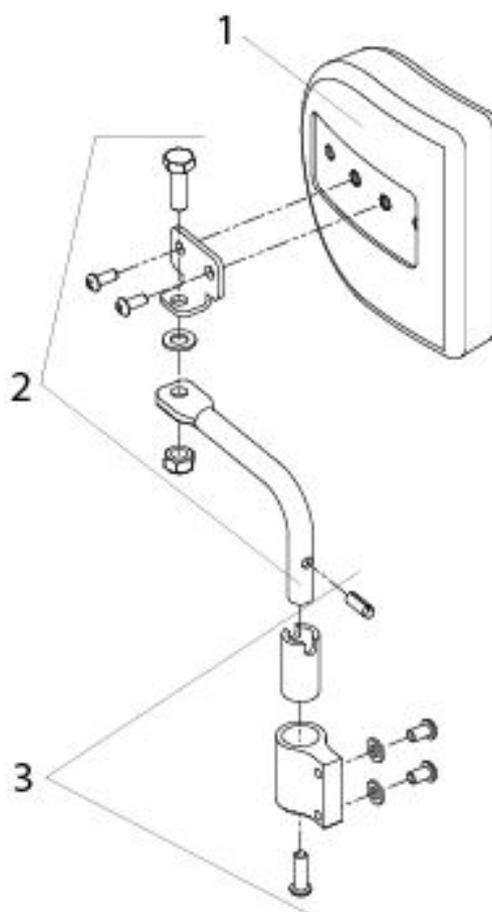

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1-3	757941655	Pelotten mit Halter oben und unten kpl.	Paar

RubiX / RubiX 2 - Comfort Rückenschale

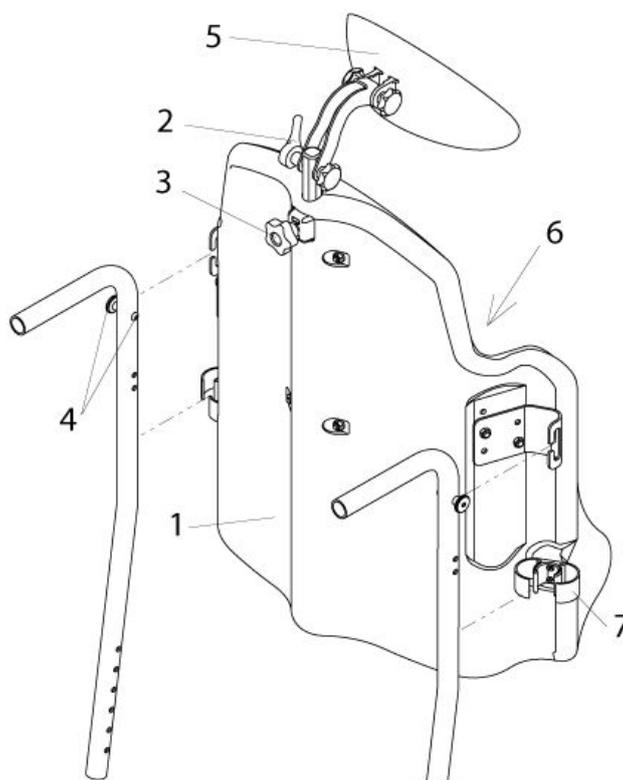

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	C2.8017	Rückenschale SB 410 mm	
1	C2.8018	Rückenschale SB 460 mm	
1	C2.8019	Rückenschale SB 510 mm	
1,3,6	757841667-ET	Rückenschale kpl. SB 510 mm	
1,3,6	757841666-ET	Rückenschale kpl. SB 460 mm	
1,3,6	757841665-ET	Rückenschale kpl. SB 410 mm	
2	000233012-ET	Klemmhebel	
2, 5	C2.8036	Komfort Kopfstütze	
3	C2.8053-ET	Sterngriff-Schraube M 8 x 16	
4	757841659	Rückenbefestigung (Rändelmutter M 5 & Linsenschraube M 5 x 35 ISO 7380)	2 St./Pkg.
6	757841657	Rücken-Formkissen für Rückenschale SB 460 mm	
6	757841658	Rücken-Formkissen für Rückenschale SB 510 mm	
6	757841656	Rücken-Formkissen für Rückenschale SB 410 mm	

RubiX / RubiX 2 - Comfort Rückenschale

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
7	300833004	Klemme kpl.	6 St./Pkg.

Fußraste

Bezeichnung

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Fußraste, hochschwenkbar (ELR)

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Fußraste, Kunststoff

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Stumpfauflage

BasiX / RubiX - Fußraste, hochschwenkbar (ELR)


BasiX / RubiX - Fußrastenhalter

BasiX 2 / RubiX 2 - Fußrastenhalter

BasiX 2 /RubiX 2 - Fußraste mit Fußbrett kpl., hochschwenkbar (ELR)

RubiX XL / RubiX 2 XL - Fußbrett durchgehend, winkeleinstellbar, Metall

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Fußraste, hochschwenkbar (ELR)

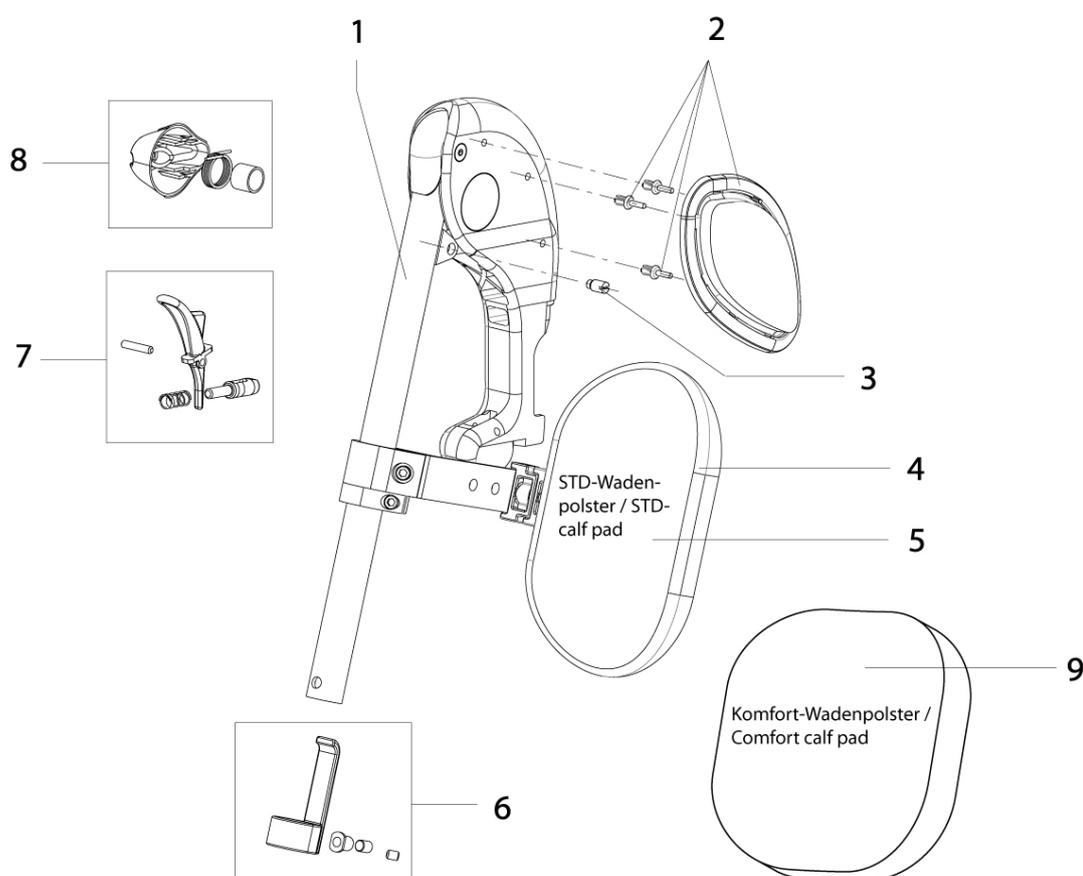


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	064840-001	ELR-Fußraste mit Std-Wadenpolster (ohne Fußbrett)	links
	064875-ET	Haltebolzen für ELR, Außen-D = 21 mm	2 St./Pkg., Hinweis: nur für ELR hergestellt ab KW 31/2015.
1 - 8	064840-002	ELR-Fußraste mit Std-Wadenpolster (ohne Fußbrett)	rechts
2	064766-000-ET	Kniepolster	Paar
3	064855-ET	Madenschraube	10 St./Pkg.
4 - 5	064924	Wadenauflage mit Überzug	
5	064927	Überzug für Wadenpolster	
6	069942	Klemme für Fußraste inkl. Befestigungsmaterial	Paar
7	069940	Auslösehebel	
8	069941	Auslösemechanismus	
9	069216	Komfort Wadenauflage SB 410 mm	

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Fußraste, hochschwenkbar (ELR)

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
9	069210	Komfort Wadenauflage SB 460 - 530 mm	

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Fußraste, Kunststoff

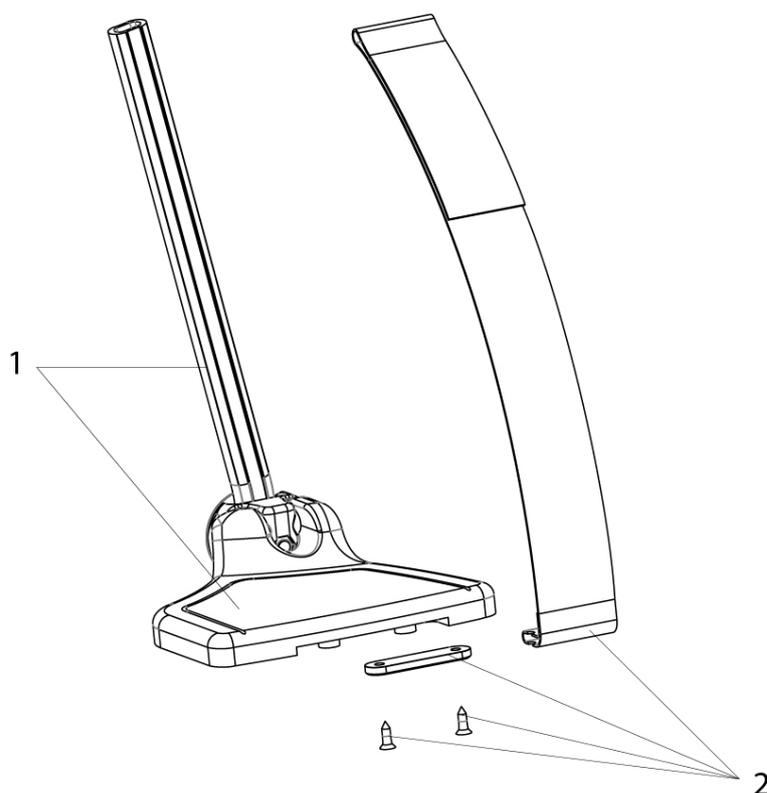


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	064871-011	Kunststoff-Fußbrett 157 mm (mit Wadenband kpl. für SB 360 - 405 mm)	links
	064871-102	Kunststoff-Fußbrett 182 mm mit Wadenband kpl. (SB 410 - 440 mm)	Paar
	064871-103	Kunststoff-Fußbrett 207 mm mit Wadenband kpl. (RelaX 2 = SB 410 mm, andere =SB 480 - 600 mm)	Paar
	064871-013	Kunststoff-Fußbrett 207 mm mit Wadenband kpl. (RelaX2 = SB 410 mm, andere =SB 480 - 600 mm)	links
	064871-012	Kunststoff-Fußbrett 182 mm (mit Wadenband kpl. für SB 410 - 440 mm)	links
	064871-101	Kunststoff-Fußbrett 157 mm (mit Wadenband kpl. für SB 360 - 405 mm)	Paar
1 - 2	064871-022	Kunststoff-Fußbrett 182 mm (mit Wadenband kpl. für SB 410 - 440 mm)	rechts
1 - 2	064871-023	Kunststoff-Fußbrett 207 mm mit Wadenband kpl. (RelaX 2 = SB 410 mm, andere =SB 480 - 600 mm)	rechts

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Fußraste, Kunststoff


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1 - 2	064871-021	Kunststoff-Fußbrett 157 mm (mit Wadenband kpl. für SB 360 - 405 mm)	rechts
2	064914	Fersenband kpl.	

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Stumpfaufgabe

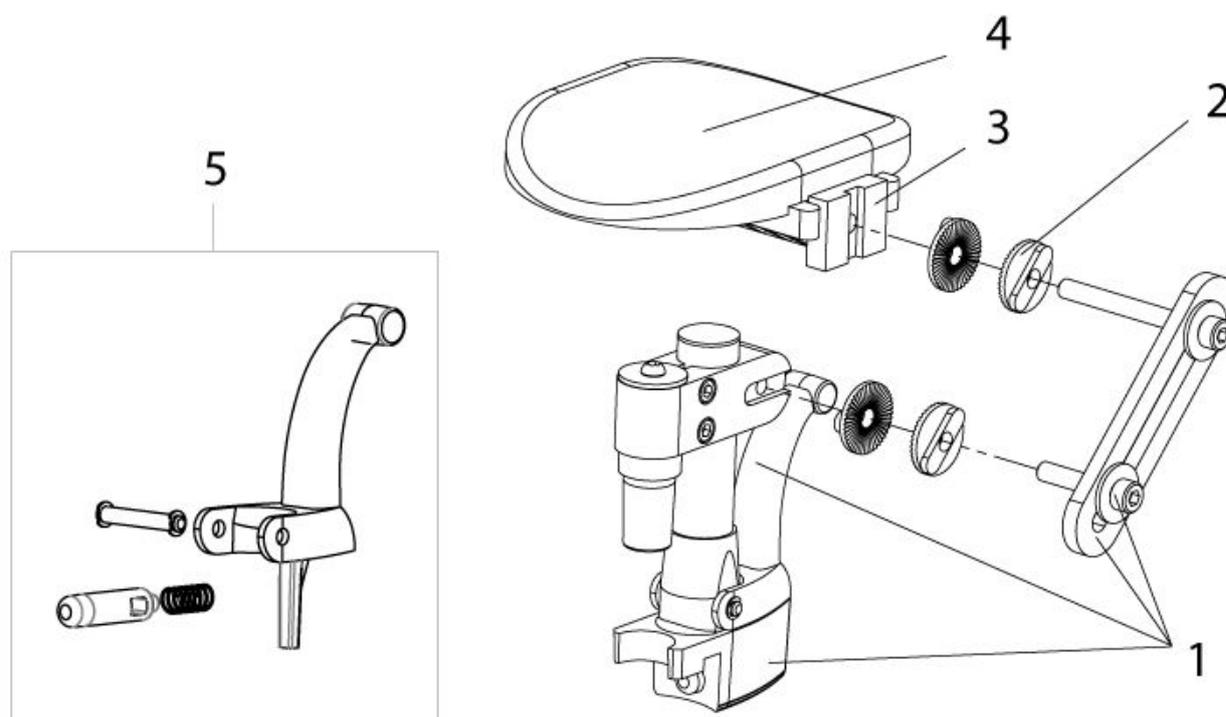


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	064280-000	Stumpfaufgabe kpl.	Paar
	064280-002	Stumpfaufgabe kpl.	links
1 - 4	064280-001	Stumpfaufgabe kpl.	rechts
2	064905	Rastscheiben	20 St./Pkg.
3 - 4	064924	Wadenaufgabe mit Überzug	
4	064927	Überzug für Wadenpolster	
5	064999-ET	Auslösehebel	10 St./Pkg.

BasiX / RubiX - Fußraste, hochschwenkbar (ELR)

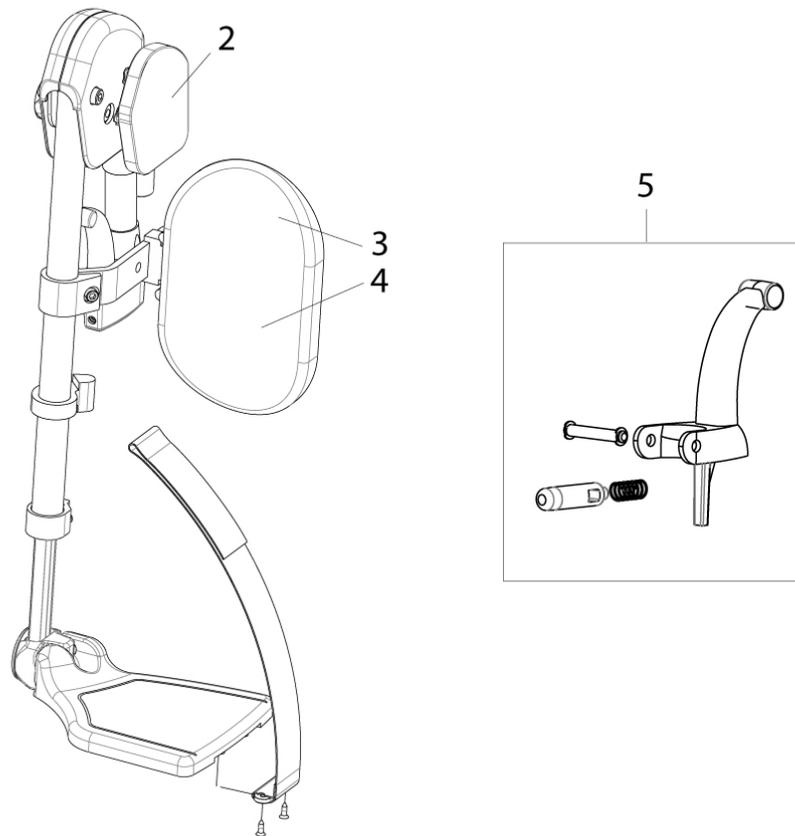

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	064250-002	Kniepolster	links
	064277-ET	Sterngriff-Schraube M8	10 St./Pkg.
2	064250-001	Kniepolster	rechts
3 - 4	064924	Wadenauflage mit Überzug	
4	064927	Überzug für Wadenpolster	
5	064999-ET	Auslösehebel	10 St./Pkg.

BasiX / RubiX - Fußrastenhalter

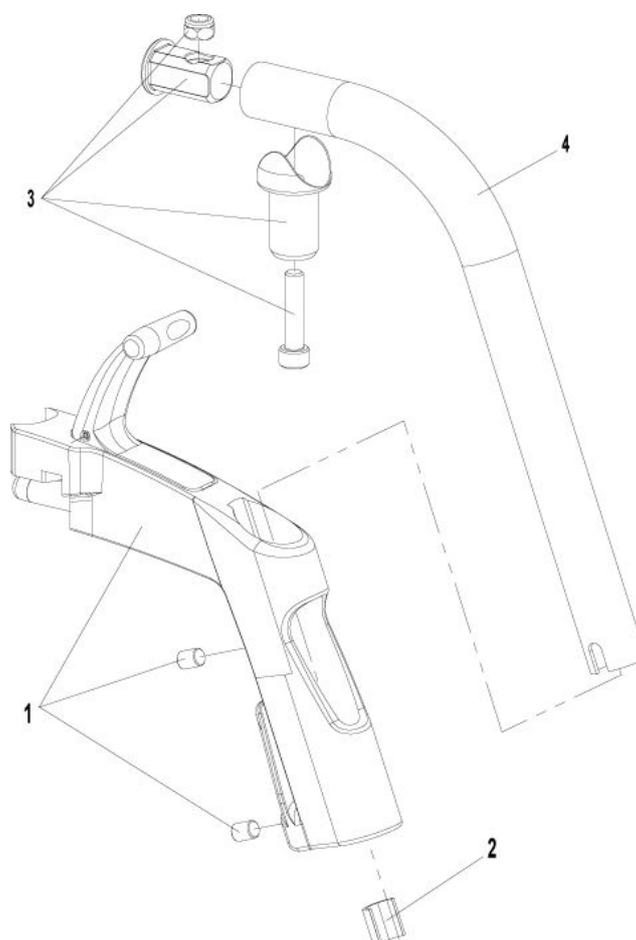


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	064910-000	Fußrastenhalter (ohne Fußbrett) kpl. - Silber Weiß	Paar
	064912-002	Fußrastenhalter (ohne Fußbrett) kpl. - brilliantrot -	in D nicht erhältlich, rechts
	064911-000	Fußrastenhalter (ohne Fußbrett) kpl. - blau	Paar
	064911-002	Fußrastenhalter (ohne Fußbrett) kpl. - blau	rechts
	064910-002	Fußrastenhalter (ohne Fußbrett) kpl. - silber-weiß	rechts
1	064937-002	Aufnahme für Fußrastenhalterrohr	Rechts
1	064937-001	Aufnahme für Fußrastenhalterrohr	Links
1 - 4	064910-001	Fußrastenhalter (ohne Fußbrett) kpl. - silber-weiß	links
1 - 4	064912-001	Fußrastenhalter (ohne Fußbrett) kpl. - brilliantrot -	in D nicht erhältlich, links
1 - 4	064911-001	Fußrastenhalter (ohne Fußbrett) kpl. - blau	links
2	064918	Klemmstück	10 St./Pkg.

BasiX / RubiX - Fußrastenhalter


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
3	064938	Drehlager für Fußrastenhalter	links/rechts verwendbar

BasiX 2 / RubiX 2 - Fußrastenhalter

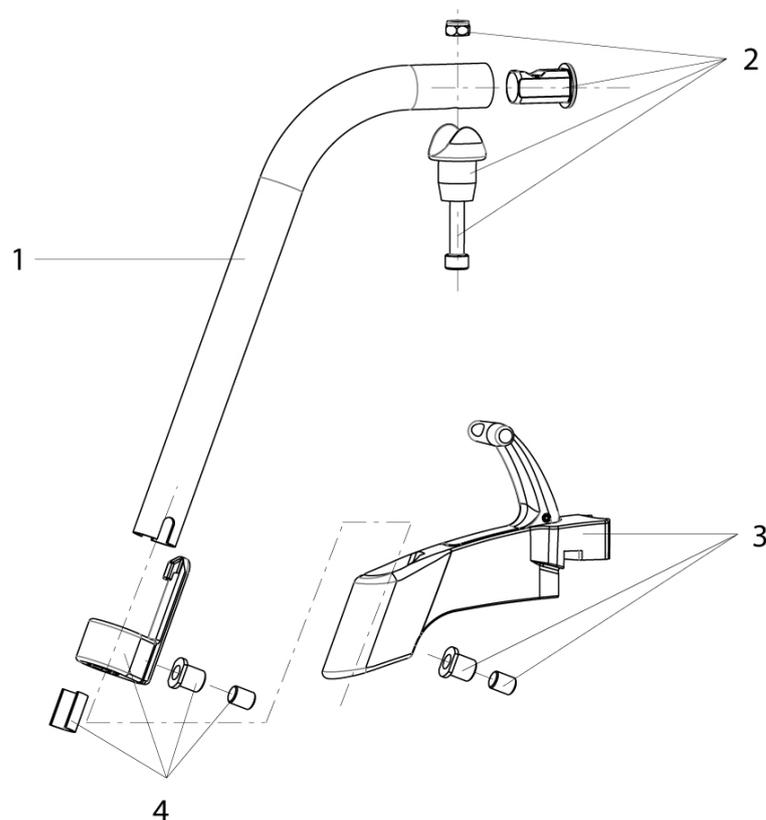

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	064804-020	Fußrastenhalter (ohne Fußbrett) kpl. - Mattblau	Paar
	064804-050	Fußrastenhalter (ohne Fußbrett) kpl. - Brilliantsilber	Paar
	064804-051	Fußrastenhalter (ohne Fußbrett) kpl. - Brilliantsilber	links
	064804-021	Fußrastenhalter (ohne Fußbrett) kpl. - Mattblau	links
1 - 4	064804-022	Fußrastenhalter (ohne Fußbrett) kpl. - Mattblau	rechts
1 - 4	064804-052	Fußrastenhalter (ohne Fußbrett) kpl. - Brilliantsilber	rechts
2	064938	Drehlager für Fußrastenhalter	links/rechts verwendbar
3	067929	Aufnahme für Fußrastenhalterrohr	Paar
4	067930	Klemmstück für Fußrastenhalterrohr	2 St./Pkg.

BasiX 2 /RubiX 2 - Fußraste mit Fußbrett kpl., hochschwenkbar (ELR)

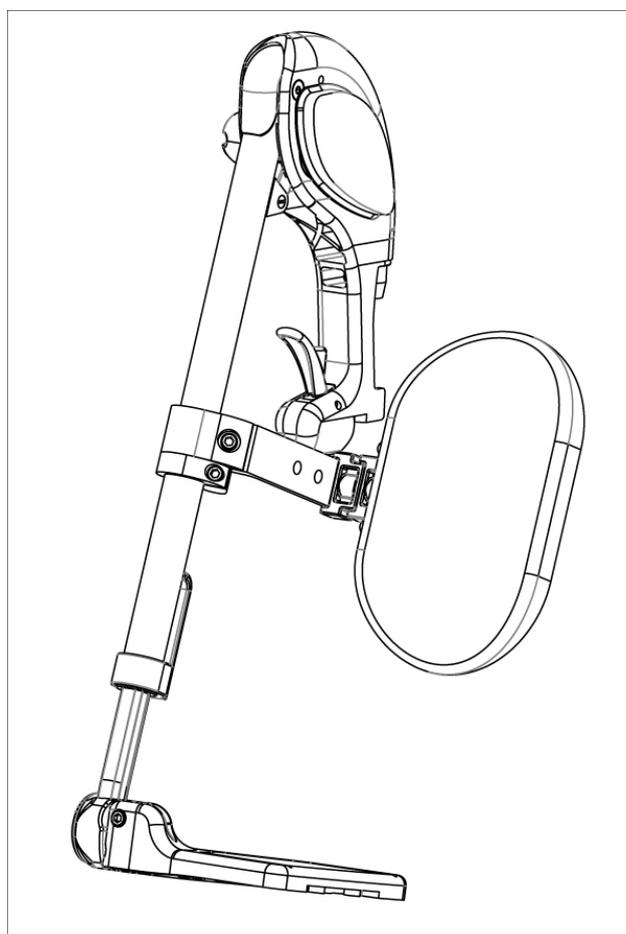


1

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	064897-011	Fußraste mit Fußbrett kpl., hochschwenkbar (ELR) - SB 380 - 405 mm -	links
	064897-102	Fußraste mit Fußbrett kpl., hochschwenkbar (ELR) - SB 435 - 455 mm -	Paar
	064897-103	Fußraste mit Fußbrett kpl., hochschwenkbar (ELR) - SB 480 - 600 mm -	Paar
	064897-013	Fußraste mit Fußbrett kpl., hochschwenkbar (ELR) - SB 480 - 600 mm -	links
	064897-012	Fußraste mit Fußbrett kpl., hochschwenkbar (ELR) - SB 435 - 455 mm -	links
	064897-101	Fußraste mit Fußbrett kpl., hochschwenkbar (ELR) - SB 380 - 405 mm -	Paar
1	064897-022	Fußraste mit Fußbrett kpl., hochschwenkbar (ELR) - SB 435 - 455 mm -	rechts
1	064897-021	Fußraste mit Fußbrett kpl., hochschwenkbar (ELR) - SB 380 - 405 mm -	rechts

BasiX 2 /RubiX 2 - Fußraste mit Fußbrett kpl., hochschwenkbar (ELR)

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	064897-023	Fußraste mit Fußbrett kpl., hochschwenkbar (ELR) - SB 480 - 600 mm -	rechts

RubiX XL / RubiX 2 XL - Fußbrett durchgehend, winkeleinstellbar, Metall

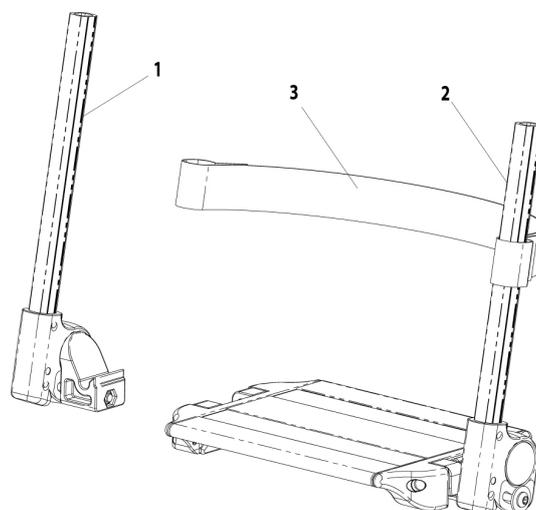

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	068232	Aufnahme Fußbrett	
1	068200-110	Fußrastenrohr mit Fußbrettaufnahme kpl	rechts
1 - 3	064991-003	Fußbrett durchgehend, gesamt SB 600 mm, mit Wadenband	
1 - 3	064991-002	Fußbrett durchgehend, gesamt SB 560 mm, mit Wadenband	
1 - 3	064991-001	Fußbrett durchgehend, gesamt SB 520 mm, mit Wadenband	
2	064993-003	Fußbrett mit Halter links, SB 600 mm (ohne Wadenband)	
2	064993-001	Fußbrett mit Halter links, SB 520 mm (ohne Wadenband)	
2	064993-002	Fußbrett mit Halter links, SB 560 mm (ohne Wadenband)	
3	000812022	Wadenband SB: 520-600 mm	

Lenkrad

Bezeichnung

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Lenkrad


BasiX / RubiX - Lenkradgabel

BasiX / RubiX Lenkrad Hemiplegie Kit

BasiX 2 / RubiX 2 - Lenkrad Hemiplegie Kit


BasiX 2 / RubiX 2 - Lenkradgabel

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Lenkrad

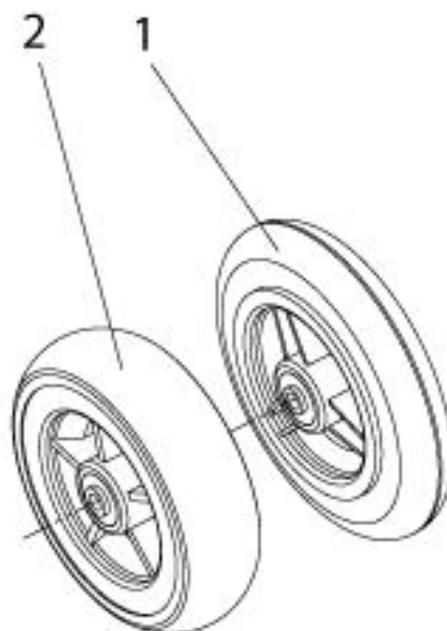


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
	757858055	Lenkrad 8 Zoll, Luft, mit Achse kpl.
	760858365	Vollgummi Lenkrad 7 Zoll mit Achse und Distanzscheibe
	064936	Lenkrad 8 Zoll x 50, Vollgummi, mit Achse kpl.
	064921	Vollgummi-Lenkrad 8 Zoll x 1 1/4 Zoll, 3 Speichen, mit Achse kpl.
1	064901	Vollgummi-Lenkrad 6 Zoll kpl. mit Achse
2	064903	Soft-Lenkrad 6 Zoll mit Achse kpl.
2	06405002-012	Vollgummi-Lenkrad, 8 Zoll x 1 1/4 Zoll (Nabe: 58 mm), 5 Speichen, mit Achse,kpl.

BasiX / RubiX - Lenkradgabel

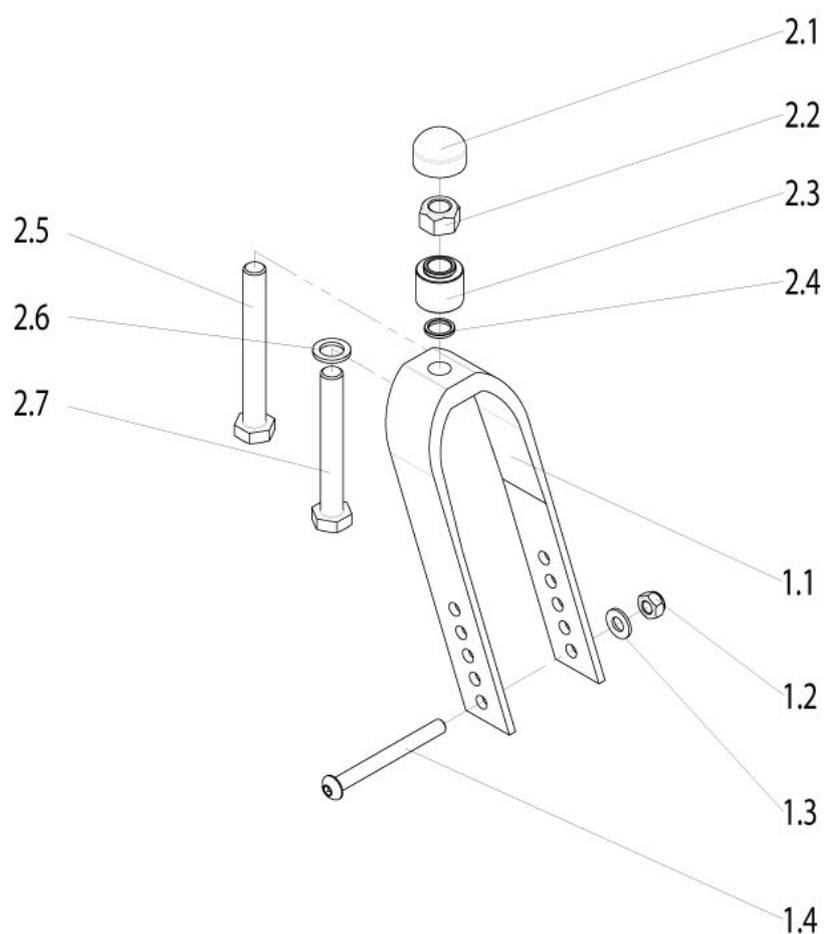


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1.1-2.7	064870-ET	Lenkradgabel, lang und breit, für 6 bzw. 8 x 50 Zoll Lenkrad	
2.1	064828-ET	Abdeckkappe für Lenkradgabel, D = 32 mm	20 St./Pkg.
2.1-2.7	065512	Lenkradschraube, Mutter und 2x Distanz (für SH 530 mm)	2 St./Pkg.

BasiX / RubiX Lenkrad Hemiplegie Kit

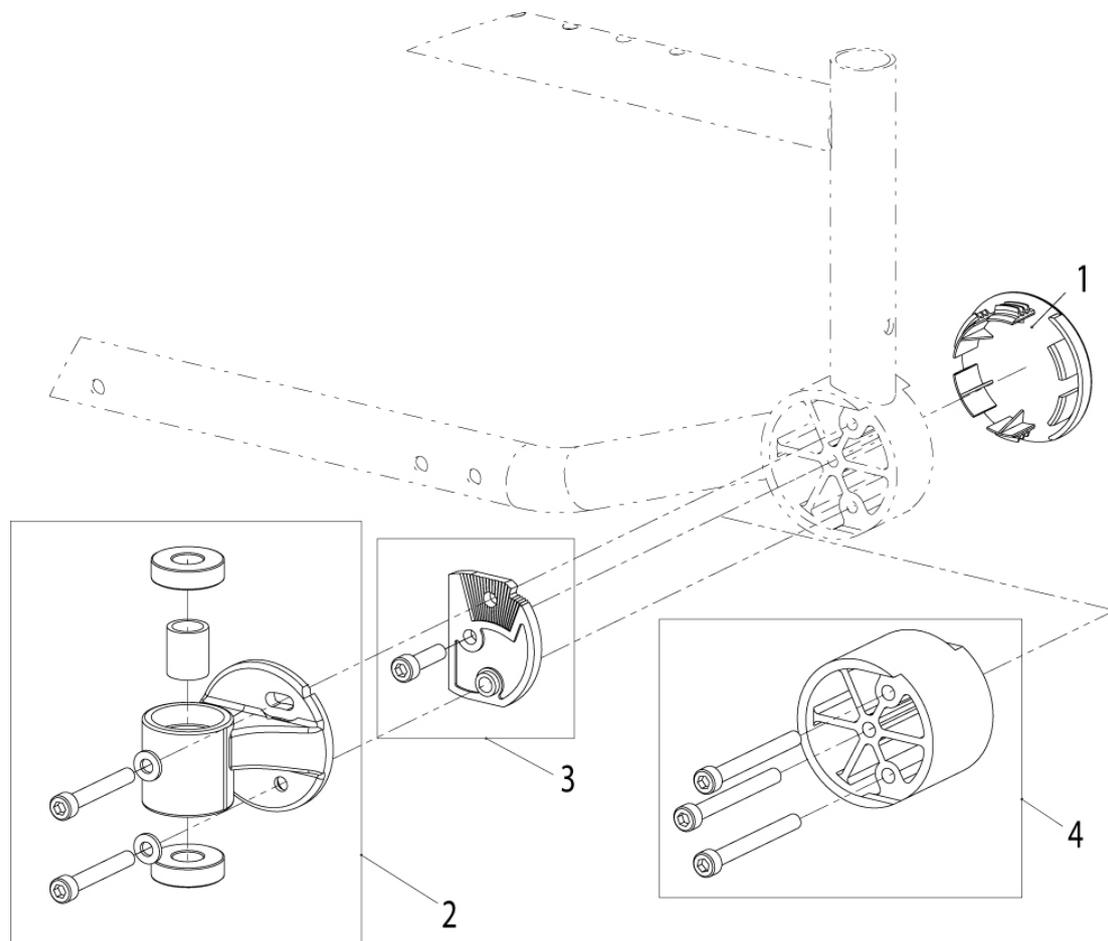


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	064127-ET	Abdeckkappe	10 St./Pkg.
2	064503	Lenkradgabeladapter	Paar
3	064128	Lenkradeinstellungs-Kit	Paar
4	065123	Hemiplegie Kit	Paar

BasiX 2 / RubiX 2 - Lenkrad Hemiplegie Kit

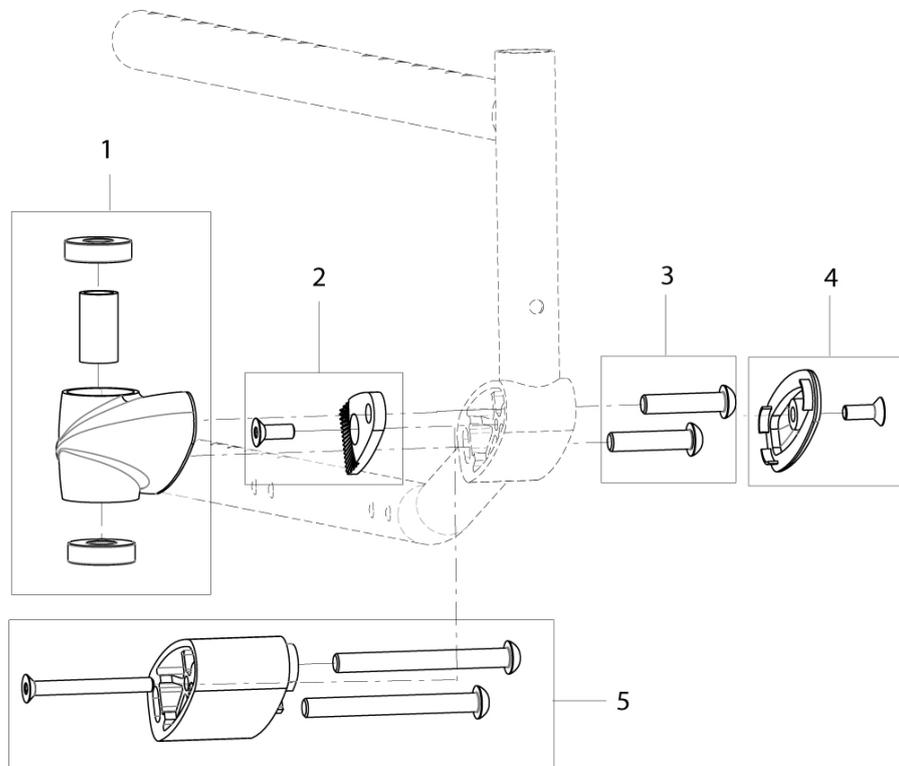

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1, 3	064950	Lenkradgabeladapter	Paar
2	064951	Lenkradeinstellungs-Kit	2 St./Pkg.
4	064953	Abdeckkappe	10 St./Pkg.
5	065151	Hemiplegie Kit	Paar

BasiX 2 / RubiX 2 - Lenkradgabel

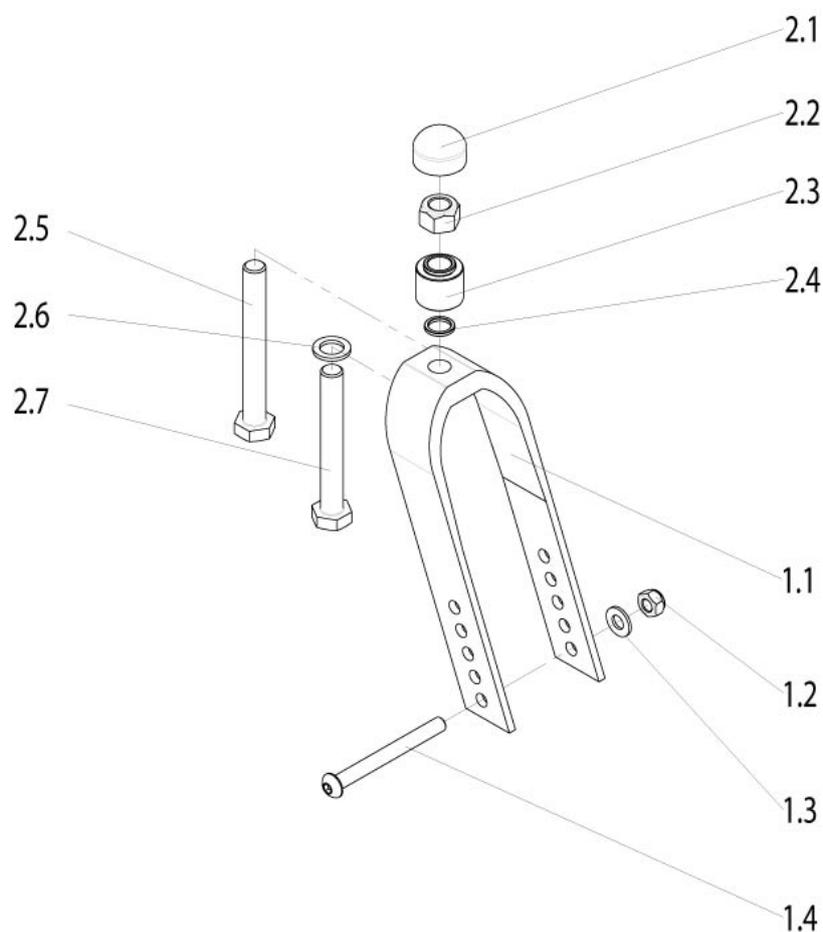

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1.1-2.7	065511-ET	Lenkradgabel, lang und schmal	
1.1-2.7	064886-ET	Lenkradgabel, kurz und schmal	
1.1-2.7	064870-ET	Lenkradgabel, lang und breit, für 6 bzw. 8 x 50 Zoll Lenkrad	
2.1	064828-ET	Abdeckkappe für Lenkradgabel, D = 32 mm	20 St./Pkg.
2.1-2.7	065512	Lenkradschraube, Mutter und 2x Distanz (für SH 530 mm)	2 St./Pkg.
2.1-2.7	064974	Lenkradschraube, Mutter und Distanz	2 St./Pkg.

Rahmen

Bezeichnung


BasiX - Seitenrahmen-Anbauteile

BasiX 2 / RubiX 2 - Seitenrahmen-Anbauteile

BasiX 2, RubiX / RubiX 2- Rahmen


RubiX - Seitenrahmen-Anbauteile

BasiX - Seitenrahmen-Anbauteile

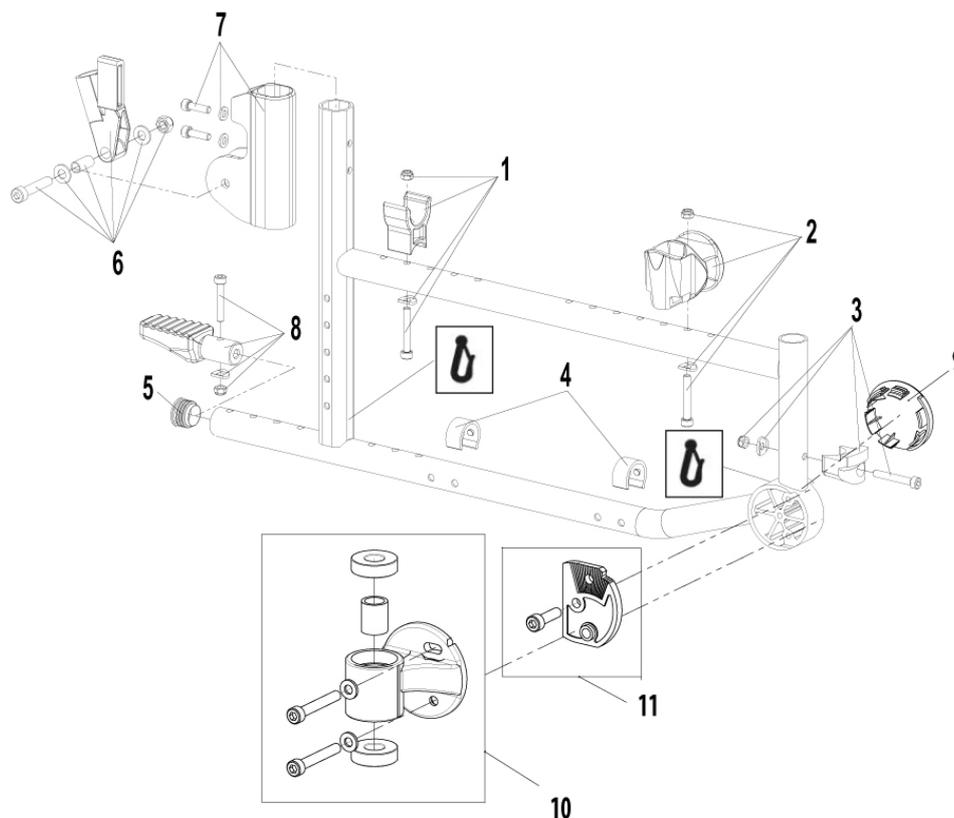

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	000412.6309-ET	Aufkleber - Befestigungspunkt - , schwarz	4 St./Pkg.
	000412.6307-ET	Aufkleber - Befestigungspunkt -, weiß	4 St./Pkg.
1	064923	Auflager kpl.	4 St./Pkg.
2	064971	Seitenteilaufnahme, vorn	Paar
3	064925	Fußrastenaufleger kpl.	2 St./Pkg.
4	064926	Fixierung	20 St./Pkg.
5	064966	Kunststoff-Stopfen	10 St./Pkg.
6	064994	Seitenteilaufnahme, hinten	Paar
7	064906	Rückenrohraufnahme	Paar
8	064931	Ankipphilfe	
9	064127-ET	Abdeckkappe	10 St./Pkg.
10	064503	Lenkradgabeladapter	Paar
11	064128	Lenkradeinstellungs-Kit	Paar

BasiX 2 / RubiX 2 - Seitenrahmen-Anbauteile

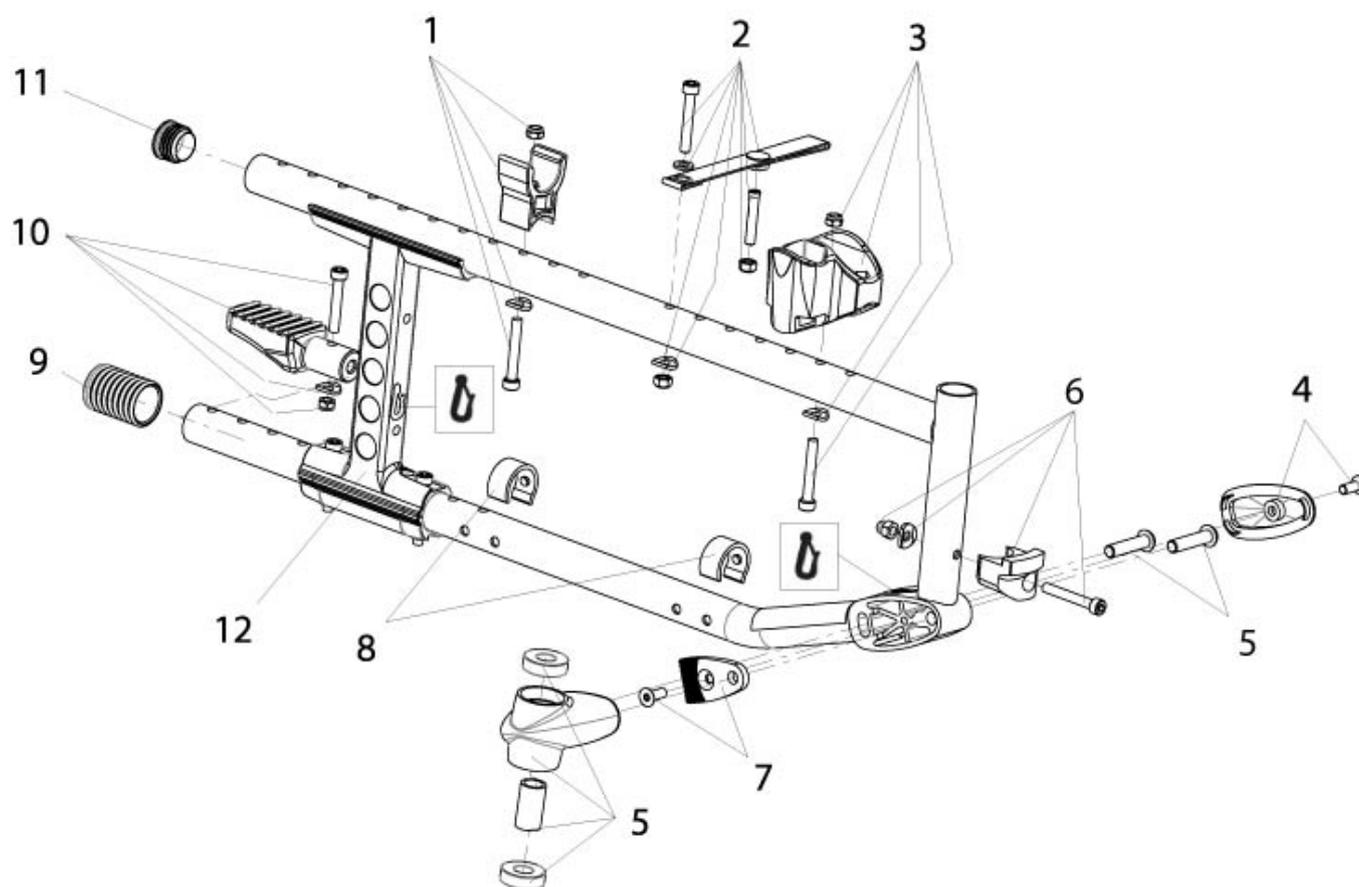


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	065151	Hemiplegie Kit	Paar
	000412.6309-ET	Aufkleber - Befestigungspunkt - , schwarz	4 St./Pkg.
	000412.6307-ET	Aufkleber - Befestigungspunkt - , weiß	4 St./Pkg.
1	064923	Auflager kpl.	4 St./Pkg.
2	064989	Faltfixierung kpl.	
3	064971	Seitenteilaufnahme, vorn	Paar
4	064953	Abdeckkappe	10 St./Pkg.
5	064950	Lenkradgabeladapter	Paar
6	064925	Fußrastenaufleger kpl.	2 St./Pkg.
7	064951	Lenkradeinstellungs-Kit	2 St./Pkg.
8	064926	Fixierung	20 St./Pkg.
9	067912	Auftrittskappe	10 St./Pkg.
10	064931	Ankipphilfe	
11	064966	Kunststoff-Stopfen	10 St./Pkg.

BasiX 2 / RubiX 2 - Seitenrahmen-Anbauteile


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
12	064115	Achsplatte	Paar

BasiX 2, RubiX / RubiX 2- Rahmen

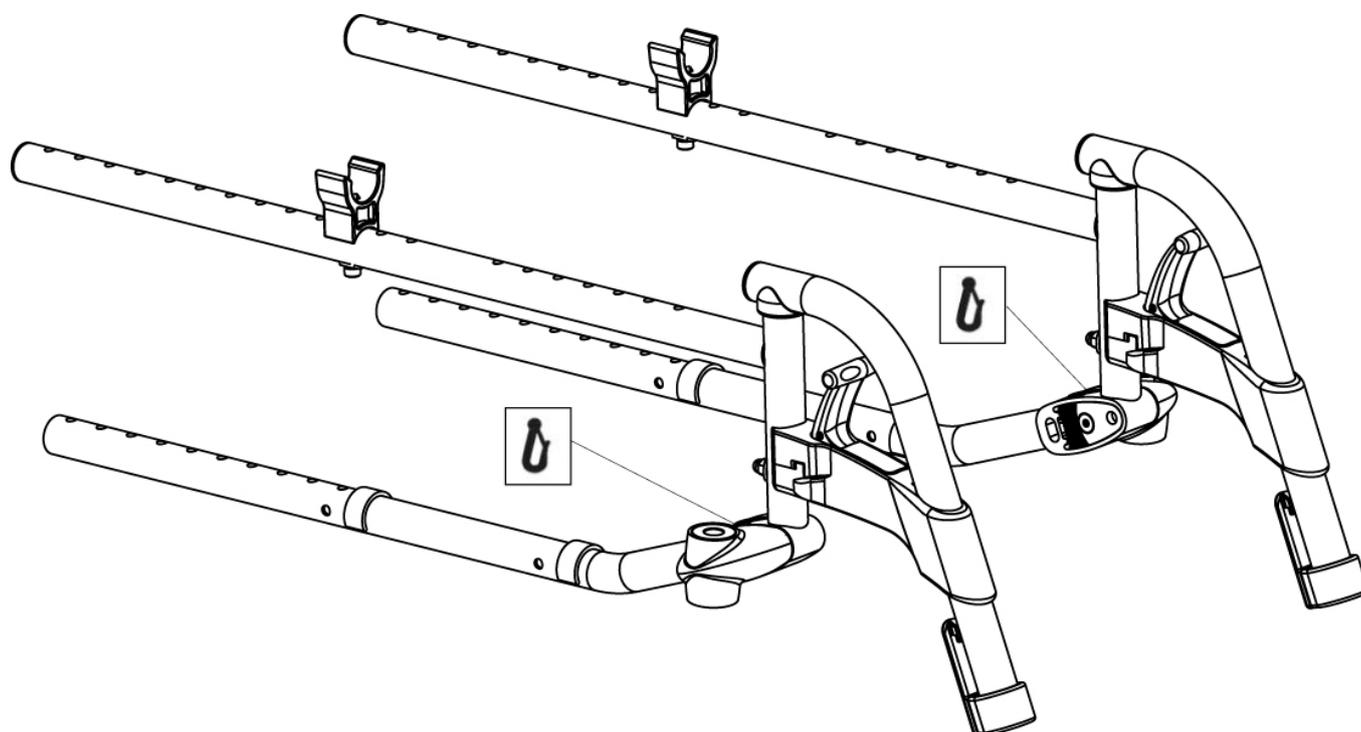

Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
000412.6307-ET	Aufkleber - Befestigungspunkt -, weiß	4 St./Pkg.
000412.6309-ET	Aufkleber - Befestigungspunkt -, schwarz	4 St./Pkg.
064876-010	BasiX 2, RubiX / RubiX 2 Rahmen kpl. - Brilliantrot -	Paar
064876-020	BasiX 2, RubiX / RubiX 2 Rahmen kpl. - Blau	Paar
064876-030	BasiX 2, RubiX / RUBiX 2 Rahmen kpl. - Brillantsilber	Paar
064876-040	BasiX 2, RubiX / RubiX 2 Rahmen kpl. - Schwarz	Paar
065151	Hemiplegie Kit	Paar

RubiX - Seitenrahmen-Anbauteile

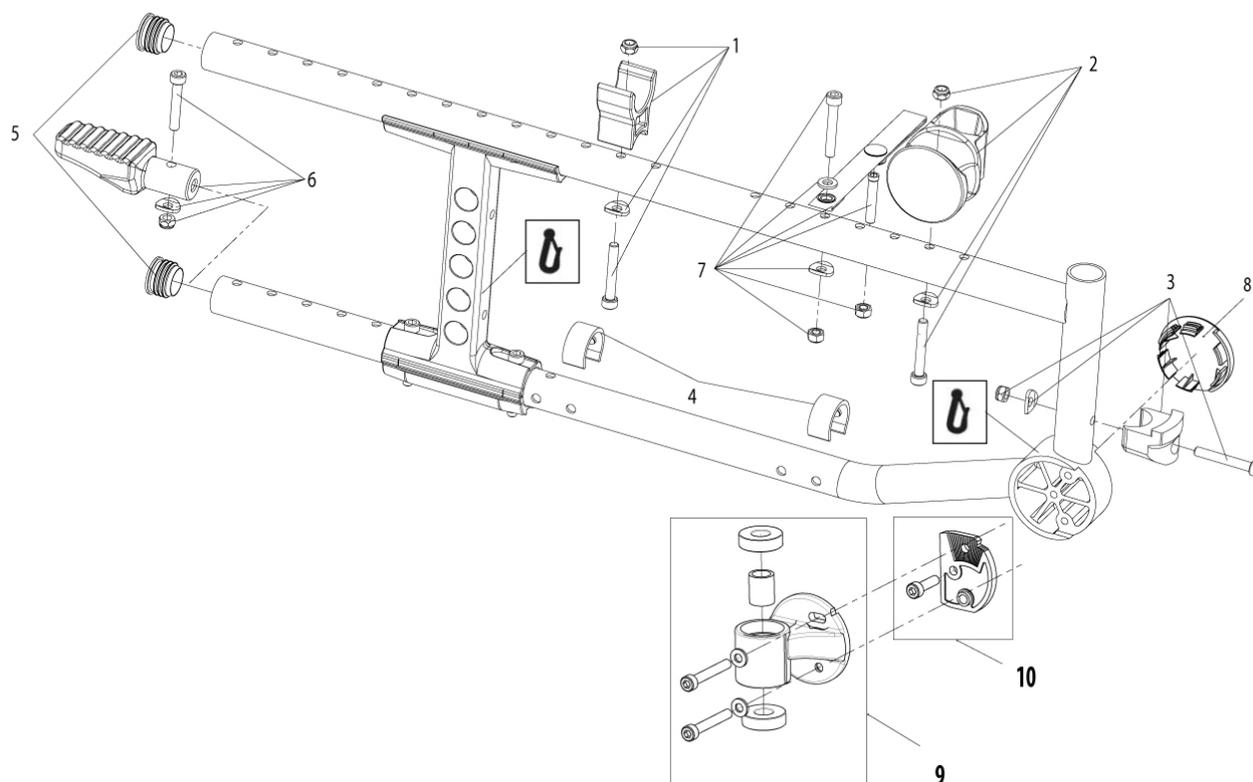

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	000412.6309-ET	Aufkleber - Befestigungspunkt - , schwarz	4 St./Pkg.
	000412.6307-ET	Aufkleber - Befestigungspunkt - , weiß	4 St./Pkg.
1	064923	Auflager kpl.	4 St./Pkg.
2	064971	Seitenteilaufnahme, vorn	Paar
3	064925	Fußrastenaufleger kpl.	2 St./Pkg.
4	064926	Fixierung	20 St./Pkg.
5	064966	Kunststoff-Stopfen	10 St./Pkg.
6	064931	Ankipphilfe	
7	064989	Faltfixierung kpl.	
8	064127-ET	Abdeckkappe	10 St./Pkg.
9	064503	Lenkradgabeladapter	Paar
10	064128	Lenkradeinstellungs-Kit	Paar

Rücken

Bezeichnung

BasiX - Rückenrohr, 1/2 faltbar

BasiX - Rückenrohr, Standard, höhenverstellbar

BasiX - Rückenrohr, winkelvestellbar mit Gasdruckfeder

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Kopfstütze

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenbespannung (7 Rückengurte)

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenbespannung, anpassbar (4 Rückengurte)

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenbespannung, Standard (3 Rückengurte)

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Stabilisierungsstange für Recliner

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Stabilisierungsstange, faltbar

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX2 - Stabilisierungsstange

BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenrohr, 1/2 faltbar

BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenrohr, Standard

BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenrohr, Standard, höhenverstellbar


BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenrohr, winkel- und höhenverstellbar

BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenrohr, winkelvestellbar mit Gasdruckfeder

RubiX / RubiX 2 - Anatomischer Rücken, Halterung


RubiX / RubiX 2 - Anatomischer Rücken, Standard

BasiX - Rückenrohr, 1/2 faltbar

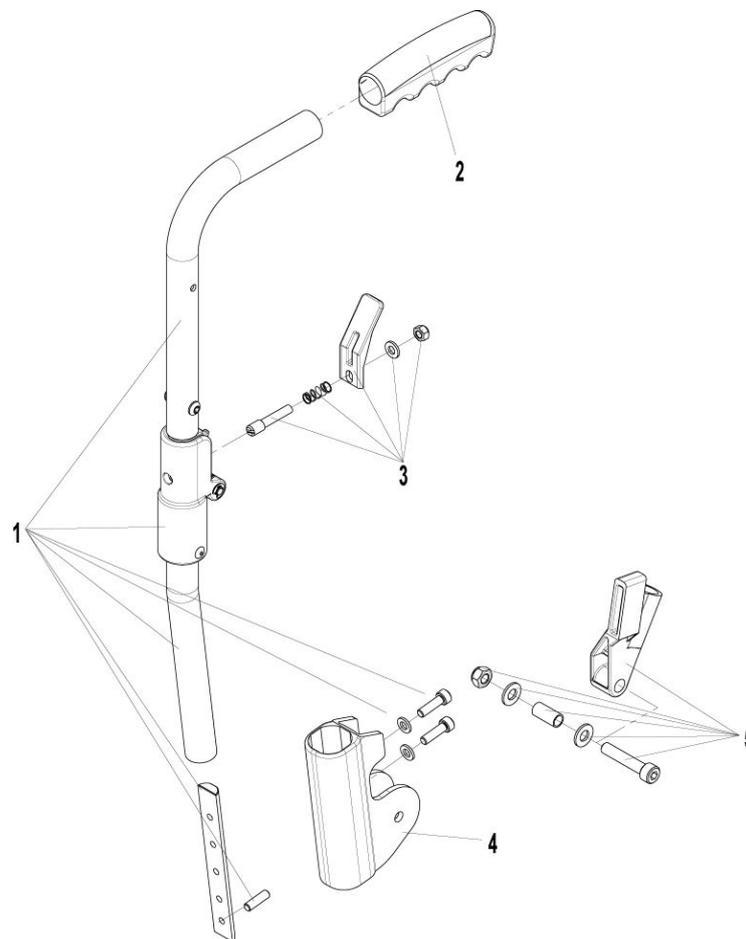


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1 - 3	064916	Rücken, 1/2 faltbar	in D nicht erhältlich, Paar
2	064946	Handgriff	10 St./Pkg., Hinweis: UniX bis KW 09/2012
3	064917	Auslösehebel für 1/2 faltbaren Rücken kpl.	10 St./Pkg.
4	064906	Rückenrohraufnahme	Paar
5	064994	Seitenteilaufnahme, hinten	Paar

BasiX - Rückenrohr, Standard, höhenverstellbar

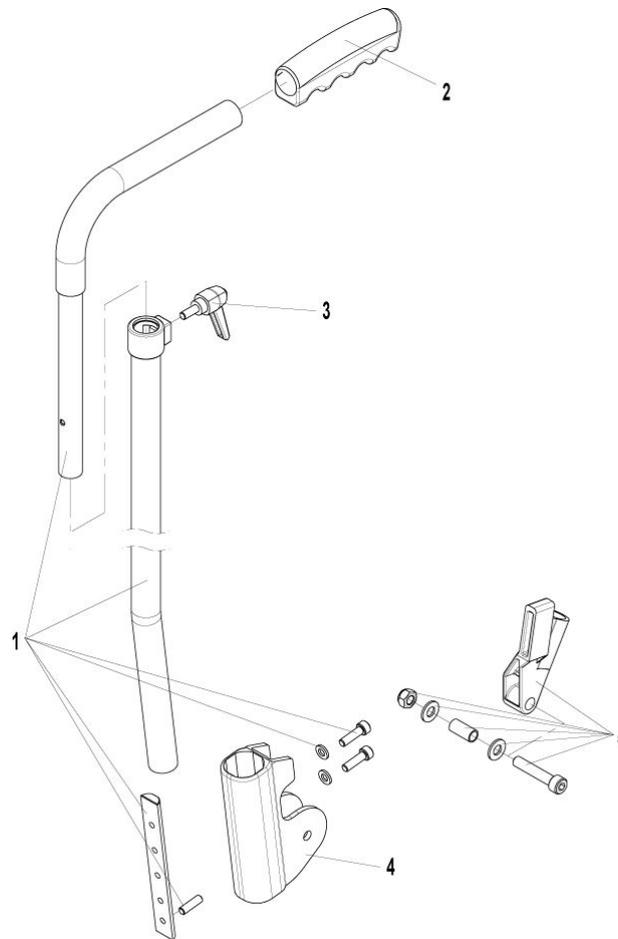


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
2	064946	Handgriff	10 St./Pkg., Hinweis: UniX bis KW 09/2012
3	064939	Klemmhebel	10 St./Pkg.
4	064906	Rückenrohraufnahme	Paar
5	064994	Seitenteilaufnahme, hinten	Paar

BasiX - Rückenrohr, winkelverstellbar mit Gasdruckfeder

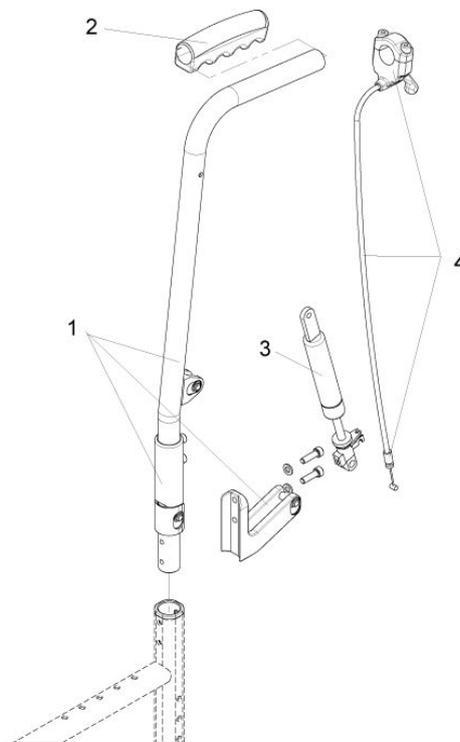

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	064434-ET	Halterung für Recliner, inkl. Montagematerial	Paar
1 - 4	064954	Rückenrohr mit Gasdruckfeder und Auslösekabel kpl.	Paar
2	064946	Handgriff	10 St./Pkg., Hinweis: UniX bis KW 09/2012
3	064423	Gasdruckfeder kpl.	
4	064621	Bedienhebel für Gasdruckfeder mit Auslösekabel kpl.	

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Kopfstütze

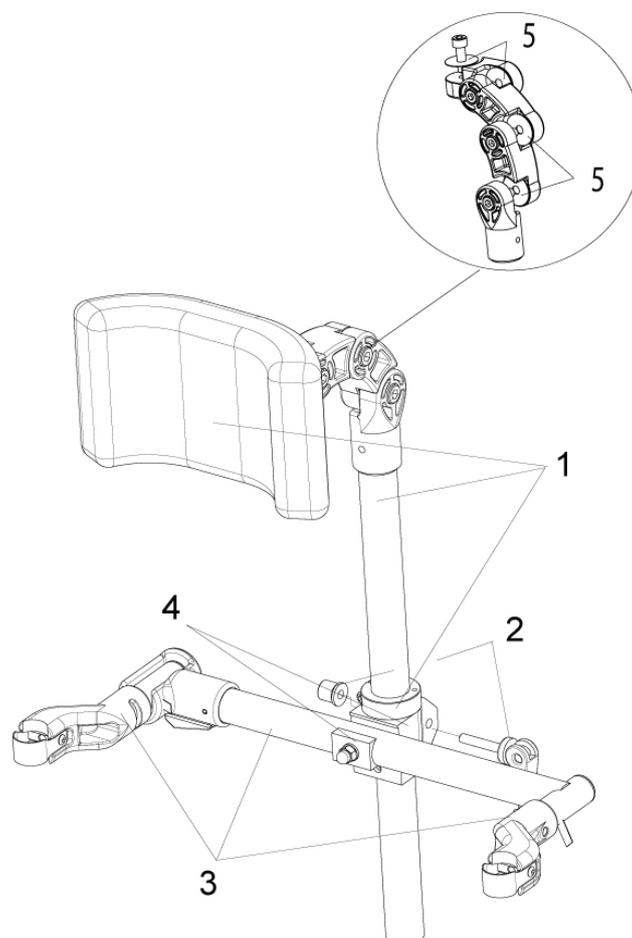

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	84303002-ET	Reibscheibe für Kopfstütze	10 St./Pkg., Hinweis: nur für Kopfstützen vor KW 36/2015
1	84303012-001	Kopfstütze mit Polster - medium- (200 x 110 mm)	
1 - 4	064909-007	Kopfstütze mit Stabilisierungsstange kpl. SB 560 mm	
1 - 4	064909-006	Kopfstütze mit Stabilisierungsstange kpl. SB 520 mm	
1 - 4	064909-008	Kopfstütze mit Stabilisierungsstange kpl. SB 600 mm	
1 - 4	064909-005	Kopfstütze mit Stabilisierungsstange kpl. SB 480 mm	
1 - 4	064909-001	Kopfstütze mit Stabilisierungsstange kpl. SB 380 mm	
1 - 4	064909-003	Kopfstütze mit Stabilisierungsstange kpl. SB 430 mm	
1 - 4	064909-002	Kopfstütze mit Stabilisierungsstange kpl. SB 405 mm	
1 - 4	064909-004	Kopfstütze mit Stabilisierungsstange kpl. SB 455 mm	
2	000233027	Schnellspanner	

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Kopfstütze

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
2, 4	000841511.01	Kopfstützenhalterung metrische Ausführung	
5	84303015	Schnellspanner zur Kopfstützenfixierung	

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenbespannung (7 Rückengurte)



Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	064493-075	Rückenbespannung, Rücken winkelverstellbar, SB 480 mm	
	064493-074	Rückenbespannung, Rücken winkelverstellbar, SB 455 mm	
	064493-073	Rückenbespannung, Rücken winkelverstellbar, SB 430 mm	
	064493-076	Rückenbespannung, Rücken winkelverstellbar, SB 520 mm	
	064493-077	Rückenbespannung, Rücken winkelverstellbar, SB 560 mm	
	065405-ET	Blechschraube 6 x 3 x 16 mm, selbstschneidend	25 St./Pkg.
	064493-078	Rückenbespannung, Rücken winkelverstellbar, SB 600 mm	
	064493-071	Rückenbespannung, Rücken winkelverstellbar, SB 380 mm	
	064493-072	Rückenbespannung, Rücken winkelverstellbar, SB	

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenbespannung (7 Rückengurte)

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
		405 mm	
1	065445-002	Rückengurte anpassbar (7 Gurte), Rubix/Helix: SB 480 mm - 600 mm	
1	065445-001	Rückengurte anpassbar (7 Gurte), Rubix/Helix: SB 380 mm - 455 mm	
2	064493-013	Rückenbespannung SB 430 mm	
2	064493-012	Rückenbespannung SB 405 mm	
2	064493-014	Rückenbespannung SB 455 mm	
2	064493-015	Rückenbespannung SB 480 mm	
2	064493-018	Rückenbespannung SB 600 mm	
2	064493-017	Rückenbespannung SB 560 mm	
2	064493-016	Rückenbespannung SB 520 mm	
2	064493-011	Rückenbespannung SB 380 mm	

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenbespannung, anpassbar (4 Rückengurte)



Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	064493-074	Rückenbespannung, Rücken winkelverstellbar, SB 455 mm	
	064493-073	Rückenbespannung, Rücken winkelverstellbar, SB 430 mm	
	064493-072	Rückenbespannung, Rücken winkelverstellbar, SB 405 mm	
	064493-075	Rückenbespannung, Rücken winkelverstellbar, SB 480 mm	
	064493-076	Rückenbespannung, Rücken winkelverstellbar, SB 520 mm	
	064493-078	Rückenbespannung, Rücken winkelverstellbar, SB 600 mm	
	064493-077	Rückenbespannung, Rücken winkelverstellbar, SB 560 mm	
	000102071-ET	Linsen-Blechschaube M 6,3 x 19	25 St./Pkg.
	064493-071	Rückenbespannung, Rücken winkelverstellbar, SB	

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenbespannung, anpassbar (4 Rückengurte)

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
		380 mm	
1	064941-002	Rückengurte anpassbar (4 Gurte) SB 480 mm - 600 mm	
1	064941-001	Rückengurte anpassbar (4 Gurte) SB 380 mm - 455	
2	064493-012	Rückenbespannung SB 405 mm	
2	064493-011	Rückenbespannung SB 380 mm	
2	064493-013	Rückenbespannung SB 430 mm	
2	064493-014	Rückenbespannung SB 455 mm	
2	064493-017	Rückenbespannung SB 560 mm	
2	064493-016	Rückenbespannung SB 520 mm	
2	064493-015	Rückenbespannung SB 480 mm	
2	064493-018	Rückenbespannung SB 600 mm	

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenbespannung, Standard (3 Rückengurte)




Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	064493-062	Rückenbespannung für Rücken winkelverstellbar, BasiX, SB 405 mm	
	000102071-ET	Linsen-Blechschraube M 6,3 x 19	25 St./Pkg.
	064493-063	Rückenbespannung für Rücken winkelverstellbar, BasiX, SB 430 mm	
	064493-064	Rückenbespannung für Rücken winkelverstellbar, BasiX, SB 455 mm	
	064493-065	Rückenbespannung für Rücken winkelverstellbar, BasiX, SB 480 mm	
	064493-061	Rückenbespannung für Rücken winkelverstellbar, BasiX, SB 380 mm	
1	064493-045	Standard-Rückenbespannung (3 Rückengurte) SB 480 mm	
1	064493-041	Standard-Rückenbespannung (3 Rückengurte) SB 380 mm	
1	064493-042	Standard-Rückenbespannung (3 Rückengurte) SB	

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenbespannung, Standard (3 Rückengurte)


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
		405 mm	
1	064493-043	Standard-Rückenbespannung (3 Rückengurte) SB 430 mm	
1	064493-044	Standard-Rückenbespannung (3 Rückengurte) SB 455 mm	
1	064493-046	Standard-Rückenbespannung (3 Rückengurte) SB 520 mm	

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Stabilisierungsstange für Recliner

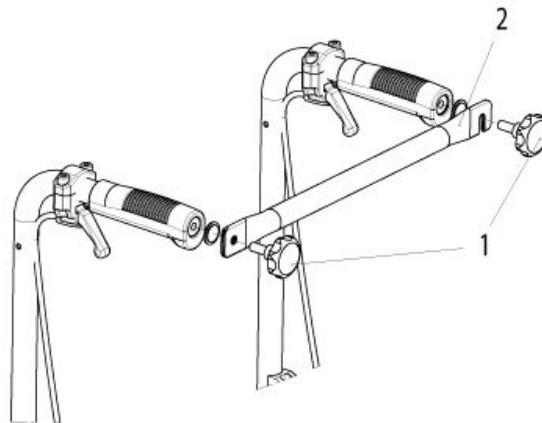

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
1-2	065752-006	Stabilisierungsstange Recliner kpl. für SB 520 mm
1-2	065752-007	Stabilisierungsstange Recliner kpl. für SB 560 mm
1-2	065752-008	Stabilisierungsstange Recliner kpl. für SB 600 mm
1-2	065752-005	Stabilisierungsstange Recliner kpl. für SB 480 mm
1-2	065752-004	Stabilisierungsstange Recliner kpl. für SB 455 mm
1-2	065752-002	Stabilisierungsstange Recliner kpl. für SB 405 mm
1-2	065752-003	Stabilisierungsstange Recliner kpl. für SB 430 mm
1-2	065752-001	Stabilisierungsstange Recliner kpl. für SB 380 mm

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Stabilisierungsstange, faltbar

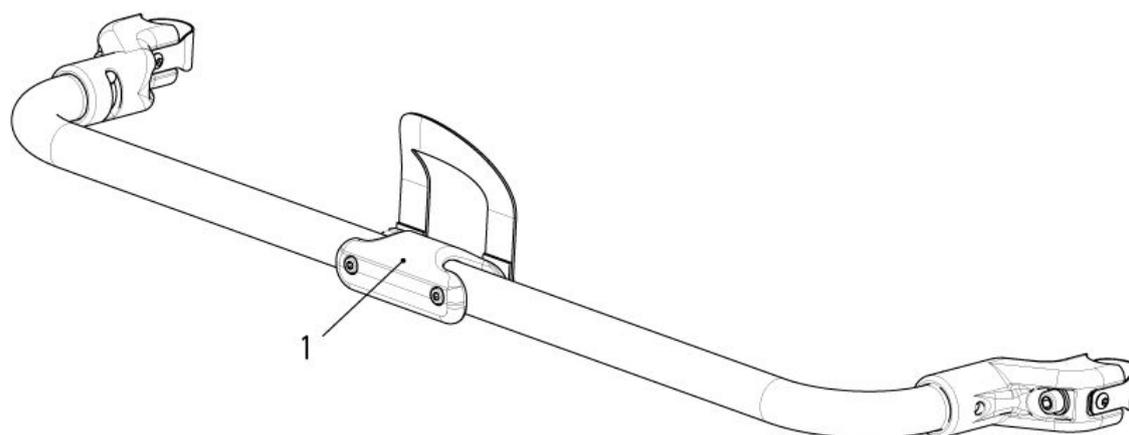


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	065720-010	Stabilisierungsstange, faltbar	SB 560 mm
1	065720-009	Stabilisierungsstange, faltbar	X-Family: SB 520 mm, alle anderen SB 500 mm
1	065720-011	Stabilisierungsstange, faltbar	X-Family: SB 600 mm, alle anderen SB 540 mm
1	065720-008	Stabilisierungsstange, faltbar	SB 480 mm
1	065720-006	Stabilisierungsstange, faltbar	SB 455 mm
1	065720-003	Stabilisierungsstange, faltbar	X-Family: SB 405 mm, alle anderen SB 400 mm
1	065720-004	Stabilisierungsstange, faltbar	X-Family: SB 430 mm, alle anderen SB 420 mm

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Stabilisierungsstange, faltbar


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	065720-002	Stabilisierungsstange, faltbar	SB 380 mm

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX2 - Stabilisierungsstange

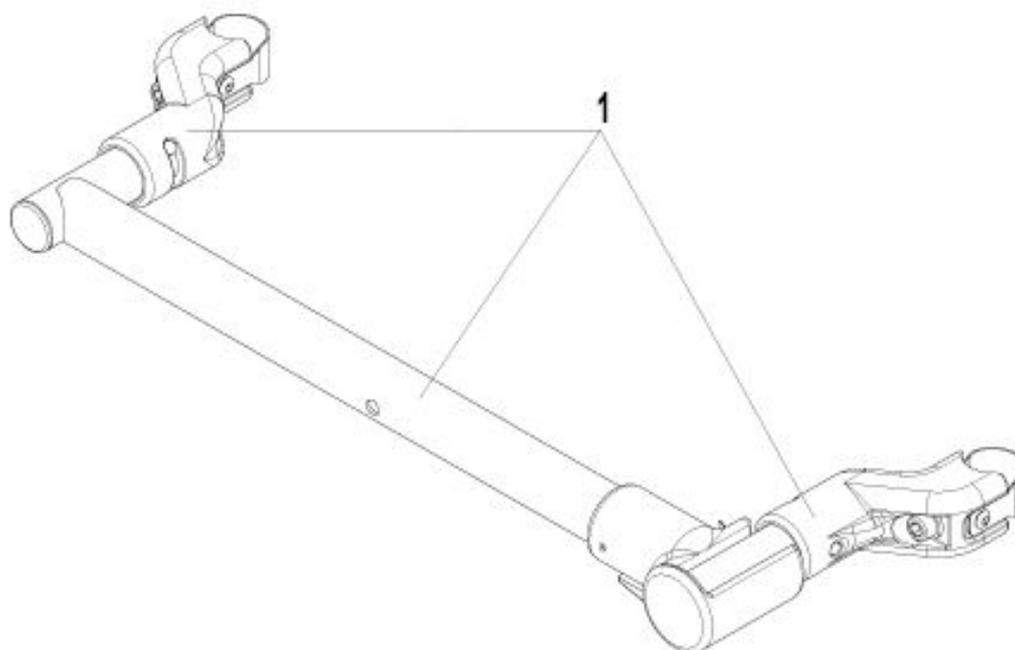


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
1	064707-006	Stabilisierungsstange kpl. für SB 520 mm
1	064707-007	Stabilisierungsstange kpl. für SB 560 mm
1	064707-008	Stabilisierungsstange kpl. für SB 600 mm
1	064707-005	Stabilisierungsstange kpl. für SB 480 mm
1	064707-004	Stabilisierungsstange kpl. für SB 455 mm
1	064707-002	Stabilisierungsstange kpl. für SB 405 mm
1	064707-003	Stabilisierungsstange kpl. für SB 430 mm
1	064707-001	Stabilisierungsstange kpl. für SB 380 mm

BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenrohr, 1/2 faltbar

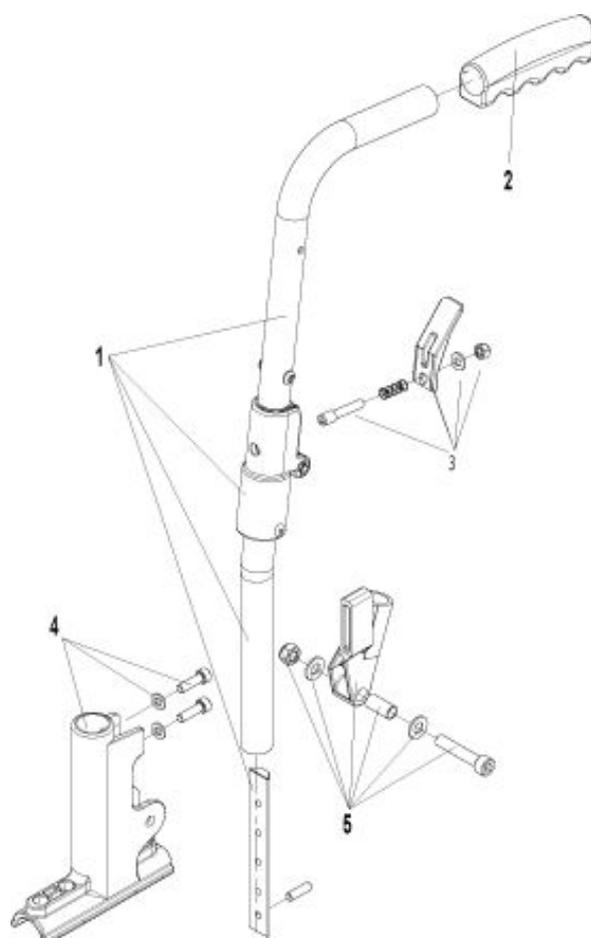


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1 - 5	064400-500	Rücken, 1/2 faltbar	nicht in D erhältlich, Paar
2	064946	Handgriff	10 St./Pkg., Hinweis: UniX bis KW 09/2012
3	064917	Auslösehebel für 1/2 faltbaren Rücken kpl.	10 St./Pkg.
5	064994	Seitenteilaufnahme, hinten	Paar

BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenrohr, Standard

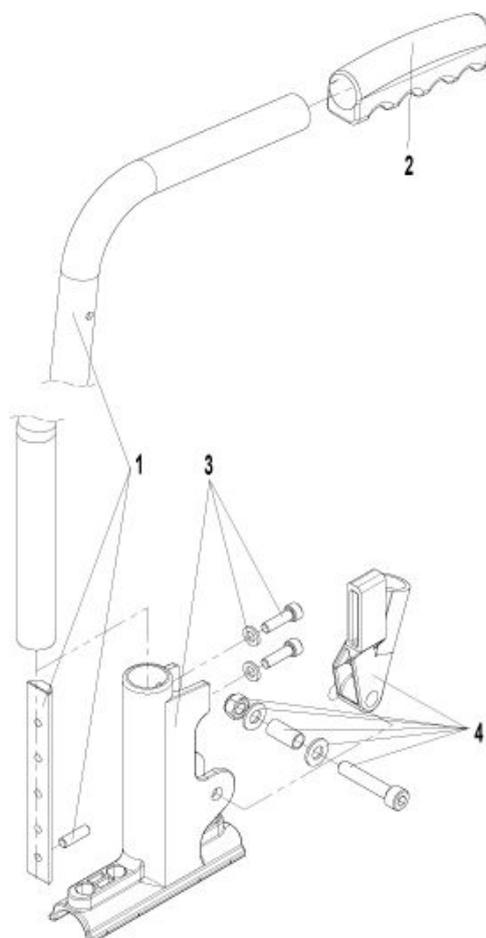


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1 - 4	064400-100	Standardrückenrohr für Rückenhöhe 410 - 435 - 460 mm	Paar
2	064946	Handgriff	10 St./Pkg., Hinweis: UniX bis KW 09/2012
4	064994	Seitenteilaufnahme, hinten	Paar

BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenrohr, Standard, höhenverstellbar

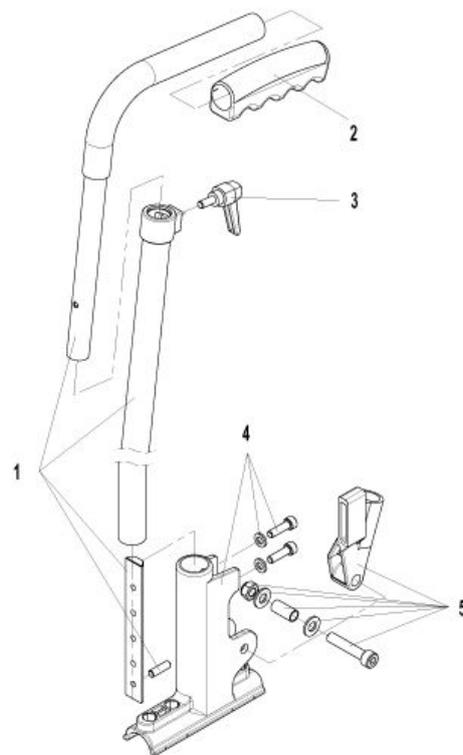


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1 - 5	064400-200	Standardrückenrohr mit höhenverstellbarem Schiebegriff für Rückenhöhe 410 -435 - 460 mm	Paar
2	064946	Handgriff	10 St./Pkg., Hinweis: UniX bis KW 09/2012
3	064939	Klemmhebel	10 St./Pkg.
5	064994	Seitenteilaufnahme, hinten	Paar

BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenrohr, winkel- und höhenverstellbar

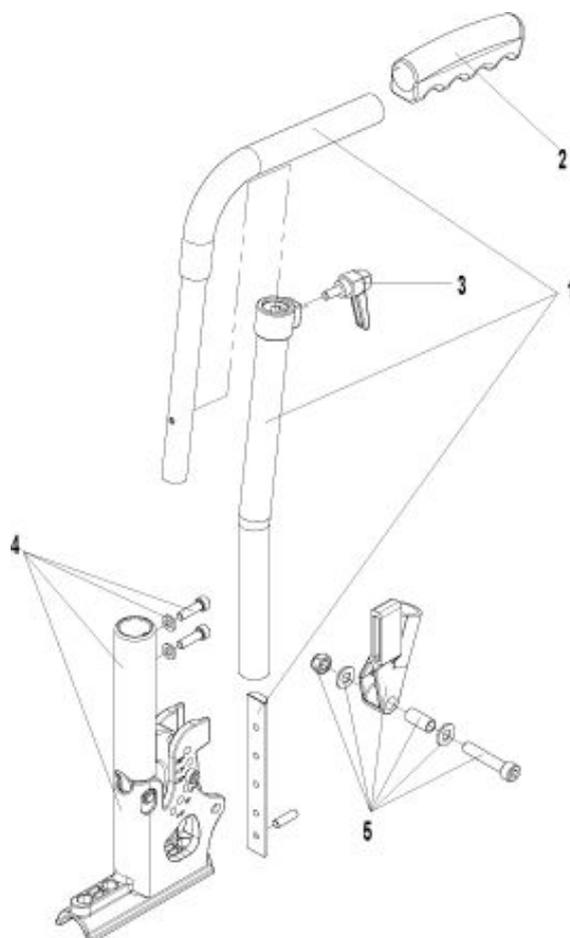

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1 - 5	064400-600	Rückenrohr, winkelverstellbar mit höhenverstellbaren Schiebegriff	Basix/RubiX: in D nicht erhältlich, Paar
2	064946	Handgriff	10 St./Pkg., Hinweis: UniX bis KW 09/2012
3	064939	Klemmhebel	10 St./Pkg.
5	064994	Seitenteilaufnahme, hinten	Paar

BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Rückenrohr, winkelverstellbar mit Gasdruckfeder

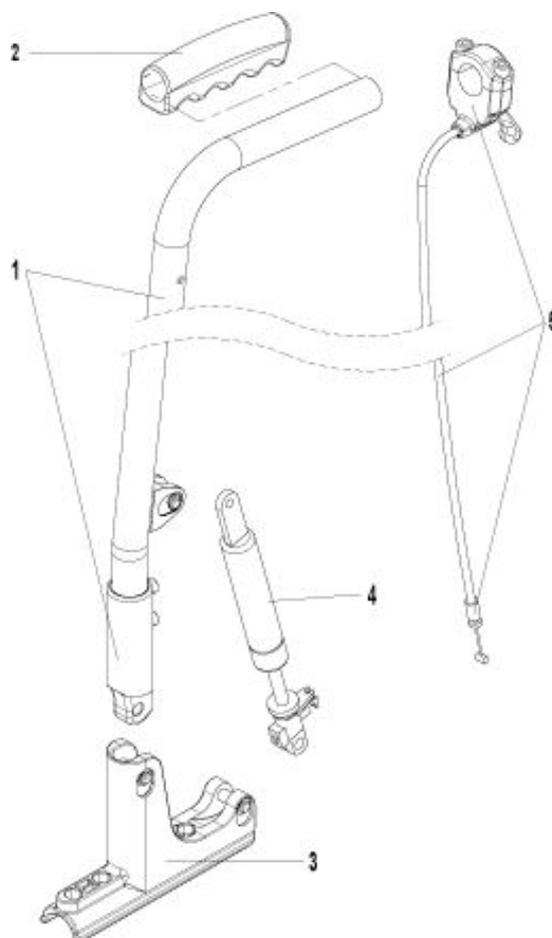

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	064622-006	Auslösehebel für Bremszug Trommelbremse/Recliner, kpl.	
1 - 5	064400-400	Rücken, winkelverstellbar mit Gasdruckfeder und Auslösekabel kpl.	1 St./Pkg., Achtung: bei Nachrüstung müssen auch die Seitenteile 064750-100be stellt werden.
2	064946	Handgriff	10 St./Pkg., Hinweis: UniX bis KW 09/2012
4	064423	Gasdruckfeder kpl.	
5	064621	Bedienhebel für Gasdruckfeder mit Auslösekabel kpl.	


RubiX / RubiX 2 - Anatomischer Rücken, Halterung

1



Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	065481	Halterung für anatomischen Rücken, kpl.	Paar

RubiX / RubiX 2 - Anatomischer Rücken, Standard

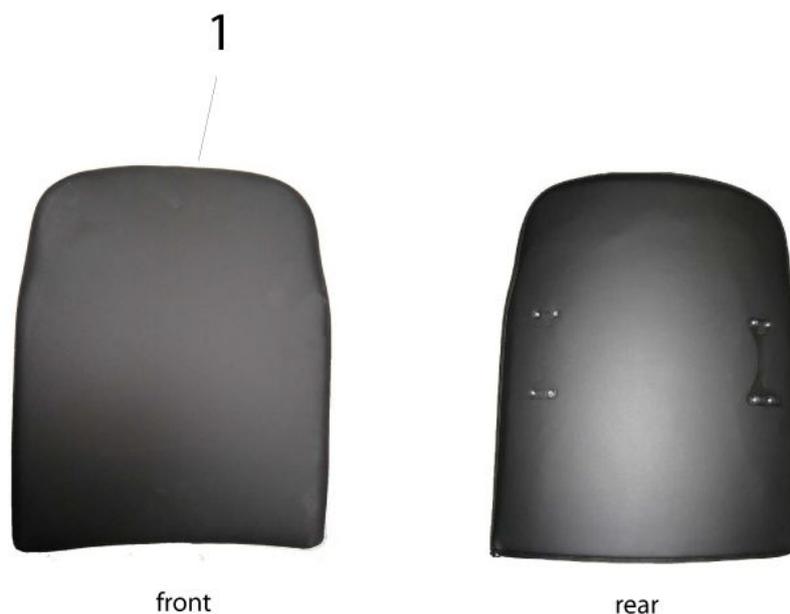

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	769845BE.51B	JAY Comfort Standard Rücken, Pro Incon, ohne Halterung	SB 510 mm
1	769845BE.56B	JAY Comfort Standard Rücken, Pro Incon, ohne Halterung	SB 560 mm
1	769845BE.60B	JAY Comfort Standard Rücken, Pro Incon, ohne Halterung	SB 600 mm
1	769845BE.48B	JAY Comfort Standard Rücken, Pro Incon, ohne Halterung	SB 485 mm
1	769845BE.46B	JAY Comfort Standard Rücken, Pro Incon, ohne Halterung	SB 460 mm
1	769845BE.41B	JAY Comfort Standard Rücken, Pro Incon, ohne Halterung	SB 410 mm
1	769845BE.43B	JAY Comfort Standard Rücken, Pro Incon, ohne Halterung	SB 430 mm
1	769845BE.38B	JAY Comfort Standard Rücken, Pro Incon, ohne Halterung	SB 385 mm

Seitenteil

Bezeichnung

BasiX / BasiX 2 - Seitenteil mit Armauflage, Standard


BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Seitenteil mit Armauflage, höhenverstellbar

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Seitenteil, Armauflage verstellbar, Zentralstütze

RubiX / RubiX 2 - Armauflage, HP-Version

RubiX / RubiX 2 - Seitenteil, Armauflage verstellbar, Standard

BasiX / BasiX 2 - Seitenteil mit Armauflage, Standard

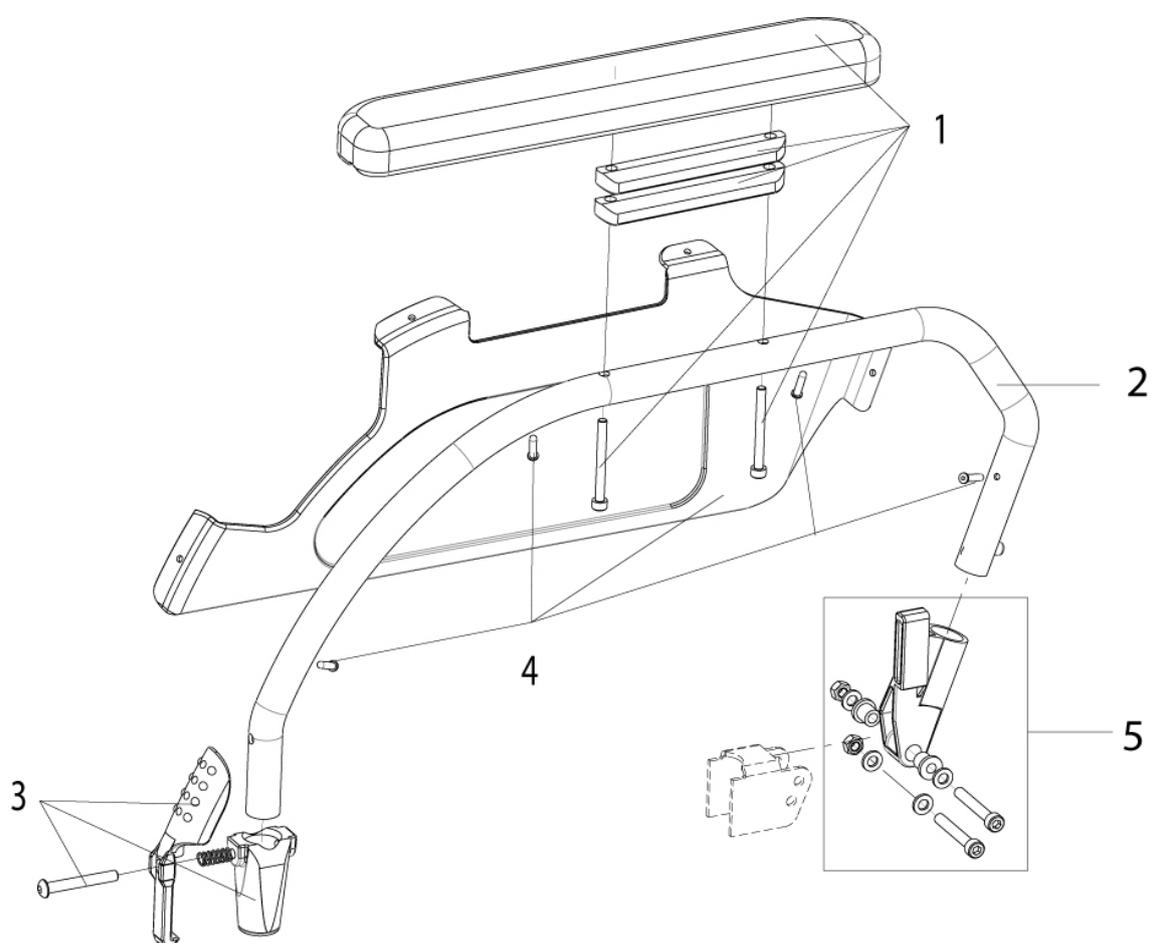


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	064908	Armauflage mit Anbauzubehör kpl.	links/rechts verwendbar, nur BasiX
	067902	Montagematerial Standardseitenteil, hinten	Paar
	064830-002	Seitenteil mit Armauflage	links
	064830-001	Seitenteil mit Armauflage	rechts
1	067925	Armpolster mit Anbauzubehör kpl.	links/rechts verwendbar
1 - 4	064830-000	Seitenteil mit Armauflage	Paar
3	064952	Auslösemechanismus, vorn	links/rechts verwendbar
4	064959	Kunststoff-Abdeckung für Seitenteil mit Nieten	Paar
5	067424-000	Seitenteilaufnahme, hinten	Paar, UniX: Umbau auf hvst. Seitenteil,

BasiX / BasiX 2 - Seitenteil mit Armauflage, Standard


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
			PariX: STD- und hvst. Seitenteil

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Seitenteil mit Armauflage, höhenverstellbar

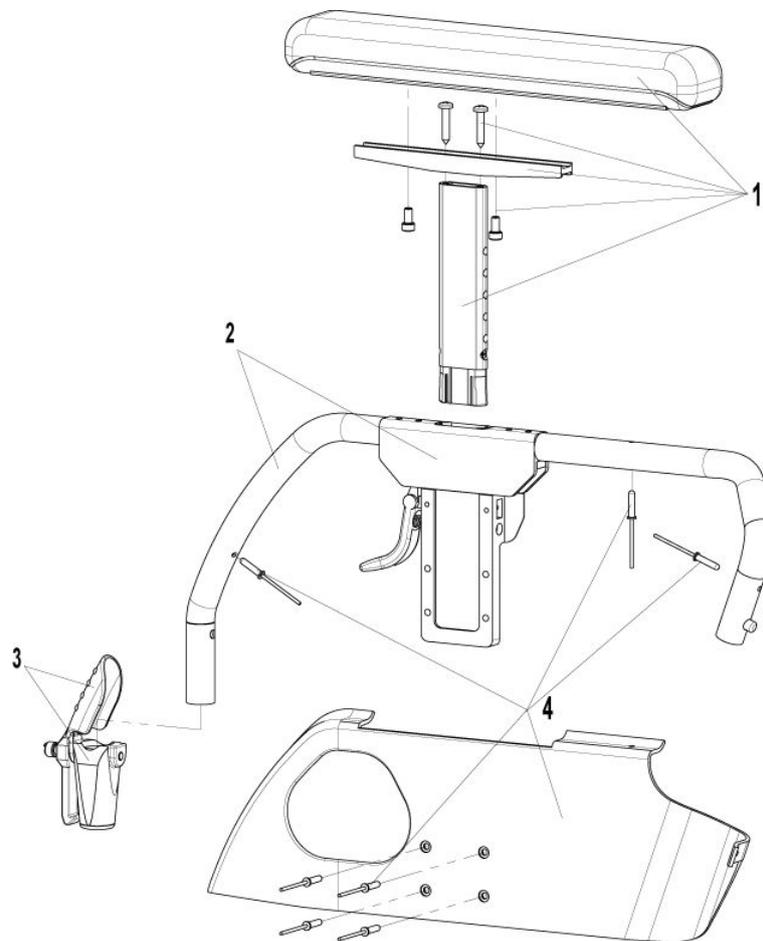


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	064994	Seitenteilaufnahme, hinten	Paar
	06404001	Armauflage, höhenverstellbar kpl.	links/rechts verwendbar
	064475-100	Seitenteil mit Armauflage, höhenverstellbar kpl.	Paar
	064475-001	Seitenteil mit Armauflage, höhenverstellbar kpl.	rechts
1 - 4	064475-002	Seitenteil mit Armauflage, höhenverstellbar kpl.	links
3	064952	Auslösemechanismus, vorn	links/rechts verwendbar
4	064960	Kunststoff-Abdeckung für Seitenteil mit Nieten	Paar

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Seitenteil, Armauflage verstellbar, Zentralstütze

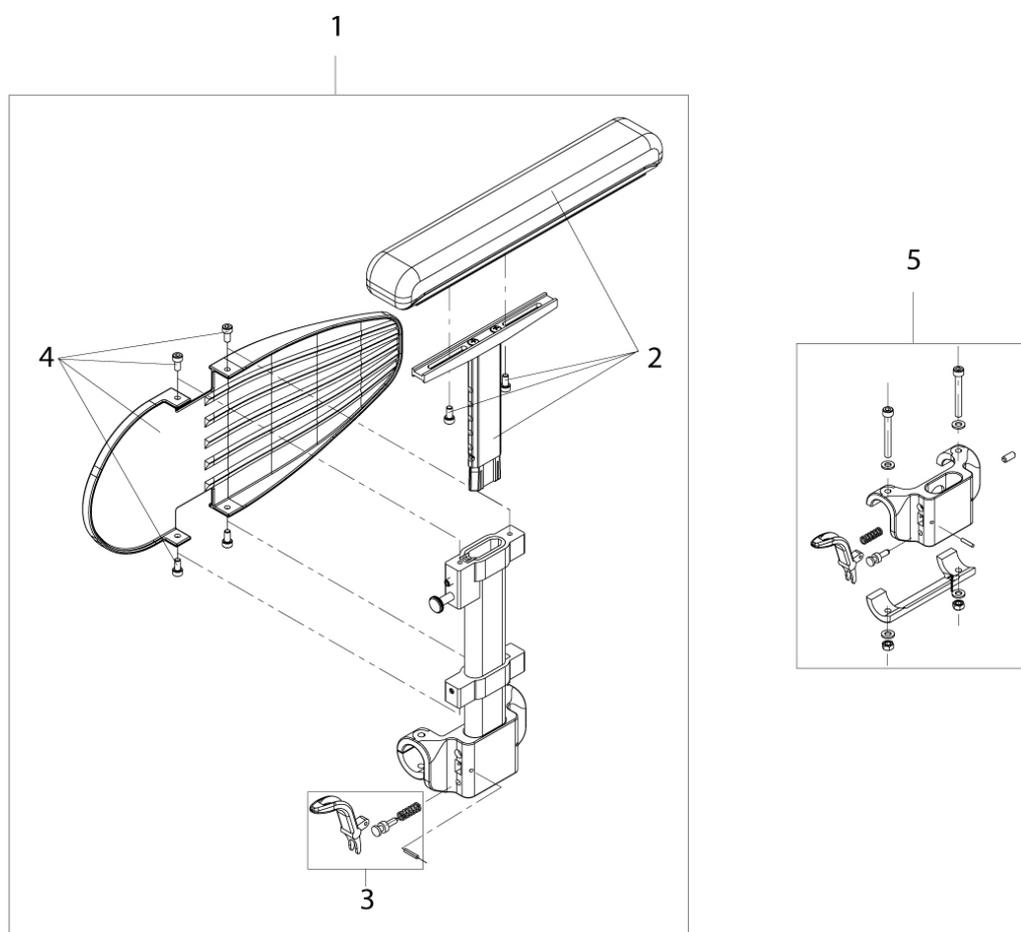


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	064750-100	Seitenteil mit Armauflage, höhenverstellbar	Paar
1	064750-002	Seitenteil mit Armauflage, höhenverstellbar	links
1	064750-001	Seitenteil mit Armauflage, höhenverstellbar	rechts
2	06404001	Armauflage, höhenverstellbar kpl.	links/rechts verwendbar
3	064919	Auslösemechanismus kpl.	links/rechts verwendbar
4	064992	Kunststoffabdeckung mit Schrauben für Seitenteil	Paar
5	064750-005	Halter für Armauflage, höhenverstellbar	2 St./Pkg.

RubiX / RubiX 2 - Armauflage, HP-Version

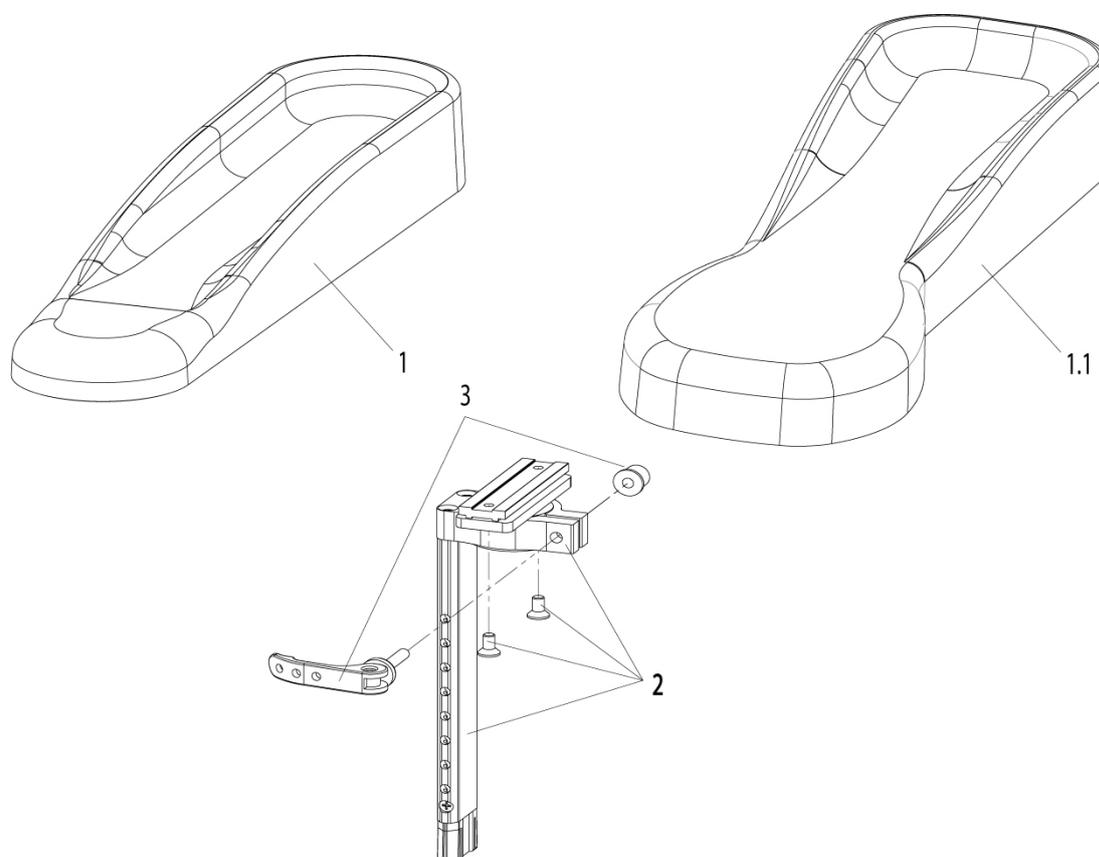

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1, 2, 3	069735	Armauflage, HP-Version (L 470 mm x B 100 mm x H 29,5 mm), mit höhen- undwinklverstellbarer Halterung kpl.	links/rechts verwendbar
1.1, 2, 3	069767	Armauflage, HP-Version XL (L 540 mm x B 150 mm x H 35/60 mm), mit höhen- undwinklverstellbarer Halterung kpl.	links/rechts verwendbar

RubiX / RubiX 2 - Seitenteil, Armauflage verstellbar, Standard

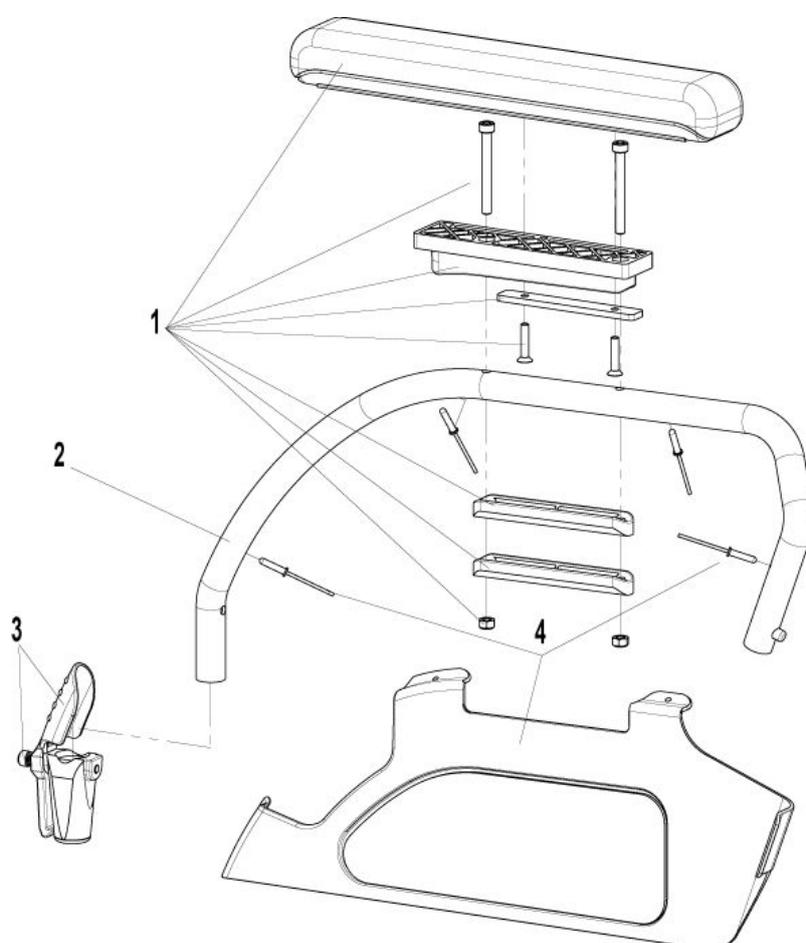

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	064450-100	Seitenteil mit kurzer und langer Armauflage (verstellbar)	Paar
	064450-002	Seitenteil mit kurzer und langer Armauflage (entspr. verstellbar)	links
	064994	Seitenteilaufnahme, hinten	Paar
1	064949	Armpolster mit Zubehör kpl.	Paar
1 - 4	064450-001	Seitenteil mit kurzer und langer Armauflage (entspr. verstellbar)	rechts
3	064952	Auslösemechanismus, vorn	links/rechts verwendbar
4	064959	Kunststoff-Abdeckung für Seitenteil mit Nieten	Paar

Sitz / Kreuzstrebe

Bezeichnung

BasiX - 3-Arm-Kreuzstrebe mit Sitzbespannung

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Sitzbespannung und -kissen


BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Sitzbespannung, dick gepolstert

BasiX 2, RubiX/RubiX 2 - 3-Arm-Kreuzstrebe mit Sitzbespannung

RubiX / RubiX 2 - 4-Arm-Kreuzstrebe (XL) mit Sitzbespannung


RubiX / RubiX 2 - Anatomischer Sitz

BasiX - 3-Arm-Kreuzstrebe mit Sitzbespannung

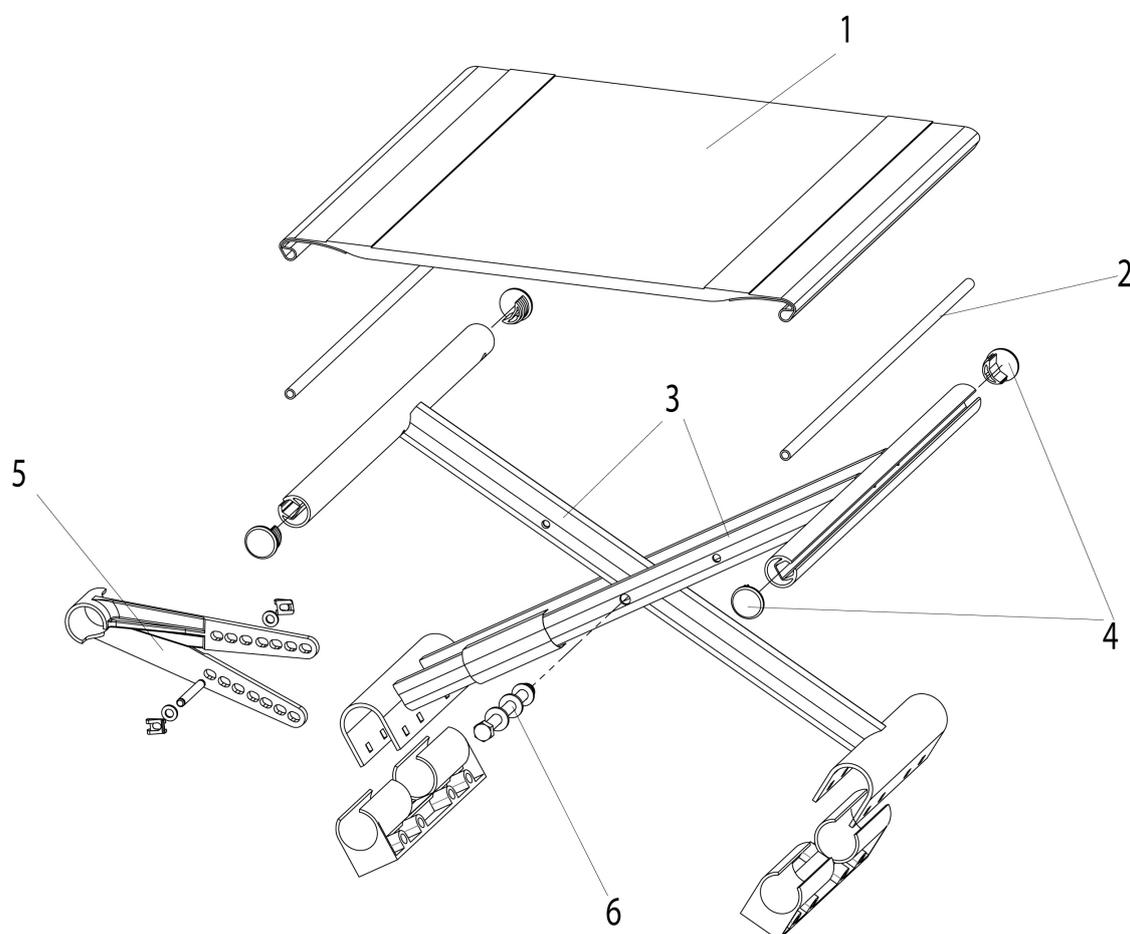

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1 - 4	064300-100	Kreuzstrebe SB: 380 mm mit Sitzbespannung kpl.	
1 - 4	064300-105	Kreuzstrebe SB: 520 mm mit Sitzbespannung kpl.	
1 - 4	064300-103	Kreuzstrebe SB: 455 mm mit Sitzbespannung kpl.	
1 - 4	064300-104	Kreuzstrebe SB: 480 mm mit Sitzbespannung kpl.	
1 - 4	064300-101	Kreuzstrebe SB: 405 mm mit Sitzbespannung kpl.	
1 - 4	064300-102	Kreuzstrebe SB: 430 mm mit Sitzbespannung kpl.	
4	C2.1001-ET	Verschlussstopfen für Kreuzstrebe	20 St./Pkg.
5	064316-ET	Kreuzstrebenlasche mit Montagezubehör kpl.	Paar, RubiX XL alle SB; PariX/BasiX ab SB 520 mm
5	064315-ET	Kreuzstrebenlasche mit Montagezubehör kpl.	Paar: bis SB 480 mm
6	064300-201	Montagezubehör für 3-Arm-Kreuzstrebe kpl.	

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Sitzbespannung und -kissen

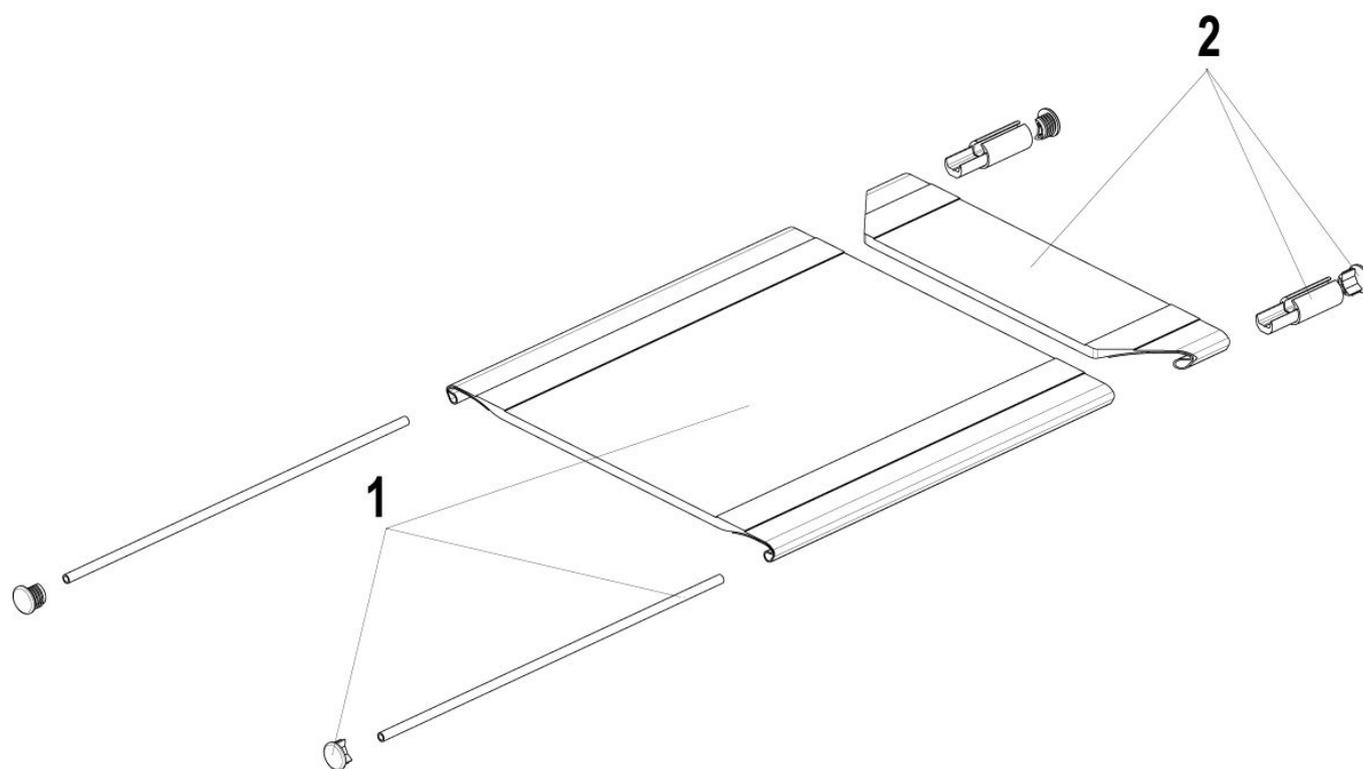


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
	064965-005	Sitzbespannung, tiefeinstellbar kpl. SB 480 mm
	064965-004	Sitzbespannung, tiefeinstellbar kpl. SB 455 mm
	064965-001	Sitzbespannung, tiefeinstellbar kpl. SB 380 mm
	064965-006	Sitzbespannung, tiefeinstellbar kpl. SB 520 mm
	064965-008	Sitzbespannung, tiefeinstellbar kpl. SB 600 mm
	064965-007	Sitzbespannung, tiefeinstellbar kpl. SB 560 mm
	064965-003	Sitzbespannung, tiefeinstellbar kpl. SB 430 mm
	064965-002	Sitzbespannung, tiefeinstellbar kpl. SB 405 mm
	064335-002	Sitzkissen für SB 400-420, Dicke 50 mm
	064335-001	Sitzkissen für SB 380, Dicke 50 mm
	064335-003	Sitzkissen SB 430 mm, Dicke 50 mm
	064335-004	Sitzkissen für SB 440-460, Dicke 50 mm
	064335-006	Sitzkissen für SB 500-520, Dicke 50 mm
	064335-005	Sitzkissen für SB 470-490, Dicke 50 mm
	000835002	Sitzkissen mit Bezug schwarz, kpl., Kissenfüllung: Verbundschaum = 92

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Sitzbespannung und -kissen


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
1	064943-005	Sitzbespannung, gepolstert kpl. für SB 480 mm
1	064943-002	Sitzbespannung, gepolstert kpl. für SB 405 mm
1	064943-001	Sitzbespannung, gepolstert kpl. für SB 380 mm
1	064943-003	Sitzbespannung, gepolstert kpl. für SB 430 mm
1	064943-004	Sitzbespannung, gepolstert kpl. für SB 455 mm
1	064943-007	Sitzbespannung, gepolstert kpl. für SB 560 mm
1	064943-006	Sitzbespannung, gepolstert kpl. für SB 520 mm
1	064943-008	Sitzbespannung, gepolstert kpl. für SB 600 mm
2	064963-001	Verlängerungs-Kit für Sitzbespannung, SB 38
2	064963-003	Verlängerungs-Kit für Sitzbespannung, SB 430 mm
2	064963-002	Verlängerungs-Kit für Sitzbespannung, SB 405 mm
2	064963-004	Verlängerungs-Kit für Sitzbespannung, SB 455 mm
2	064963-005	Verlängerungs-Kit für Sitzbespannung, SB 480 mm
2	064963-007	Verlängerungs-Kit für Sitzbespannung, SB 560 mm
2	064963-006	Verlängerungs-Kit für Sitzbespannung, SB 520 mm
2	064963-008	Verlängerungs-Kit für Sitzbespannung, SB 600 mm

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Sitzbespannung, dick gepolstert

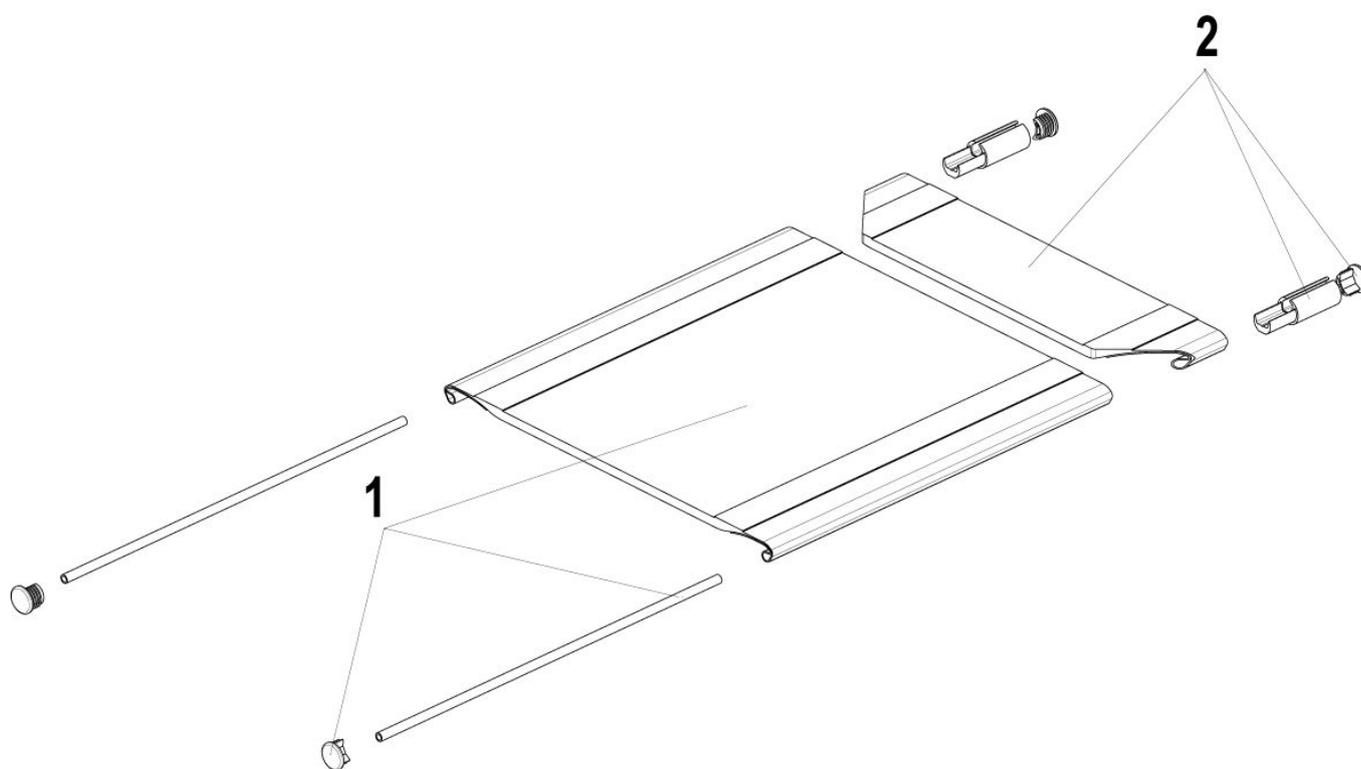


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	064340-016	Sitzbespannung dick gepolstert SB 520 mm	
1	064340-017	Sitzbespannung dick gepolstert SB 560 mm	
1	064340-018	Sitzbespannung dick gepolstert SB 600 mm	
1	064340-015	Sitzbespannung dick gepolstert SB 480 mm	
1	064340-014	Sitzbespannung dick gepolstert Sb 455 mm	
1	064340-012	BasiX/ Rubix Sitzbespannung dick gepolstert	SB40,5
1	064340-013	Sitzbespannung dick gepolstert SB 430 mm	
1	064340-011	BasiX/ Rubix Sitzbespannung dick gepolstert	SB38

BasiX 2, RubiX/RubiX 2 - 3-Arm-Kreuzstrebe mit Sitzbespannung

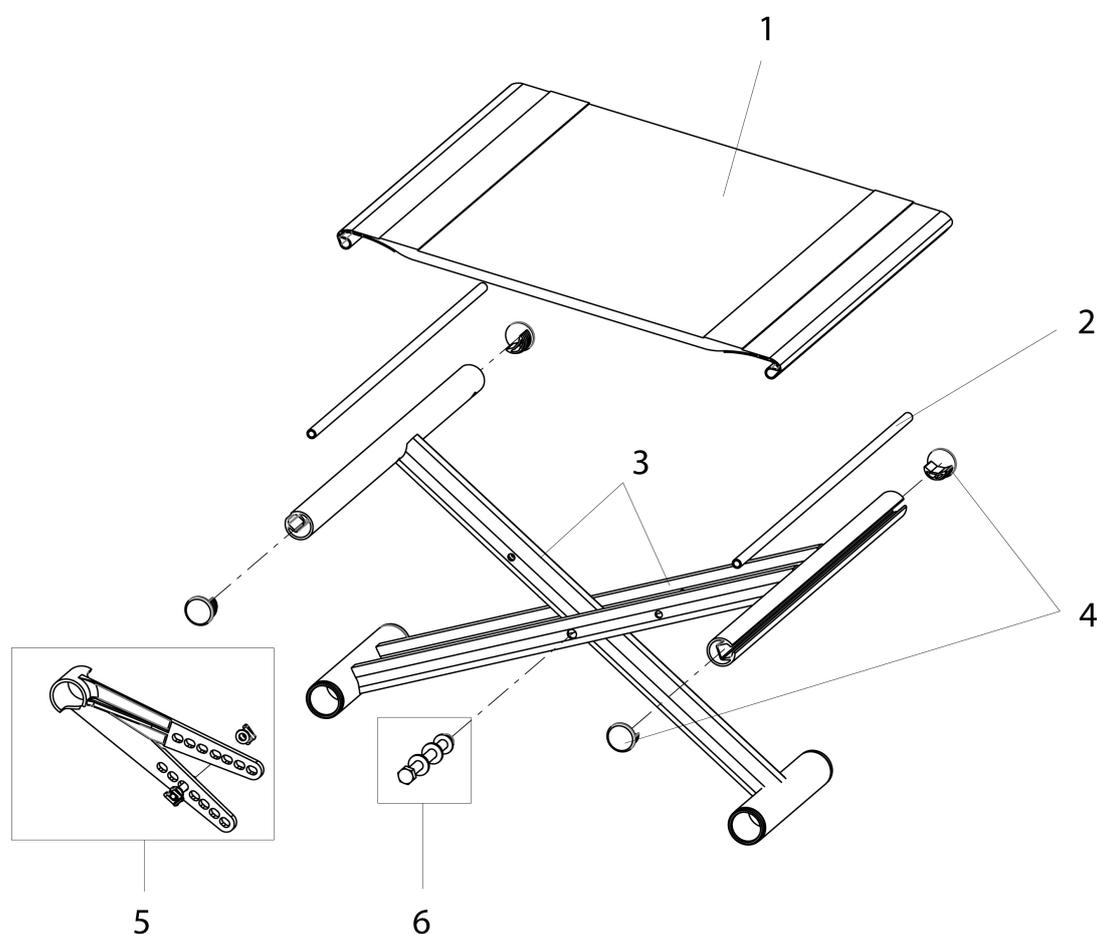

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1 - 4	064819-004	Kreuzstrebe SB: 455 mm mit Sitzbespannung kpl.	
1 - 4	064819-005	Kreuzstrebe SB: 480 mm mit Sitzbespannung kpl.	
1 - 4	064819-007	Kreuzstrebe SB: 520 mm mit Sitzbespannung kpl.	
1 - 4	064819-003	Kreuzstrebe SB: 430 mm mit Sitzbespannung kpl.	
1 - 4	064819-002	Kreuzstrebe SB: 405 mm mit Sitzbespannung kpl.	
1 - 4	064819-001	Kreuzstrebe SB: 380 mm mit Sitzbespannung kpl.	
4	C2.1001-ET	Verschlussstopfen für Kreuzstrebe	20 St./Pkg.
5	064315-ET	Kreuzstrebenlasche mit Montagezubehör kpl.	Paar: bis SB 480 mm
5	064316-ET	Kreuzstrebenlasche mit Montagezubehör kpl.	Paar, RubiX XL alle SB; PariX/BasiX ab SB 520 mm
6	064300-201	Montagezubehör für 3-Arm-Kreuzstrebe kpl.	

RubiX / RubiX 2 - 4-Arm-Kreuzstrebe (XL) mit Sitzbespannung

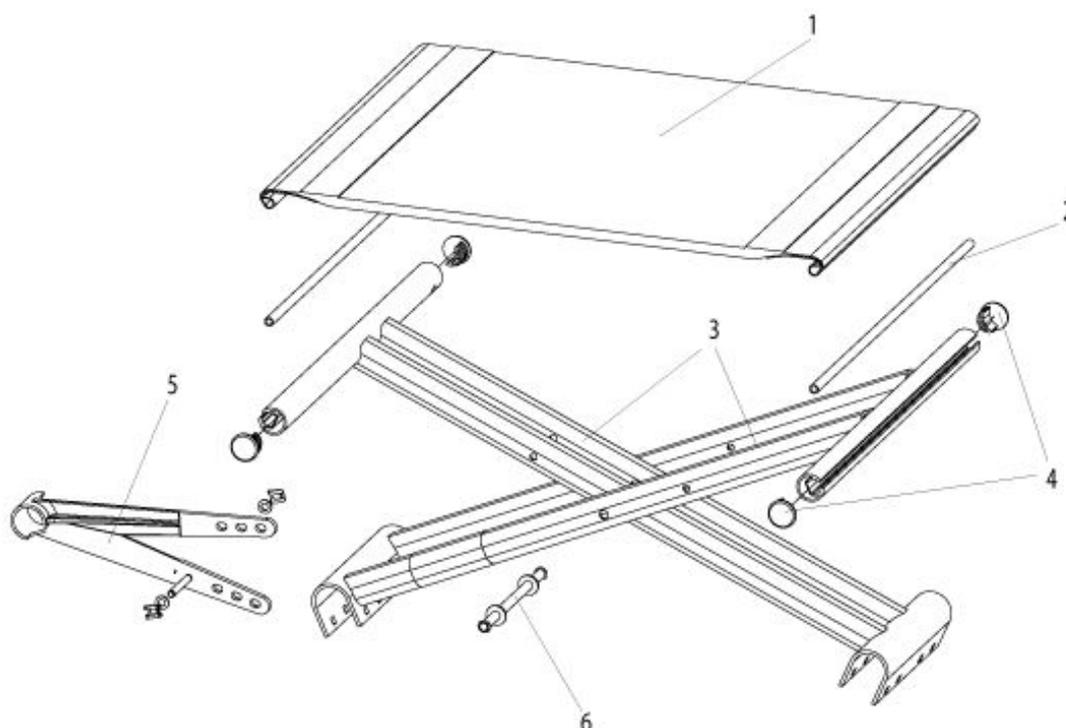

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1 - 4	064300-106	Kreuzstrebe SB: 520 mm mit Sitzbespannung kpl.	XL-Version
1 - 4	064300-108	Kreuzstrebe SB: 600 mm mit Sitzbespannung kpl.	XL-Version
1 - 4	064300-107	Kreuzstrebe SB: 560 mm mit Sitzbespannung kpl.	XL-Version
4	C2.1001-ET	Verschlussstopfen für Kreuzstrebe	20 St./Pkg.
5	064316-ET	Kreuzstrebenlasche mit Montagezubehör kpl.	Paar, RubiX XL alle SB; PariX/BasiX ab SB 520 mm
6	064300-200	Montagezubehör für 4-Arm-Kreuzstrebe	

RubiX / RubiX 2 - Anatomischer Sitz



Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
	769832100.30	Montageset für Holzplatte und Sitz
1	769832BE.51-ET	Anatomischer Sitz SB 510 mm, mit Montagezubehör
1	769832BE.56-ET	Anatomischer Sitz SB 560 mm, mit Montagezubehör
1	769832BE.60-ET	Anatomischer Sitz SB 600 mm, mit Montagezubehör
1	769832BE.48-ET	Anatomischer Sitz SB 480 mm, mit Montagezubehör
1	769832BE.46-ET	Anatomischer Sitz SB 460 mm, mit Montagezubehör
1	769832BE.38-ET	Anatomischer Sitz SB 380 mm, mit Montagezubehör
1	769832BE.41-ET	Anatomischer Sitz SB 410 mm, mit Montagezubehör
1	769832BE.43-ET	Anatomischer Sitz SB 430 mm, mit Montagezubehör

Zubehör

Bezeichnung

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Haltegurt

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Sicherheitsrad und Werkzeugsatz

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Stockhalter

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Therapietisch, abschwenkbar

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Therapietisch, aufschiebbar

BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - 3 Zoll-Transitrolle


BasiX 3 Zoll-Transitrolle

Gipsbeinstütze

RubiX / RubiX 2 - Halterung für F16 Antrieb


RubiX / RubiX 2 - Halterung für P105 Antrieb

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Haltegurt

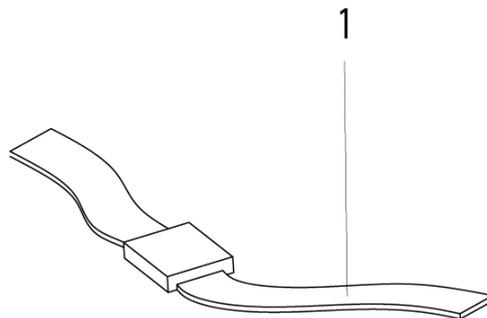


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
1	069939	Beckengurt - kurz -, bis SB 400 mm, Verstellbereich 580 - 850 mm, kpl.
1	069935	Beckengurt - lang -, ab SB 420 mm, Verstellbereich 580 - 1600 mm, kpl.

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Sicherheitsrad und Werkzeugsatz

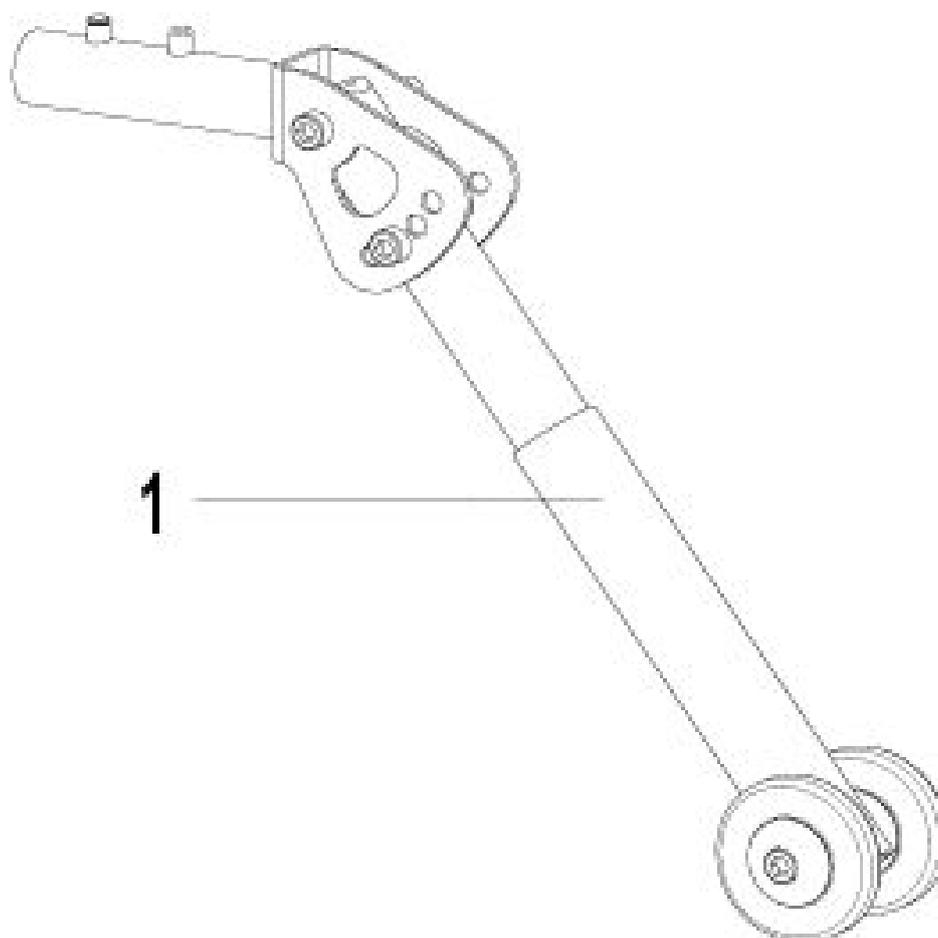


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	000604270	Werkzeugsatz	
1	064723-ET	Sicherheitsrad	2 St./Pkg.
1	064723	Sicherheitsrad	1 St.

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Stockhalter

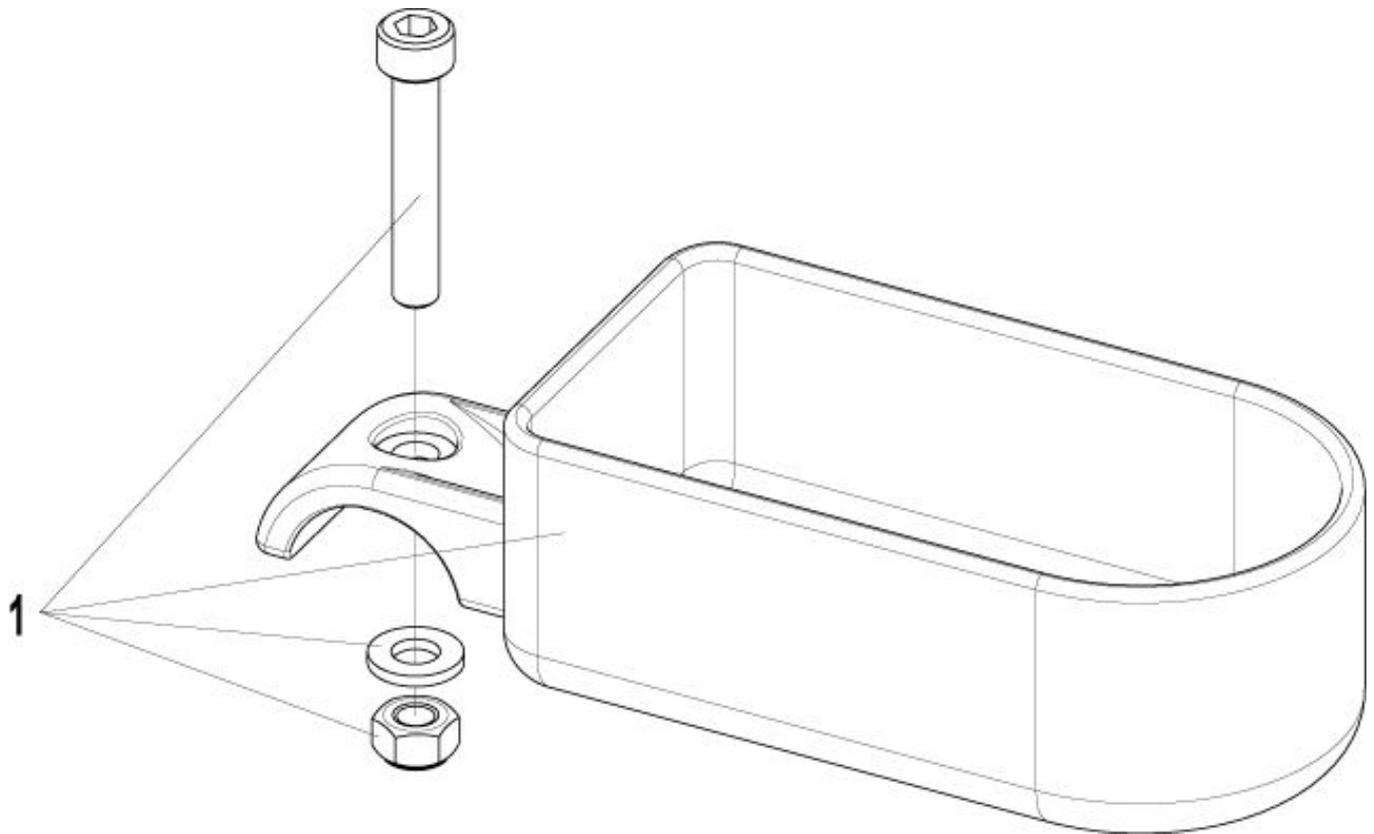


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	000815123-ET	Klettschlaufe für Stockhalter	5 St./Pkg.
1	067708	Stockhalter mit Klettschlaufe kpl.	

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Therapietisch, abschwenkbar

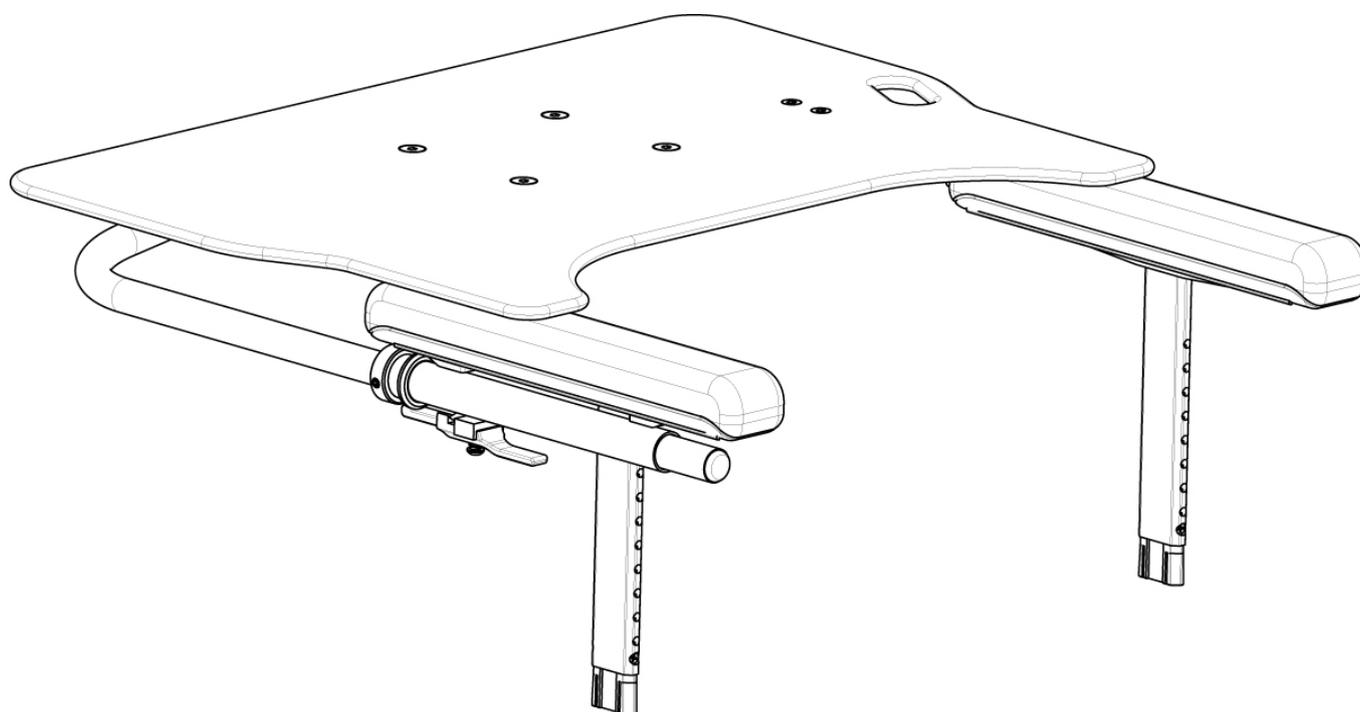


Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
064440-001	Therapietisch abschwenkbar kpl. SB 38	links
064440-002	Therapietisch abschwenkbar kpl. SB 38	rechts
064440-003	Therapietisch abschwenkbar kpl. SB 40,5 - 43	links
064440-004	Therapietisch abschwenkbar kpl. SB 40,5 - 43	rechts
064440-005	Therapietisch abschwenkbar kpl. SB 45,5 - 52	links
064440-006	Therapietisch abschwenkbar kpl. SB 45,5 - 52	rechts
064440-007	Therapietisch abschwenkbar kpl. SB 56 - 60	links
064440-008	Therapietisch abschwenkbar kpl. SB 56 - 60	rechts

BasiX / BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - Therapietisch, aufschiebbar

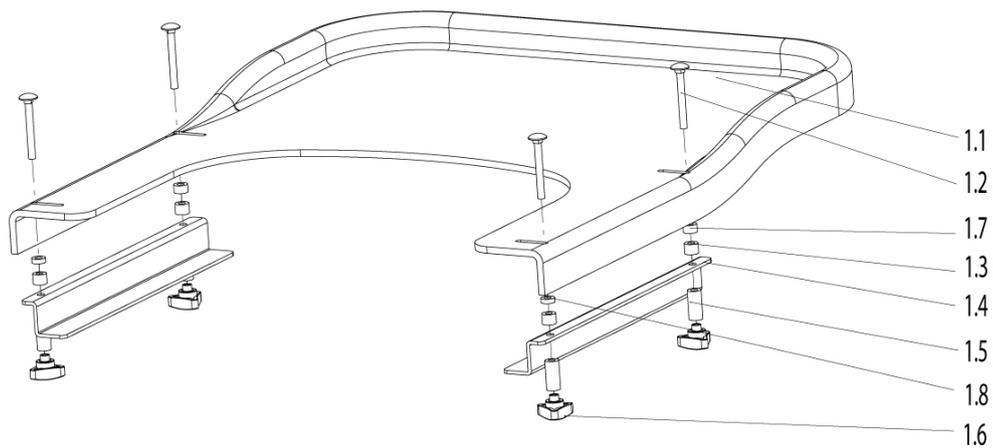


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
1.1-1.9	760848050.03	Therapietisch, aufschiebbar für SB: 460 - 480 mm
1.1-1.9	760848050.02	Therapietisch, aufschiebbar für SB: 410 - 440 mm
1.1-1.9	760848050.01	Therapietisch, aufschiebbar für SB: 380 - 405 mm
1.2 - 1.9	069934	Halterung kpl. für Therapietisch

BasiX 2, RubiX / RubiX 2 - 3 Zoll-Transitrolle

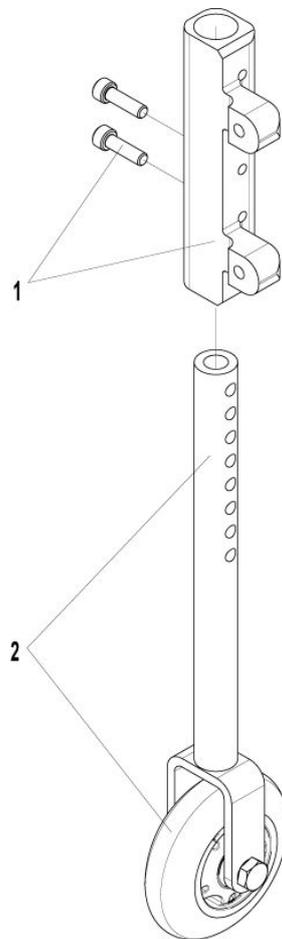


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1 - 2	064559-100	3 Zoll Transitrolle mit Rahmenadapter kpl.	Paar

BasiX 3 Zoll-Transitrolle

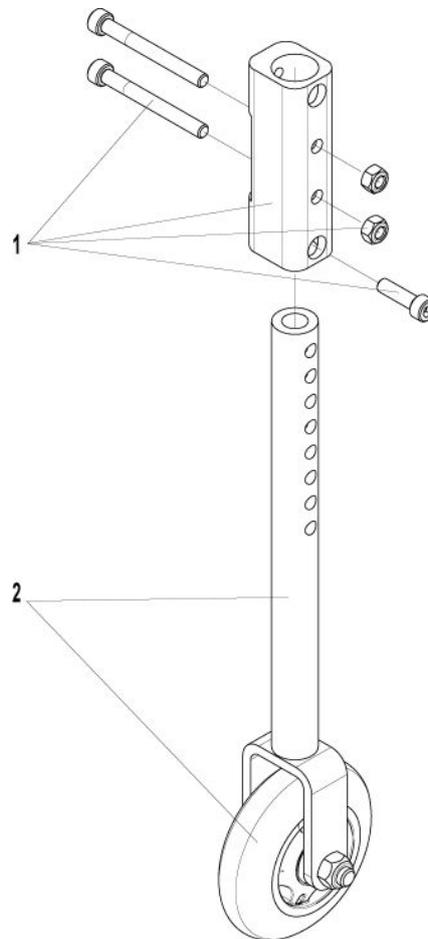

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1 - 2	064932	3 Zoll Transitrolle mit Rahmenadapter kpl.	2 St./Pkg.

Gipsbeinstütze

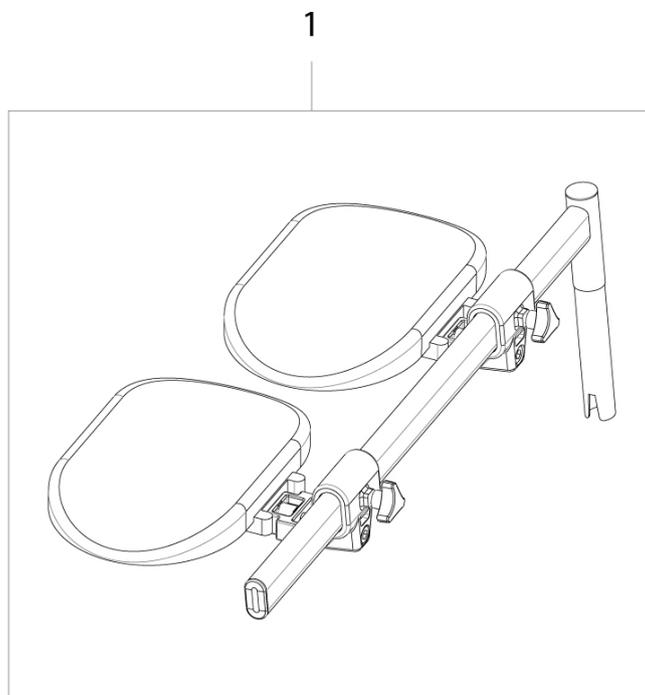


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	067725	Gipsbeinstütze kpl.	links/rechts verwendbar

RubiX / RubiX 2 - Halterung für F16 Antrieb

Anbau Rahmen
FRAME MOUNTING


Rahmen oben muss für
F16 Anbau um 5cm gekürzt werden.
IN CASE OF MOUNTING A F16 THE FRAME
MUST BE SHORTENED 5CM.

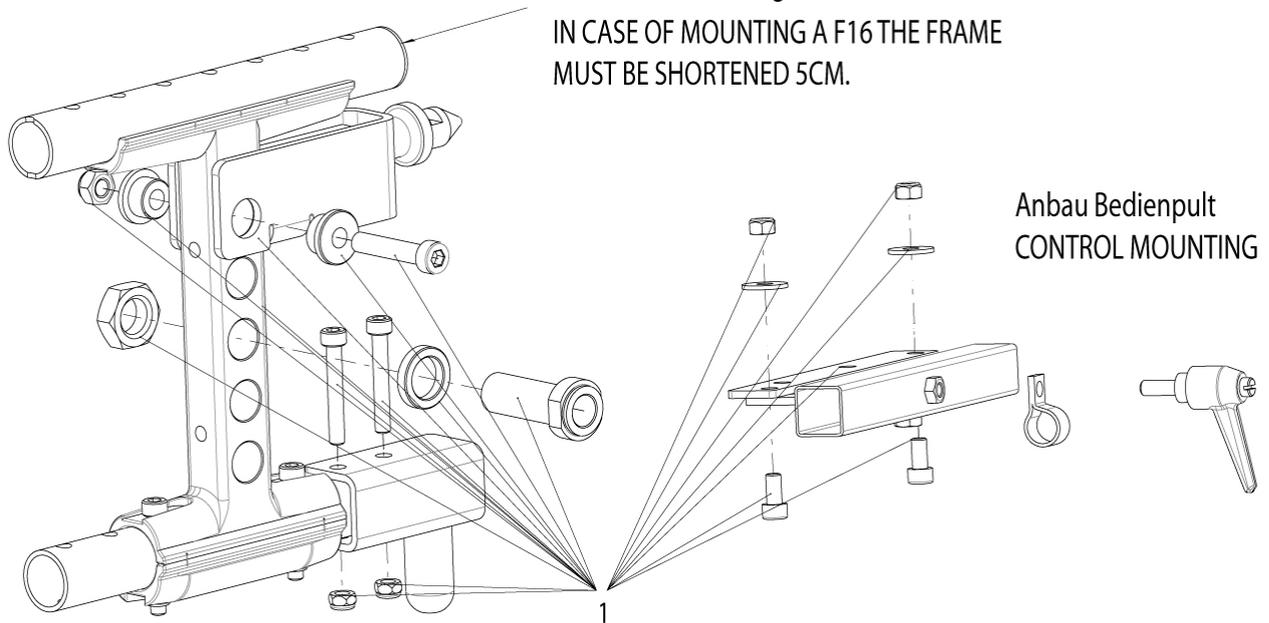

Anbau Bedienpult
CONTROL MOUNTING

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	064160-000	Halterung für F16 Antrieb	Paar

RubiX / RubiX 2 - Halterung für P105 Antrieb

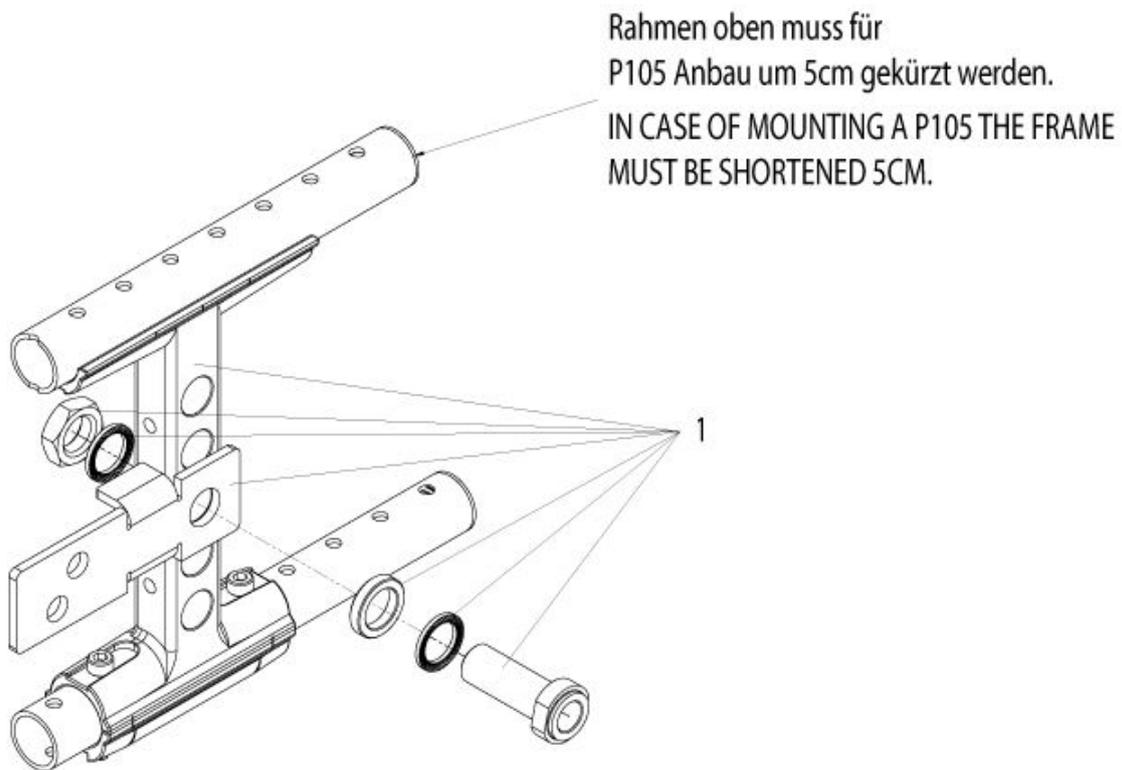

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	064150-000	Halterung für P105 Antrieb	Paar, für RubiX/HeliX

Sunrise Medical GmbH & Co. KG

Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch/Heidelberg
Germany
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.sunrisemedical.de

Sunrise Medical A.G.

Lückhalde 14
CH-3074 Muri bei Bern
Switzerland
Tel.: +41 (0) 31-958-3838
Fax: +41 (0) 31-958-3848
www.sunrisemedical.ch