

Ersatzteilkatalog Schweiz

F16

Inhaltsverzeichnis

F16	3
Rad / Antrieb	4
Antriebseinheit / Elektronik (bis Juli 07)	5
Antriebsmotor / Bremse (bis Juli 07)	6
Controller PP+ (bis Juli 07)	7
Entriegelung	8
Motor - ab Seriennummer: F16Q07050267	9
Rad	10
Radbefestigung	11
Verkleidung / Steuerung / Batterie	12
Batterie / Batteriebox	13
Bedienpult PP+ (bis Juli 07)	14
Halterungen, parallel abschwenkbar	15
Kunststoffverkleidung	16
VR2 ab Seriennummer: F16Q07050267	17
VR2 Steuerung für Begleitperson ab Seriennummer: F1607050267	18
Zubehör	19
Adaptersatz für Neon / Neon SA	20
Adaptersätze für Classic / Easy 160	21
F16-Adaptersatz für EASY 200/300, 160i	22
Halterung für F16 Antrieb - RubiX / HeliX	23

F16

Bezeichnung

Rad / Antrieb

Verkleidung / Steuerung / Batterie

Zubehör

Rad / Antrieb

Bezeichnung

Antriebseinheit / Elektronik (bis Juli 07)

Antriebsmotor / Bremse (bis Juli 07)

Controller PP+ (bis Juli 07)


Entriegelung

Motor - ab Seriennummer: F16Q07050267

Rad

Radbefestigung

Antriebseinheit / Elektronik (bis Juli 07)

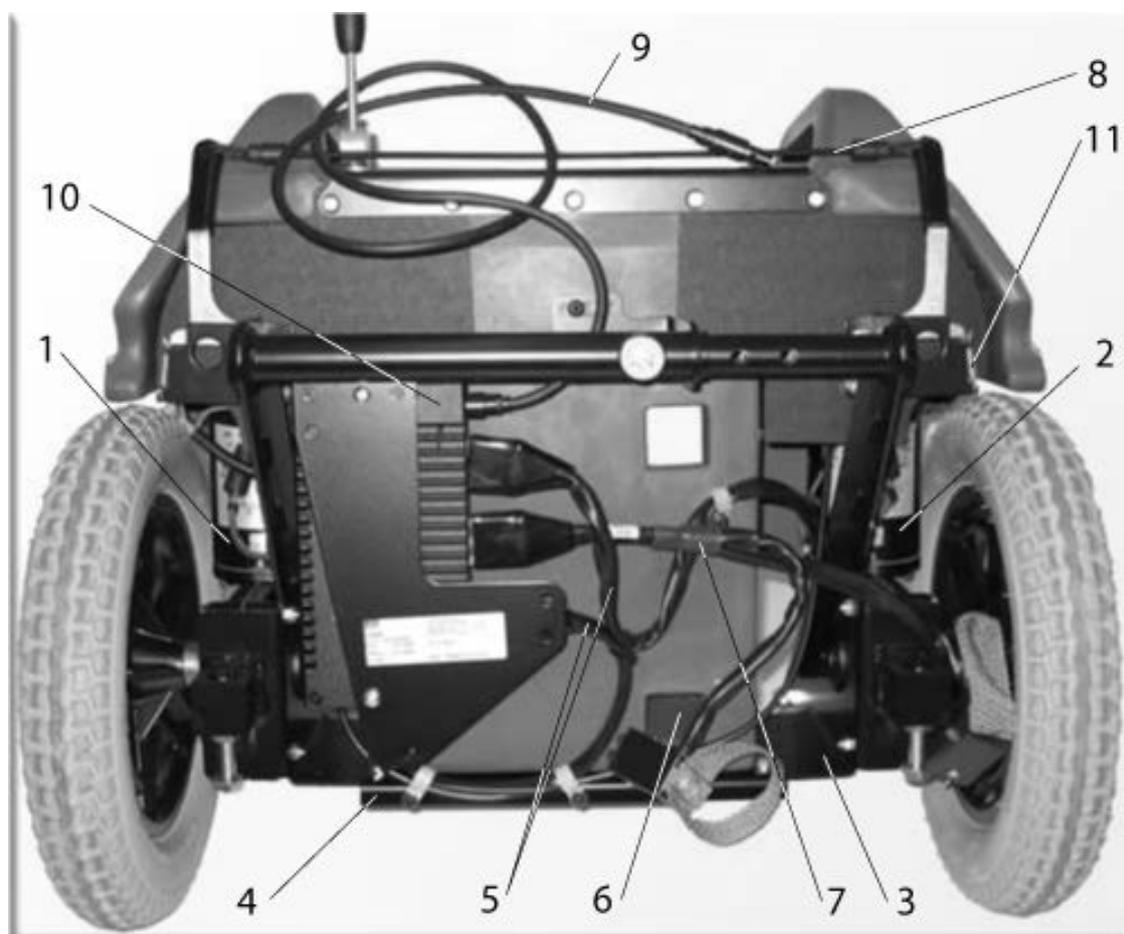

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	L182001.4702	Motor mit Bremse kpl. (bis Juli 07)	rechts
2	L182001.4703	Motor mit Bremse kpl. (bis Juli 07)	links
3	L536001.4701	Rahmenteil	links
4	L536001.4702	Rahmenteil	rechts
5	L181001.30110	Motorkabelbaum Pilot+	links/rechts verwendbar
6	L000184.0201	Beau Stecker (bis Juli 07)	
7	L181001.4706	Batteriekabelbaum (bis Juli 07)	
8	L923001.4702	Entriegelungszug	
9	000885002	Verbindungskabel 1,5 Meter	
10	172000.30005	Elektronik	
11	L000973.4600	Feder	

Antriebsmotor / Bremse (bis Juli 07)




Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1-2	L182001.4703	Motor mit Bremse kpl. (bis Juli 07)	links
1-2	L182001.4702	Motor mit Bremse kpl. (bis Juli 07)	rechts

Controller PP+ (bis Juli 07)



Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
1	172000.30005	Elektronik

Entriegelung

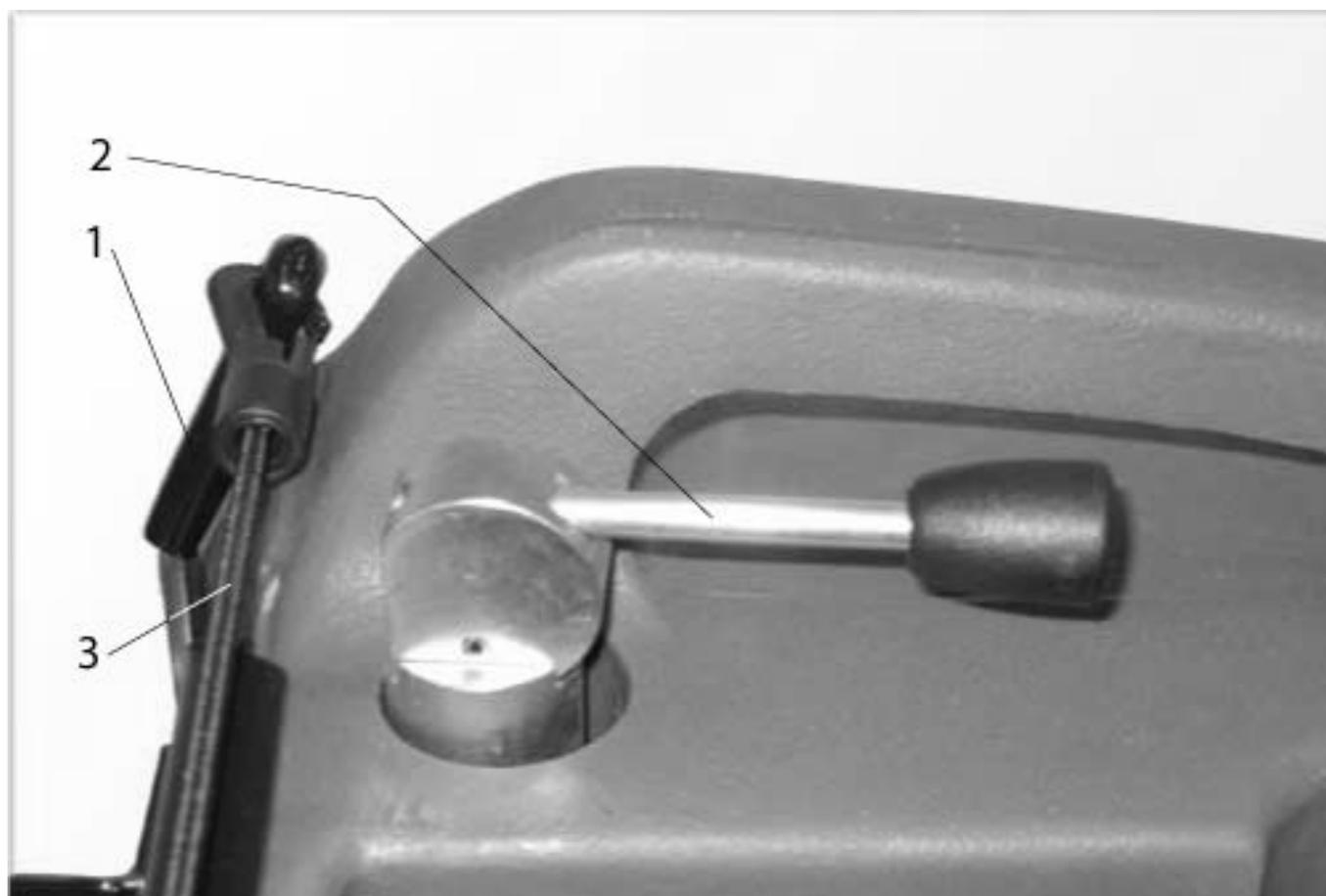


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
1	L000934.4703	Schutzkappe
2	L291001.4700	Exzenterhebel kpl.
3	L923001.4702	Entriegelungszug

Motor - ab Seriennummer: F16Q07050267




Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	L654059.4701	Distanz	
1	L182070.20000	Magnetbremse - Satz (2 Stück)	
2	L000394.0025	Passfeder 5 x 5 x 20 mm	
3	L182001.47033	Motor (FRACMO) mit Bremse kpl.	links
3	L182001.47022	Motor (FRACMO) mit Bremse kpl.	rechts

Rad

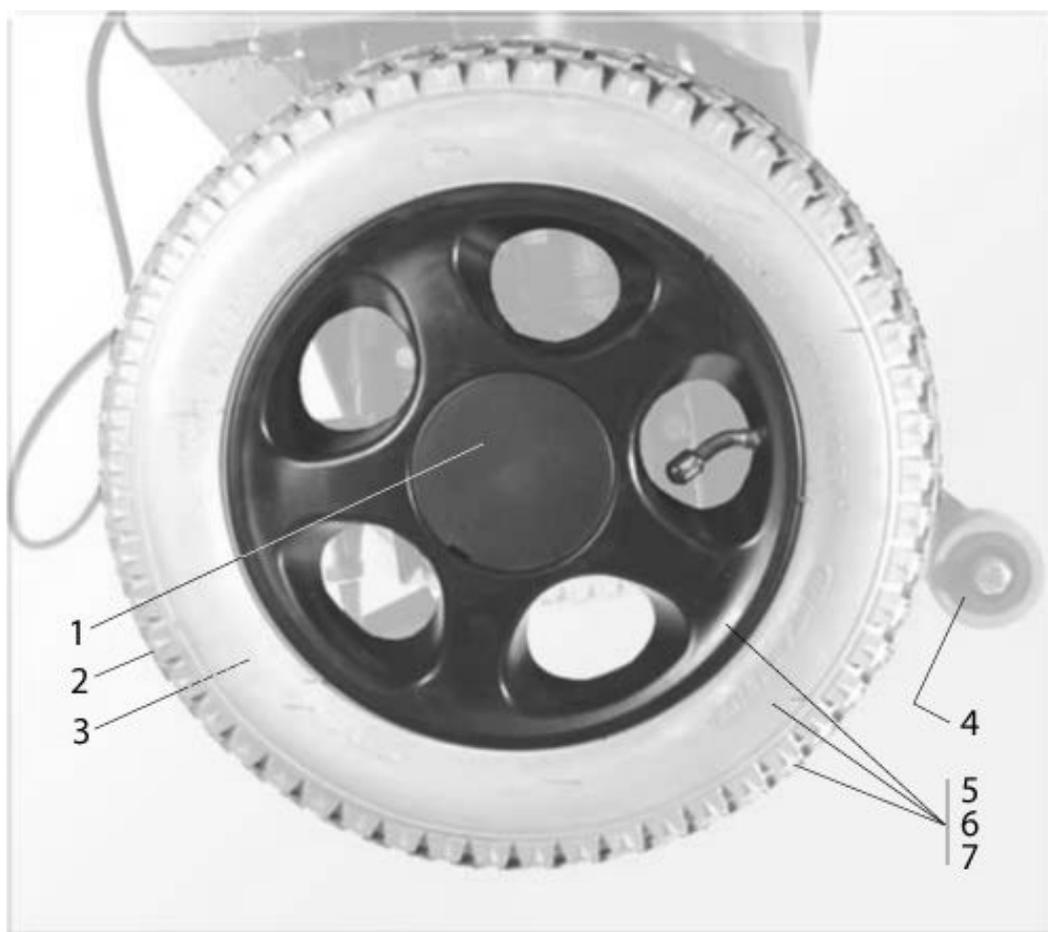

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	L000944.4700-ET	Abdeckkappe	10 St./Pkg.
2	000703.0300	Reifen 12,5 Zoll, Luft, Beschriftung auf Reifen: 12 1/2 X 2 1/4 (57-203)	
3	000698.0301	Schlauch 12,5 Zoll x 2,25 Zoll, TR13	
4	000934.4309	Sicherheitsrad	
5	801001.32102	Rad 12,5 Zoll, Luft, Beschriftung auf Reifen: 12 1/2 X 2 1/4 (57-203)	
6	801001.32103	Rad 12,5 Zoll, Vollgummi, Beschriftung auf Reifen: 12 1/2 X 2 1/4 (57-203)	
7	801001.32104	Antriebsrad pannengeschützt OKO FLUID 12-1/2 Zoll x 2-1/4 Zoll kpl.	

Radbefestigung

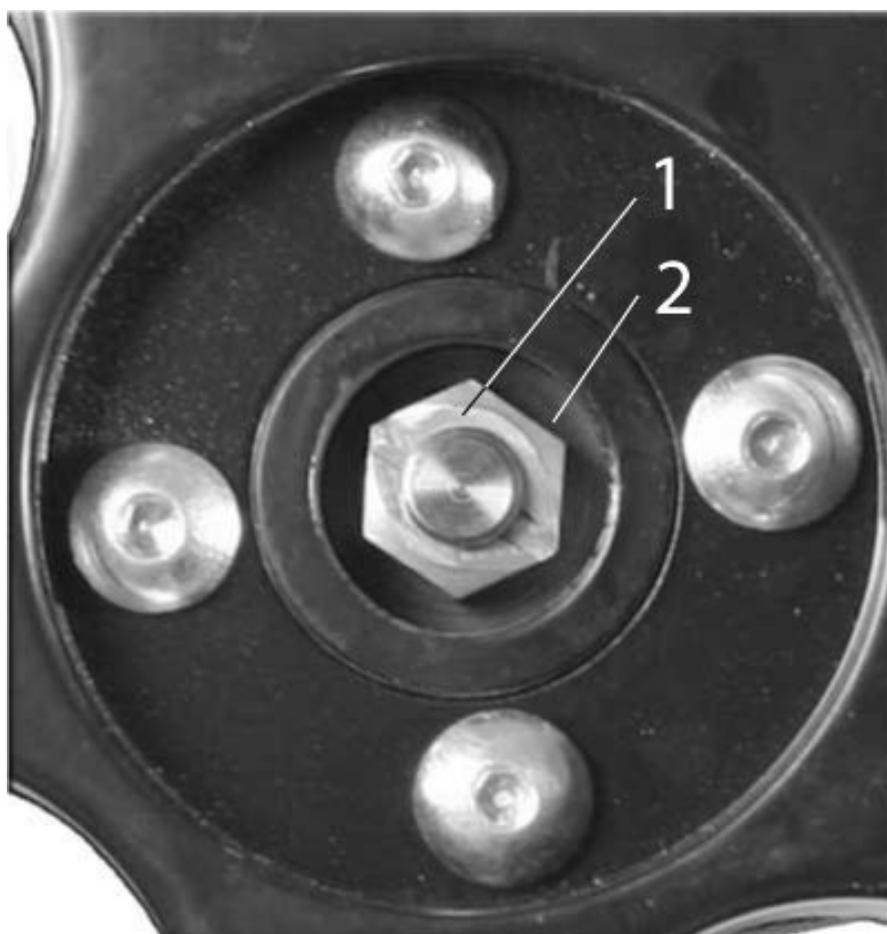

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
1	L000933.0235	Radmutter M 12
2	L000941.0055	Sicherungsblech für Radmutter

Verkleidung / Steuerung / Batterie

Bezeichnung

Batterie / Batteriebox

Bedienpult PP+ (bis Juli 07)

Halterungen, parallel abschwenkbar

Kunststoffverkleidung

VR2 ab Seriennummer: F16Q07050267


VR2 Steuerung für Begleitperson ab Seriennummer: F1607050267

Batterie / Batteriebox




Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
	060794	8 A CTE Ladegerät mit EU 2 PIN Netzkabel
	060500	EU Netzkabel mit 2 PIN Stecker
1-3	L042641.4700	Batteriebox
4	000521012	Trockenbatterie 25 Ah/12 V (nicht sichtbar)

Bedienpult PP+ (bis Juli 07)

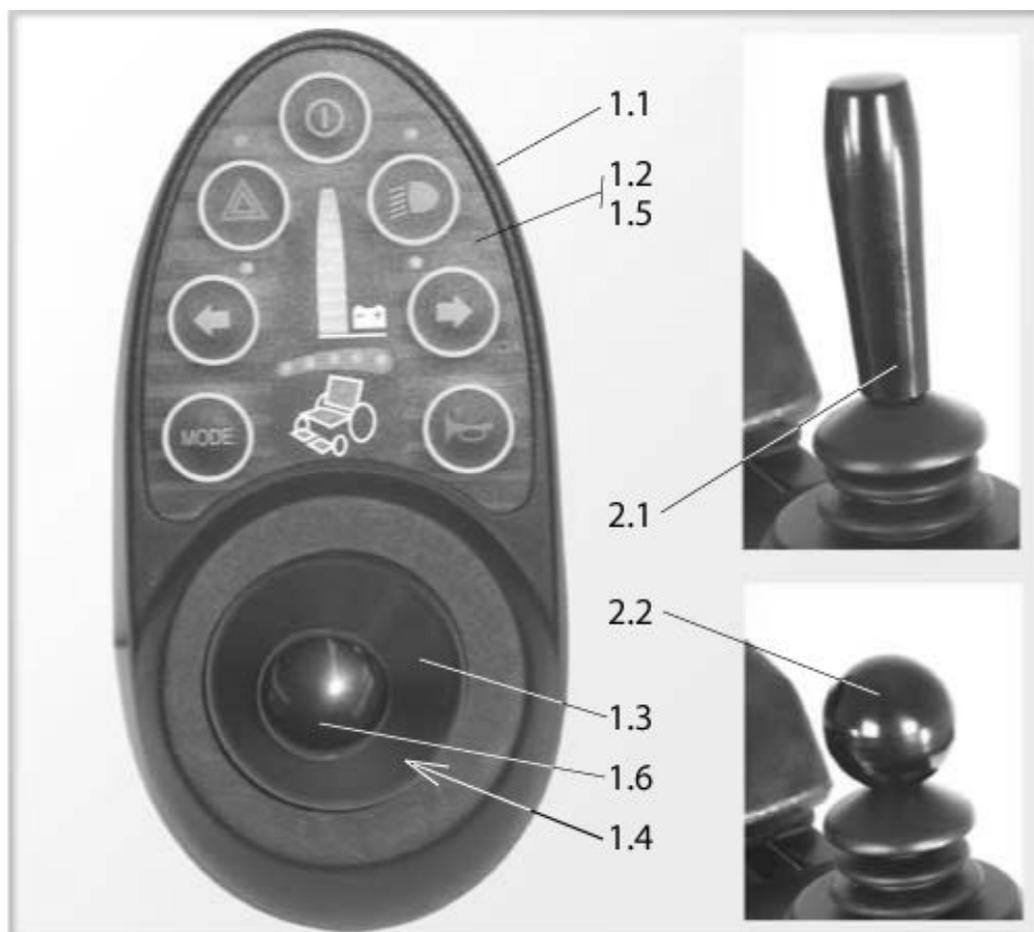

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
1.1	000882020X	Rep.-Austausch Gehäuse PP+
1.1-1.6	000882001	Bedienpult Pilot + D49670
1.5	412882105	Klebefolie PP+
1.6	L000934.0048	Kunststoffkappe für Joystick
2.1	172384.3803	S80 STAB-Aufsatz
2.2	172384.3804	B38 Kugelaufsatz

Halterungen, parallel abschwenkbar

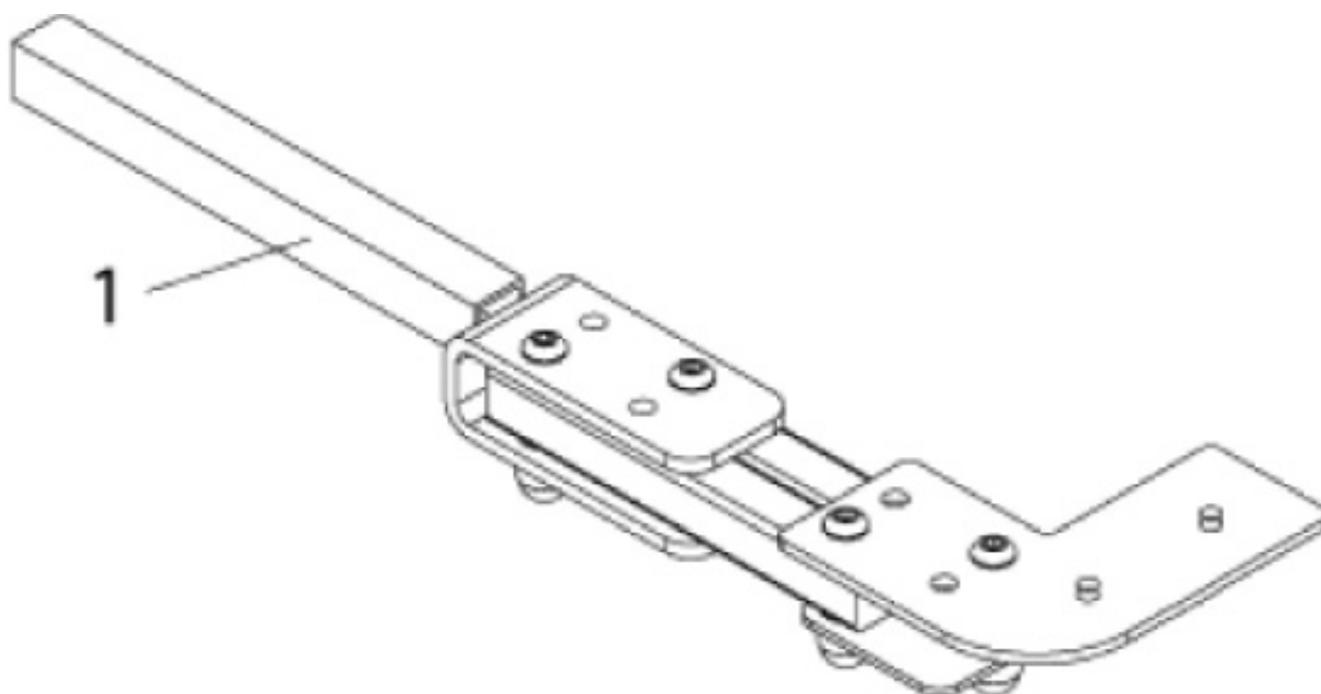


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	099001.30002	Bedienpulthalterung, parallel abschwenkbar VSI/VR2	links
1	099001.30003	Bedienpulthalterung, parallel abschwenkbar VSI/VR2	rechts
2	099001.30007	Bedienpulthalterung, parallel abschwenkbar PILOT+	rechts
2	099001.30006	Bedienpulthalterung, parallel abschwenkbar PILOT+	links

Kunststoffverkleidung




Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
1	L042041.4703	Kunststoffverkleidung

VR2 ab Seriennummer: F16Q07050267

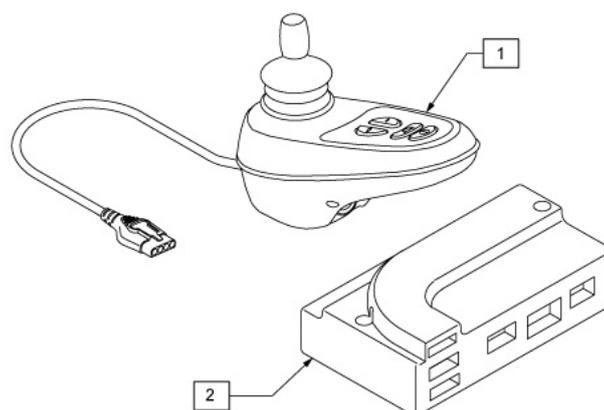

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
	L181001.4707	Batteriekabel für VR2
1	172001.32108	VR2 Bedienpult (nur Fahren)
2	172001.32109	Elektronik VR2, 60A (nur Fahren)

VR2 Steuerung für Begleitperson ab Seriennummer: F1607050267

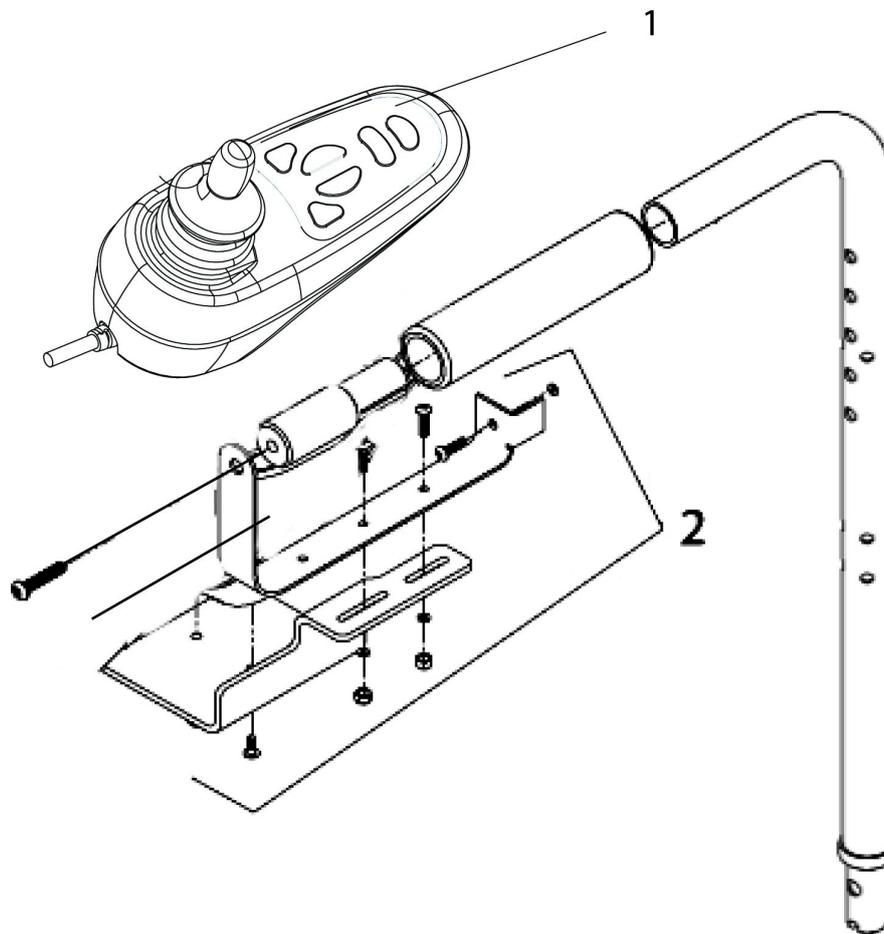

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
1	172001.32108	VR2 Bedienpult (nur Fahren)
1 to 2	L172388.30055	VR2 Steuerung für Begleitperson Kit (nur Fahren)
2	172641.32100	Aufnahme für Steuerung für Begleitperson kpl.

Zubehör

Bezeichnung


Adaptersatz für Neon / Neon SA

Adaptersätze für Classic / Easy 160

F16-Adaptersatz für EASY 200/300, 160i


Halterung für F16 Antrieb - RubiX / HeliX

Adaptersatz für Neon / Neon SA

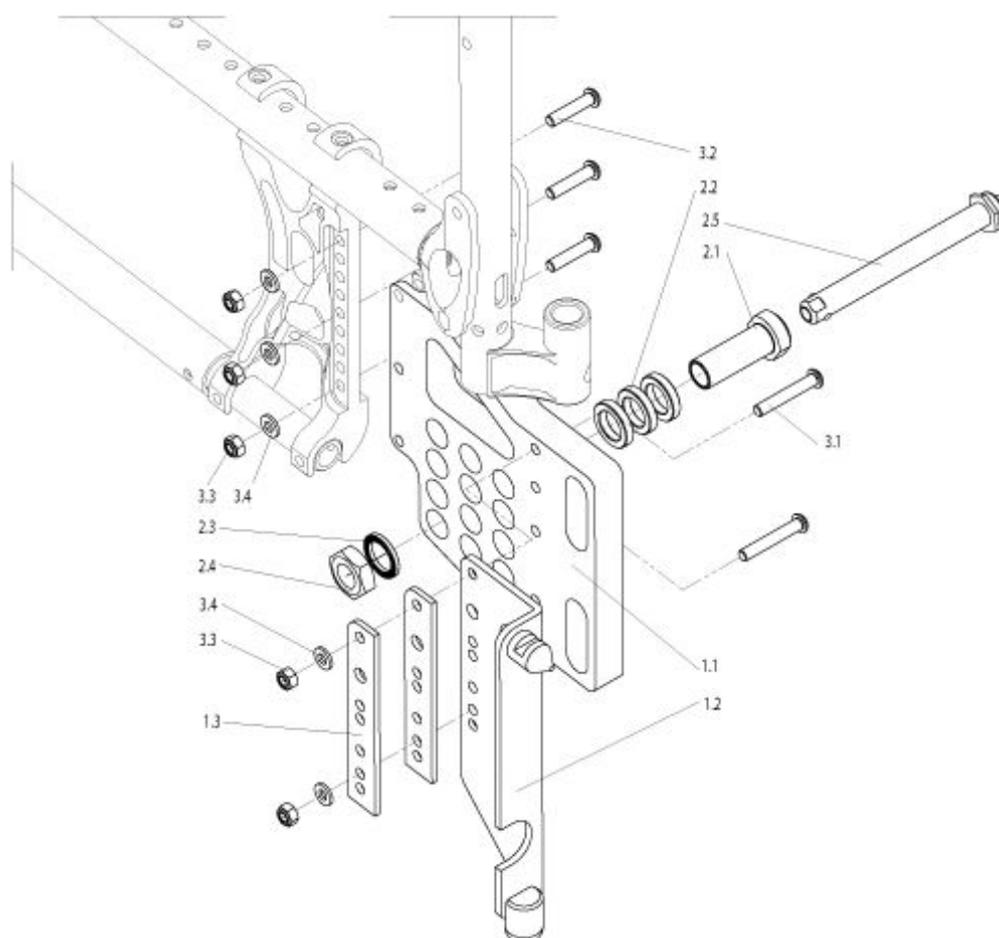


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1.1	054522	F 16 Adapter	links/rechts verwendbar
1.1- 3.4	054523	F 16 Adaptersatz kpl. - NEON /NEON SA -	Paar
1.3	000890017	Distanzblech für F 16 Adapter	
2.2	000851071-ET	Distanzring 5 mm	10 St./Pkg.
2.3	000138002-ET	Sicherungsscheibe VS 16	10 St./Pkg.
2.4	000220256-ET	Mutter M16 x 1	10 St./Pkg.
2.5	000220293	Steckachse für STD-Antriebsrad, 122mm	
3.1	000102317.01-ET	Linsenschraube M 6 x 37, Torx	25 St./Pkg.
3.2	000102311.01-ET	Linsenschraube M 6 x 27, Torx	25 St./Pkg.
3.3	000128007-ET	Mutter M6, DIN 985	25 St./Pkg.
3.4	000130007-ET	Scheibe A6,4- DIN 125	25 St./Pkg.

Adaptersätze für Classic / Easy 160

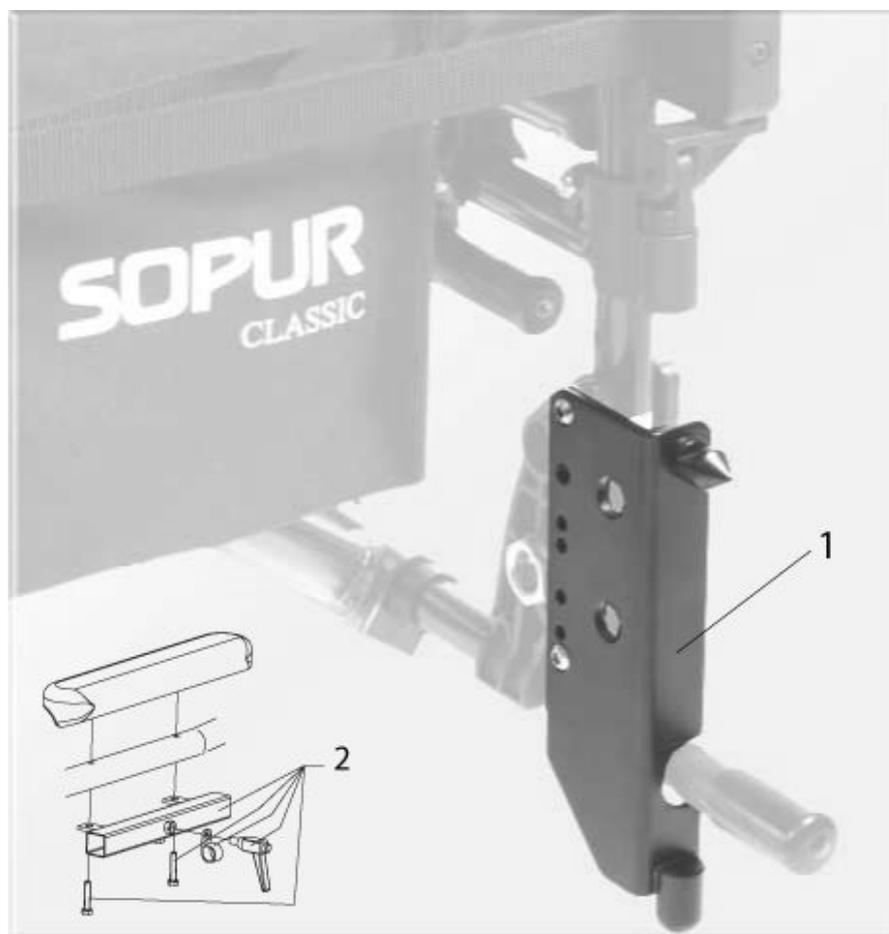

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
1-2	766990100	Adaptersatz kpl. für EASY 160
1-2	760890010	Adaptersatz kpl. für EASY Life
1-2	757890001	Adaptersatz kpl. für CLASSIC 100 / 160
1-2	753990003	Adaptersatz kpl. für CLASSIC 140 Trommelbremse
2	410882002	Bedienpulhalterung fest kpl.

F16-Adaptersatz für EASY 200/300, 160i

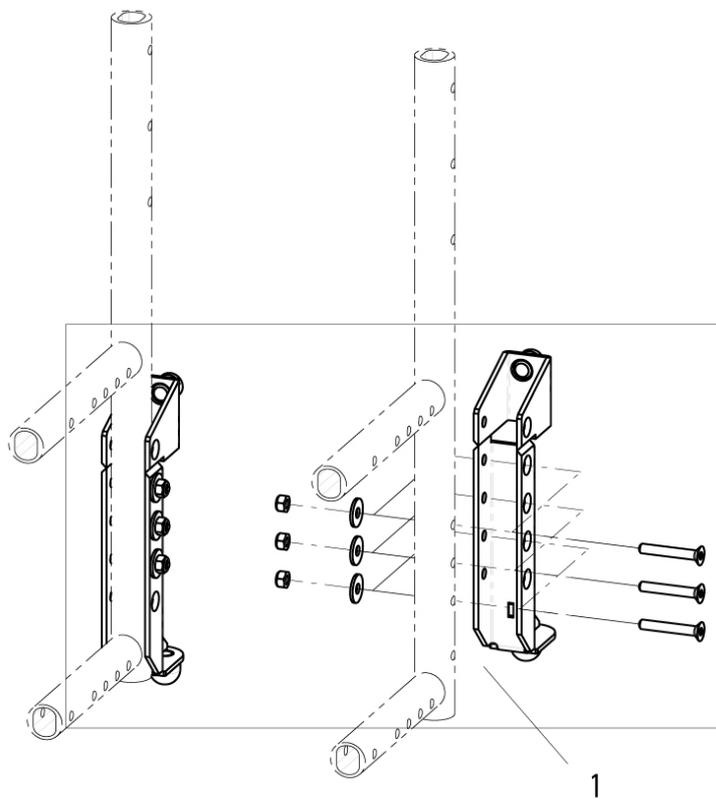


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	760890015	Adaptersatz kpl. für EASY 200/300, EASY160i	für Rohr-d 23 / 25 mm

Halterung für F16 Antrieb - RubiX / HeliX

Anbau Rahmen
FRAME MOUNTING

Rahmen oben muss für
F16 Anbau um 5cm gekürzt werden.
IN CASE OF MOUNTING A F16 THE FRAME
MUST BE SHORTENED 5CM.

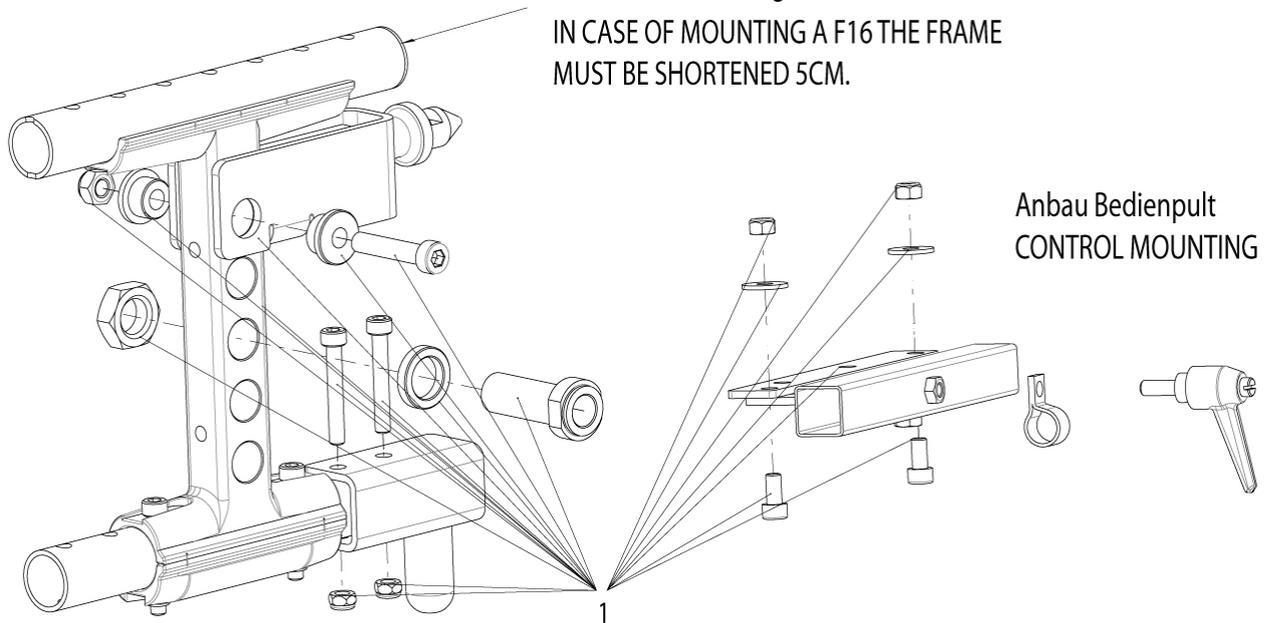

Anbau Bedienpult
CONTROL MOUNTING

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	410882002	Bedienpulhalterung fest kpl.	
1	064160-000	Halterung für F16 Antrieb	Paar

Sunrise Medical GmbH & Co. KG

Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch/Heidelberg
Germany
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.sunrisemedical.de

Sunrise Medical A.G.

Lückhalde 14
CH-3074 Muri bei Bern
Switzerland
Tel.: +41 (0) 31-958-3838
Fax: +41 (0) 31-958-3848
www.sunrisemedical.ch